

**3M**

**cuROS™**

Tampa Protetora com Álcool para  
Desinfecção de Conectores sem Agulha



**Mantenha seus  
pacientes protegidos  
e sua consciência  
tranquila.**

# IPCS

## uma ameaça séria.

Todo cateter IV representa um risco potencial de infecção primária de corrente sanguínea (IPCS).



**1 EM CADA 4 PACIENTES**  
COM IPCS MORRE.<sup>1</sup>

**MESMO QUANDO NÃO É FATAL, A IPCS PODE EVOLUIR PARA CONDIÇÕES MAIS GRAVES, AUMENTAR O TEMPO DE INTERNAÇÃO E OS CUSTOS DA ASSISTÊNCIA.<sup>2</sup>**

### Conector desprotegido: porta de entrada para IPCS


Esse é o resultado da cultura de um conector desprotegido. Quando os conectores não estão protegidos, eles podem entrar em contato com superfícies contaminadas que aumentam sua carga microbiana, potencializando o risco de IPCS.



1. [www.vdh.virginia.gov/epidemiology/surveillance/hai/documents/pdf/CDC\\_VitalSignsReportMarch2011.pdf](http://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/surveillance/hai/documents/pdf/CDC_VitalSignsReportMarch2011.pdf)  
2. [www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805442/](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805442/)

# Essa ameaça pode ser evitada.

A tampa protetora com álcool 3M Curoso™ desinfeta e protege conectores sem agulha, reduzindo a contaminação intraluminal do cateter e contribuindo para a redução IPCS.

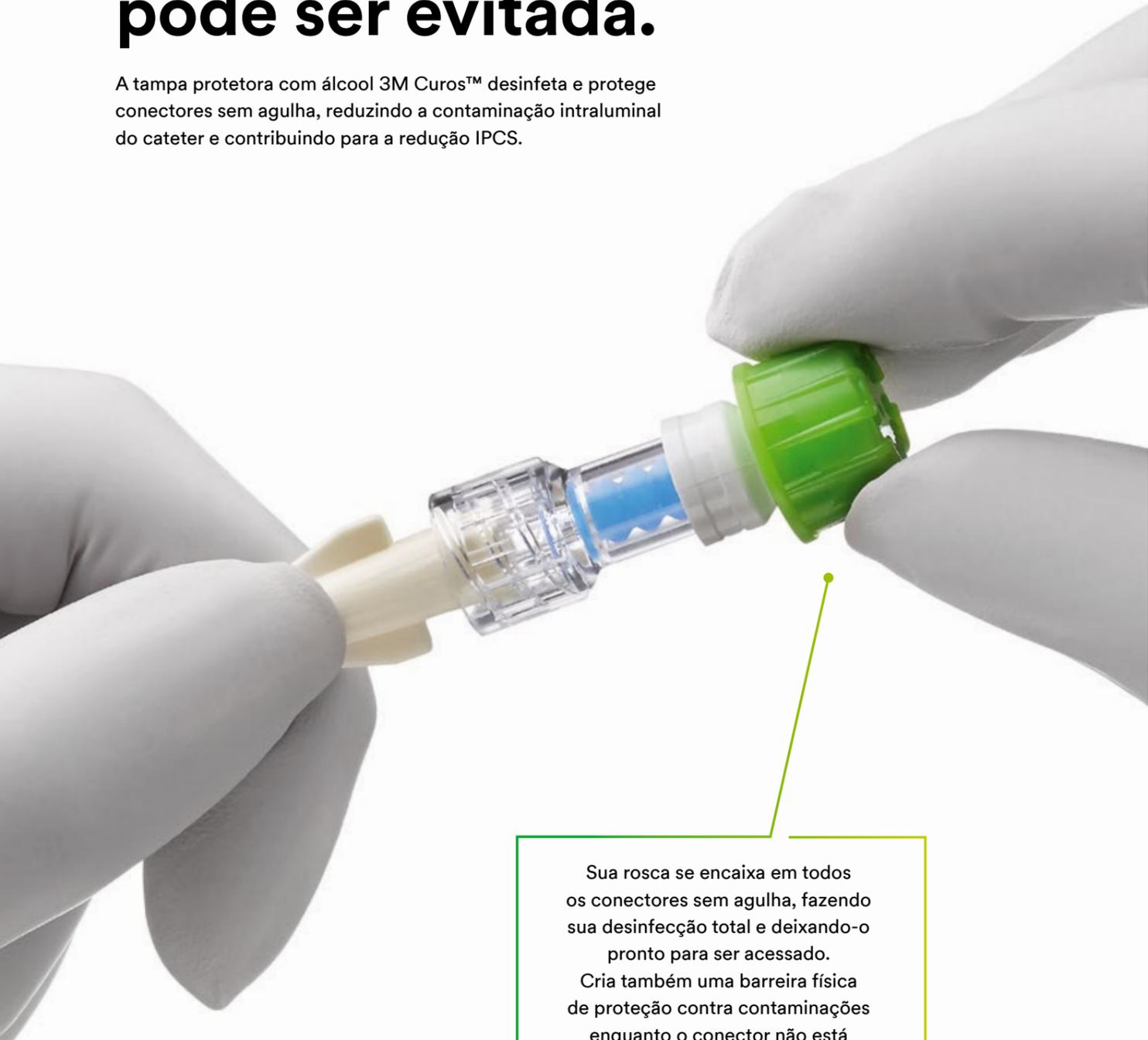

Sua rosca se encaixa em todos os conectores sem agulha, fazendo sua desinfecção total e deixando-o pronto para ser acessado. Cria também uma barreira física de proteção contra contaminações enquanto o conector não está sendo usado.

## Efetividade comprovada.

3M Curoso™ reduz 99,99% dos 6 micro-organismos mais comuns associados a IPCS.

A efetividade de Curoso™ foi testada *in-vitro* contra



**ESTUDOS REALIZADOS POR LABORATÓRIOS INDEPENDENTES COMPROVAM SUA EFETIVIDADE:** todas as amostras de teste excederam uma redução de 4-Log após um minuto.



### Mais seguro e eficaz que o Método de Desinfecção Ativa de conectores

- 1 Acesso imediato**

Com Curoso™ em posição por pelo menos 1 minuto, o conector sem agulha pode ser acessado imediatamente: nenhum procedimento de desinfecção é necessário.
- 2 Barreira física de proteção**

Curoso™ mantém o conector limpo e protegido por até 07 dias, se não for removido.
- 3 Elimina a variação de técnica**

A desinfecção manual de conectores pode variar de acordo com a maneira como é realizada e deixar de ser efetiva se não realizada da forma correta. Curoso™ não depende de técnica, basta encaixá-lo no conector.
- 4 Garantia visual de desinfecção**

Sua cor fluorescente possibilita rápida confirmação visual de que o conector está limpo, permitindo implementar auditorias e melhorar a conformidade e adesão de desinfecção.

# Use a linha completa de Curoso™

Produto	Modelo	Código	Unidades Caixa
3M Curoso™ Tampa Protetora com Álcool para Desinfecção de Conectores sem Agulha	Tampas avulsas	CFF1-270R	270
	Em tiras	CFF10-250R	250
3M Curoso™ Tampa Protetora com Álcool para Desinfecção de Conectores Luer Macho	Em tiras	CM5-200	200
3M Curoso™ Tampa Protetora com Álcool para Desinfecção de Conectores Tego de Hemodiálise	Tampas avulsas	CTG1-270R	270



## Tenha Curoso™ sempre ao alcance das mãos.

Sua versão em tiras pode ser pendurada no suporte E.V. facilitando seu uso e diminuindo o desperdício.

### Cuidado que permanece

As tampas dos protetores se encaixam e ficam firmes em qualquer conector sem agulha. Sua rosca Luer Lock oferece uma aplicação vedante universal, atendendo às diretrizes da Infusion Nursing Society (INS) para dispositivos acoplados.

**Tampas avulsas e em tiras para facilitar a dispensação.**



3M Curoso™ Tampa Protetora com Álcool para Desinfecção de Conectores sem Agulha



3M Curoso™ Tampa Protetora com Álcool para Desinfecção de Conectores Luer Macho



3M Curoso™ Tampa Protetora com Álcool para Desinfecção de Conectores Tego de Hemodiálise

# Todo suporte para você usar Curoc™




A 3M oferece um time especializado para auxiliar os hospitais a implementarem o uso de Curoc™ e alcançarem uma alta taxa de adesão e conformidade para reduzir seus índices de infecção de corrente sanguínea associada ao cateter.

- Planejamento de recursos e orientação.
- Ferramentas que estimulam a adoção da tecnologia e medem o seu sucesso.
- Materiais para treinamento, motivação e monitoramento.
- Consultoria e suporte contínuos.
- Assistência na criação de estudos e no relato de resultados.
- Monitoramento pontual para ajudar a reduzir o risco em todos os pontos de acesso.
- Conhecimento clínico sobre normas, diretrizes e como os produtos 3M podem ajudá-lo a alcançar excelentes resultados.

## Conheça outros produtos 3M para proteção antimicrobiana

Tegaderm CHG Fixador de Cateter  
com Gluconato de Clorexidina

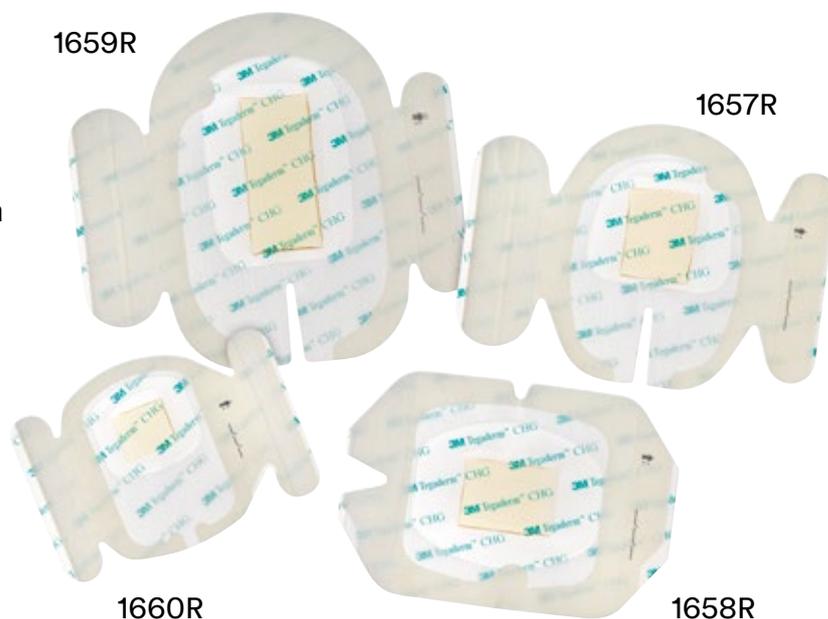

Fale com a 3M

0800-0132333

[www.3M.com.br/assistenciaaopaciente](http://www.3M.com.br/assistenciaaopaciente)  
[3msolucoesparaenfermagem@mmm.com](mailto:3msolucoesparaenfermagem@mmm.com)

 [facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem](https://facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem)  
 [youtube.com/3MSolucoesEnfermagem](https://youtube.com/3MSolucoesEnfermagem)

