

## COMADRE – AÇO INOXIDÁVEL



Comadre



Tampa para Comadre

### 1 DESCRIÇÃO

É um produto múltiplo uso, desenvolvido e fabricado em aço inoxidável 304, composto de um reservatório com capacidade de 3,5 litros para coletar dejetos líquidos e sólidos. Possui alta resistência à corrosão, a ação química, mecânica, térmica como a esterilização por saturado sob pressão a 121°C-15 minutos ou 134°C - 4 minutos.

### 2 INDICAÇÃO

Coletar diurese, fezes e realizar higiene íntima em de pacientes com mobilidade reduzida

### 3 INSTRUÇÕES DE USO

- Produto de uso individual, **NÃO DESCARTÁVEL**
- **Limpeza Concorrente:** Após cada uso desprezar os resíduos no vaso sanitário ou frasco de coleta (se necessário), remover o excesso com água corrente no banheiro do quarto e disponibilizar para o próximo uso.
- Realizar **Limpeza e desinfecção térmica** de acordo com a rotina do serviço de saúde.
- **Limpeza manual:** utilizar detergente de uso hospitalar, esponja ou escova não abrasiva para friccionar as áreas internas e externas do produto.
- Enxaguar com água corrente potável após a limpeza.
- Secar com um produto absorvente limpo e seco, que não solte partículas ou por meio de secadora automatizada de ar quente.
- Desinfecção química da superfície externa com álcool a 70%.
- **Limpeza e desinfecção automatizada** – pode ser realizada em:
  - Lavadora de descarga com termodesinfecção: neste equipamento é possível desprezar os resíduos e realizar a limpeza e desinfecção interna e externa da comadre sem exposição dos profissionais de saúde.
  - Seguir as instruções de uso do fabricante do equipamento ao selecionar o ciclo de limpeza e desinfecção.
  - Lavadora termodesinfetadora: após desprezar a diurese realiza-se um enxague interno com água corrente para remoção do excesso dos resíduos e em seguida submete-se ao processo de limpeza e desinfecção automatizada interna e externa.

- Seguir as instruções de uso do fabricante do equipamento ao selecionar o ciclo de limpeza e desinfecção.
- Sistema de Limpeza a Vapor (Steamer) – após desprezar a diurese realiza-se um enxague interno com água corrente e em seguida utiliza-se o vapor fluente para realizar a limpeza interna e externa.
- Detergentes: utilize somente produtos recomendados (enzimático, alcalino ou neutro), com diluição, temperatura e tempo de exposição de acordo com as instruções de uso do fabricante do produto.

**Nota:** Não utilize produtos químicos corrosivos, soluções salinas e cloradas, essas substâncias podem favorecer o aparecimento de manchas, pitting e corrosão.

- Água corrente potável tratada, ou seja, livre de resíduos orgânicos e inorgânicos.
- Desinfecção térmica em lavadora automatizada – tempo e temperatura de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos.
- Não colocar produtos pesados sobre o papagaio: o fabricante não se responsabiliza pelo mau uso, processamento e armazenamento indevido deste produto.

#### 4 ESTERILIZAÇÃO

Nota: por se tratar de um produto não crítico, não é necessária a esterilização. Esterilizar somente se necessário (coleta de urocultura), seguir o protocolo do serviço de saúde.

- Esterilização a vapor por altas temperaturas – 121° C por 15 minutos ou 134° C por 4 minutos.

#### 5 ACONDICIONAMENTO

**No almoxarifado:** Acondicionar em embalagem plástica transparente, identificar o produto com etiqueta contendo: código do produto, nome do produto, data de fabricação, data de validade, número do lote e nome do fabricante. Armazenar em local limpo e seco em armários fechados protegidos de poeira.

**No CME do Serviço de Saúde:** Após o processo de limpeza e desinfecção a comadre pode ser embalada em embalagem plástica transparente, lacrada e identificada com a data do processamento, o método, data limite de uso e identificação do profissional. Preparo para esterilização, a comadre pode ser embalada em sistema de barreira estéril flexível de acordo com o método de esterilização em: Tyvec®, Papel Crepado, Papel Grau Cirúrgico, SMS, Algodão. A identificação e o armazenamento devem atender as recomendações da ANVISA na RDC Nº 15, de 15 de março de 2012 nos artigos n.º 85 e 58 a 61.


#### 6 PRECAUÇÃO

A comadre deve ser utilizada somente para a função que foi projetada, pois, o uso indevido pode colocar em risco os pacientes ou danificar o produto.

**Nota:** o fabricante não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Ver garantia.

#### 7 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	CÓDIGOS
			Econox

	INSTRUÇÕES DE USO	IDU_01	Data: 01/06/2020
	EMBALAGENS E RECIPIENTES	REV:00	

Comadre	40 x 28 cm	1 unidade	240.025
Tampa para Comadre	-	1 unidade	-

**ANVISA:** A comadre não se enquadra na definição de produto médico da RDC nº 185/01, não sendo passível de cadastro na ANVISA.  
**CNPJ:** 59.293.662/0001-40 | **T.Resp.:** W.Pesinato **CREA:** 140949 | [regulatorio@fami.com.br](mailto:regulatorio@fami.com.br)