



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO


Respiron Volumétrico Soft Adulto - Respivol

Controle: FTP-EXR-001

Versão: 01

Emissão: maio/2017

Página: 1/3

FABRICANTE: Medinet SRL - Itália		
REGISTRO ANVISA: 10424960009	NCM: 9019.20.90	
VALIDADE: Indeterminada	GARANTIA: 3 meses	
SIMPRO: 299521	CÓDIGO DO PRODUTO: RV5000	
EAN DO PRODUTO: 7898906239999	CAIXA DE EMBARQUE: 45 x 32 x 33cm com 10 unidades	

1 DESCRIÇÃO

É um equipamento para o exercício da musculatura inspiratória e incentiva a respiração lenta e profunda, permitindo mensurar o volume de ar inspirado em cada movimento. Indicado para pacientes com problemas respiratórios, como: atelectasias, pré e pós-operatório e prevenção de doenças respiratórias. Para uso individual. Atóxico.

2 COMPOSIÇÃO

- Capa: polietileno de baixa intensidade;
- Tap: polietileno de alta intensidade;
- Tampas de filtro: poliuretano expandido à base de poliéster;
- Corpo de duas câmaras: poliestireno transparente;
- Floater: copolímero – stirolux;
- Tubo corrugado: polietileno;
- Filtro: rede de poliuretano expandido com base em poliéster;
- Bocal e conector; polietileno;
- Látex e pvc livre.



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Respiron Volumétrico Soft Adulto - Respivol

Controle: FTP-EXR-001

Versão: 01

Emissão: maio/2017

Página: 2/3

3 MODO DE USAR

- a) Respire normalmente e coloque os lábios firmemente ao redor do bocal;
- b) Inspire lentamente até que o pistão da coluna da esquerda (indicador de fluxo) se situe na janela transparente da coluna. Mantenha-o flutuando na zona da janela transparente durante o maior tempo possível. Perceba como o pistão da coluna da direita começa a subir. Continue inspirando tentando alcançar o nível marcado pelo médico ou fisioterapeuta;
- c) Retire o bocal dos lábios e exale lentamente pelo nariz, enquanto os dois pistões móveis voltam à posição original;
- d) Utilizar o indicador móvel inferior da coluna da direita para sinalizar o nível alcançado;
- e) Descansar após cada respiração profunda;
- f) Repetir o exercício seguindo as orientações indicadas pelo seu médico;
- g) Tossir ao finalizar o exercício para extrair a mucosidade acumulada;
- h) Ao terminar o exercício, coloque o bocal na abertura oval situada na parte superior do dispositivo.

4 LIMPEZA

Depois de cada uso, lavar cuidadosamente o bocal com água corrente e quente (máximo 40°C) e deixar secar. Lavar periodicamente os 3 filtros situados na parte de baixo do dispositivo. Manter o dispositivo em lugar limpo e seco quando estiver fora de uso. O Respiron Volumétrico não contém látex e pode ser descartado em recipientes de resíduos plásticos. Não fazer uso de autoclave.

5 ARMAZENAGEM

O produtos devem ser armazenados em local fresco e seco, ao abrigo da luz e acondicionados sob estrados ou pallets.

6 CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes com pneumotórax (presença de ar na cavidade pleural) não devem utilizar este aparelho. Portadores de doenças cardiovasculares graves só deverão utilizá-lo após autorização médica e com acompanhamento profissional.



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Respiron Volumétrico Soft Adulto - Respivol

Controle: FTP-EXR-001

Versão: 01

Emissão: maio/2017

Página: 3/3

7 DIMENSÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Peso: 0,228kg;
- 21,6cm x 22,5cm x 7cm (A x L x P).

8 CONTÉM

- Respivol adulto;
- Mangueira com bocal;
- Manual de uso.

