



Ficha Técnica

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Máscara Facial Almofadada Descartável Sure Seal

Códigos do Fabricante: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282.

Nº de registro na ANVISA: 10342600054

Prazo de Validade: indeterminado.

Produto com reprocessamento proibido.

Embalagem: Unitária.

Não estéril

Pronto uso.

Foto



Tabela comparativa

Código	Tamanho	Cor do anel
1277	Neonato	Branco
1278	Infantil	Rosa
1279	Pediátrico	Amarelo
1280	Adulto Pequeno	Verde
1281	Adulto Médio	Vermelho
1282	Adulto Grande	Azul

Descrição e Indicação

A máscara facial almofadada permite a administração de gases durante a ventilação não invasiva em geral, pode ser utilizado em conjunto com aparelhos de anestesia, ventiladores mecânicos e ressuscitadores manuais.

A máscara possui ajuste anatômico, com coxim inflável, que pode ser facilmente insuflado ou desinsuflado utilizando uma seringa, para garantir melhor vedamento sobre a face do paciente. A cúpula é toda transparente para visualizar os sinais vitais do paciente durante todo o procedimento.

Ocasionalmente, para alguns procedimentos, a máscara facial pode ser fixada à face do paciente utilizando-se o fixador cefálico (não objeto desse cadastro) e o anel ("aranha") de plástico colorido.



Ficha Técnica

Instrução de Uso

Remova a Máscara Facial Almofadada Descartável Sure Seal da embalagem;
Verifique o nível de insuflação do coxim (almofada) da máscara:
Para ajuste, conecte uma seringa padrão na válvula de insuflação. Insufle ou desinfele o coxim (almofada) de acordo com a anatomia da face do paciente;
Inspeccione possíveis vazamentos;
Conecte a máscara ao circuito ventilatório ou ao ressuscitador manual;
Certifique-se que as conexões estão seguras;
Mantenha a máscara conectada à face do paciente com a mão ou com um fixador cefálico durante o uso. O anel de fixação deve ser removido da máscara caso seu uso não se faça necessário;
Em caso de suspeita de inadequado funcionamento da máscara, substitua-a imediatamente;
Descarte-a após o uso.

Composição

Concha" e coxim (almofada): PVC (polivinilcloride).
Conector: Policarbonato
Anel: Polietileno e corante.
Válvula de insuflação: PVC
Livre de Látex.

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo - SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo. CRF-SP: 74338

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709