

**NOME DO PRODUTO: SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO – PORTEX**

Registro MS: 80228990043

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Sonda

Matéria Prima: Tubo e balão em Cloreto de Polivinila (PVC) Siliconizado

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: ( X ) Sim ( ) Não

Validade: 5 anos

**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, transparente, com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traquéia. Espessura mais fina que promove mais maleabilidade ao uso.

“Cuff” de baixa pressão e alto volume de formato oval, efetivando a vedação numa área maior da traqueia. Balão piloto com marcações que possibilitam a identificação do tamanho da sonda, olho de Murphy no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral.

**INDICAÇÃO DE USO**

Utilizado em procedimentos de entubação nasal ou oral para manutenção de vias respiratórias, em curto, médio e longo período.

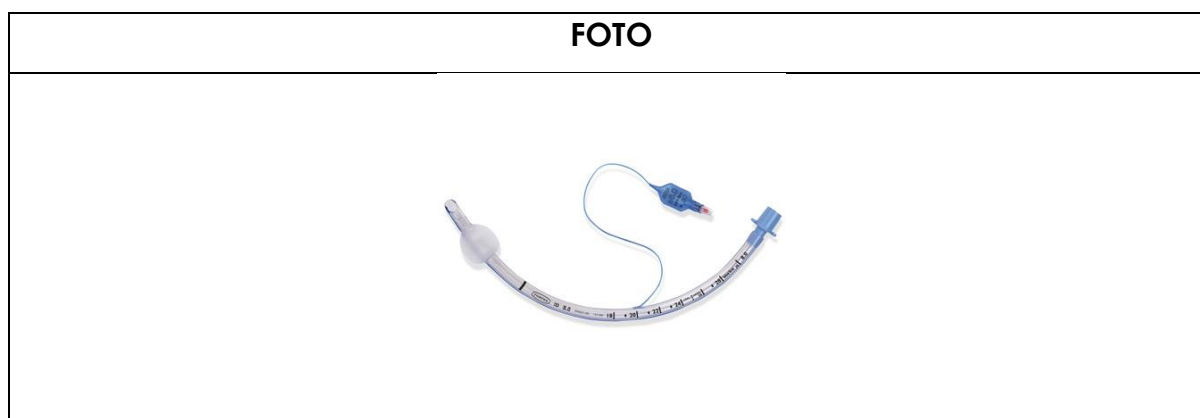
**INSTRUÇÃO DE USO**

Colocar a cabeça do paciente em posição fletida na junção do pescoço com o tórax e estendida na junção da coluna com o crânio;

Ventilar e oxigenar o paciente antes da intubação;

Introduzir o tubo com auxílio do laringoscópio;

Retirar o laringoscópio mantendo o tubo no local.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

\* Produto isento de Látex

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
100.150.050	Sonda Endotraqueal com Balão 5,0
100.150.055	Sonda Endotraqueal com Balão 5,5
100.150.060	Sonda Endotraqueal com Balão 6,0
100.150.065	Sonda Endotraqueal com Balão 6,5
100.150.070	Sonda Endotraqueal com Balão 7,0
100.150.075	Sonda Endotraqueal com Balão 7,5
100.150.080	Sonda Endotraqueal com Balão 8,0
100.150.085	Sonda Endotraqueal com Balão 8,5
100.150.090	Sonda Endotraqueal com Balão 9,0
100.150.095	Sonda Endotraqueal com Balão 9,5

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno. Caixa com 10 unidades.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local seco e limpo, em temperatura máxima de estocagem de 40°C.

### **PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

Posicionar o conector corretamente antes do tubo;

Deve ser utilizado apenas por profissionais devidamente habilitados.

### **Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: [www.cfernandes.com.br](http://www.cfernandes.com.br)

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259