

RELATÓRIO TÉCNICO

Produto : **MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA**

Marca : **MSÓ**

Descrição: Malha Tubular utilizada em aplicações ortopédicas.
Utilização geral em adultos e crianças .
Descartável, não estéril e higiênico.

Dimensões:

Tamanho	COMPRIMENTO(m)	LARGURA(cm)
04x15	15	04
06x15	15	06
08x15	15	08
10x15	15	10
12x15	15	12
15x15	15	15
20x15	15	20
25x15	15	25
30x15	15	30
04x25	25	04
06x25	25	06
08x25	25	08
10x25	25	10
12x25	25	12
15x25	25	15
20x25	25	20
25x25	25	25
30x25	25	30

Composição:

- Tecido de malha 100% Algodão Crú.

Indicação:

Folha 2/2

- Servem para proteção da pele quando da confecção do aparelho gessado, minimizando a ocorrência de irritação e alergia.
- Em todas imobilizações circulares recomenda-se o uso de malha tubular.

Finalidade:

- Proteção e conforto antes da aplicação do gesso.

Instruções de Uso:

O responsável pela imobilização, escolhe a largura adequada de acordo com o local a ser imobilizado, e recobre este local com a malha tubular. O passo a seguir é a colocação do algodão ortopédico e posteriormente o gesso ortopédico.

Validade:

- 60 meses.

Apresentação:

- Em diversas larguras, enroladas sobre si, embaladas individualmente em sacos plásticos.
- São fornecidas na forma não estéril.

