

Classe:DESCARTAVEL FÁBRICA REEMBALAGEM

Gerado em02/07/2020 14:02:58

Modelo

Características

**20002 - ESPÁTULA DE AYRE DE PLÁSTICO 175MM
EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CX/100**

A ESPÁTULA DE AYRE DE PLÁSTICO possui uma extremidade arredondada e outra com uma reentrância que estabelece uma boa relação anatômica e orifícios que facilitam a coleta da amostra.

Composição: Polipropileno

Finalidade: é utilizada para auxílio na coleta do material no exame do Papanicolau.

Modo de usar:

1. Abra a embalagem no momento do uso.
2. Colete a amostra com movimento giratório.
3. Transfira a amostra para a lâmina.
4. Proceder a sua utilização de acordo com o protocolo médico.
5. Após a utilização do produto, descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Precauções, Cuidados e Advertências

Não utilizar o produto caso esteja fora do prazo de validade.

Utilizar luvas de procedimento durante a manipulação do produto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar o produto à temperatura ambiente em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo do sol.

DESCARTE

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO.

DESCARTAR APÓS O USO.

Registro(s) MS: 10379860132



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479