


**FICHA TÉCNICA**
**Esteem™ Plus Moldável Bolsa de Estomia de Uma Peça Drenável**

<b>Nome Genérico</b>	Bolsa de uma peça drenável para colostomia / ileostomia com resina moldável
<b>Nome Comercial</b>	Esteem™ Plus Moldável Bolsa de Estomia de Uma Peça Drenável
<b>Imagem</b>	
<b>Descrição</b>	<p>As bolsas Esteem™ Plus são dispositivos de uma peça para estomia, compostos de uma bolsa coletora e uma placa moldável adesiva protetora de pele que pode ser moldada sem a utilização de tesouras.</p> <p>As bolsas Esteem™ Plus apresentam filtro embutido e painel conforto.</p> <p>Os adesivos de filtro que acompanham a embalagem servem para proteção do filtro quando do contato com água.</p>
<b>Marca</b>	Esteem™+ ConvaTec®
<b>Fabricante</b>	<p>ConvaTec Inc. – Estados Unidos</p> <p>ConvaTec Dominican Republic Inc. – República Dominicana</p>
<b>Composição do Produto</b>	<p><b>Bolsas coletoras:</b> filme de cloreto de polivinilideno (PVDC) e acetato de vinilileno (EVA), as bolsas possuem ainda filtro composto de carvão ativado e laminado de membrana médica embutido na parte anterior superior da bolsa e protegido do contato direto com o efluente por meio de um filme de polietileno.</p> <p><b>Painel de Conforto:</b> tela protetora de polietileno (PE) e politereftalato de etileno (PET).</p> <p><b>Fecho InvisiClose™:</b> sistema de fechamento composto por duas tiras plásticas feitas de poliestireno e duas tiras plásticas serrilhadas feitas de propileno (fecho de intertravamento).</p> <p><b>Disco moldável Durahesive:</b> gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis (metileno[3,5-di-tert-butil-4-hidroxi-hidrocinaurato]) metano, éster de pentaeritriol e óleo mineral</p> <p><b>Placas adesivas Durahesive:</b> gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocolóides absorventes e protetores da pele), poliisobutileno e óleo mineral. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente e o lado adesivo é protegido por um protetor de poliéster e silicone com guia de recorte impresso. Para maior suporte, uma borda adesiva de polietileno não tecido e adesivo acrílico circunda a placa.</p>
<b>Características e Ações do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta bolsa de última geração oferece um painel de conforto suave, janela de fácil visualização e o fechamento InvisiClose™. Seu design flexível proporciona maior conforto e mobilidade ao paciente.</li> <li>• Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada.</li> <li>• As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobre a superfície das bolsas está fixada tela protetora (painel de conforto) que permite a respiração da pele e aumenta o conforto.</li> <li>• Disco moldável trilaminado: Ajusta-se perfeitamente ao formato do estoma proporcionando mais segurança e facilidade na adaptação da bolsa, sem necessidade de guia de medição de estoma e tesoura para recorte. Basta ajustar a placa moldável com os dedos e posicionar ao redor do estoma.</li> <li>• Opção de bolsa transparente: Permite a visualização do estoma e drenagens.</li> <li>• Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: segura e confortável para o paciente.</li> <li>• Filtro de carvão ativado: As bolsas apresentam filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo o estufamento da bolsa.</li> <li>• Fechamento sem clip: sistema Invisiclose™ mais fácil e discreto para o paciente.</li> <li>• Para discrição total as bolsas apresentam “Lock-it-Pocket™”, uma discreta abertura em formato de bolso para ocultar o fecho.</li> </ul>
<b>Recomendações de Uso</b>	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p><b>1.Preparo da pele:</b> Suas mãos e a pele ao redor do estoma devem estar limpas, secas e livres de substâncias gordurosas antes da aplicação.</p> <p><b>2.Preparo da placa protetora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Remova o disco moldável da bolsa.</li> <li>B) Segure a aba marcada com o número “1” e remova a primeira parte do papel protetor do lado moldável expondo a área a ser moldada do disco.</li> <li>C) Para personalizar a abertura do estoma, coloque os seus polegares (e dedos) na borda do orifício inicial e enrole o adesivo para trás até criar uma abertura de tamanho e forma desejados, que atendam ao seu estoma. Não esticar, puxar ou cortar o adesivo para torná-lo maior.</li> <li>D) Para verificar o ajuste, posicione a abertura acima do estoma sem remover a segunda parte do papel protetor. Ajustar caso seja necessário.</li> </ul> <p><b>3.Aplicação do disco moldável:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Segure a aba marcada com o número “2” e remova o papel protetor do lado interno de contato com a pele. Você deve aplicar esse lado do disco moldável na sua pele.</li> <li>B) Aplique o disco moldado na pele ao redor do estoma. Pressione o disco contra a pele ao redor de todo o estoma.</li> <li>C) Caso uma área da pele esteja exposta, mova delicadamente o adesivo moldado em direção ao estoma.</li> <li>D) Segure a aba marcada com o número “3” e remova a segunda parte do papel protetor do lado moldável do disco.</li> </ul> <p><b>4.Aplicação da bolsa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Separe as películas da bolsa para permitir que o ar entre.</li> <li>B) Remova o papel protetor da placa protetora da bolsa.</li> <li>C) Aplique a bolsa no disco moldável e na pele. Pode ser mais fácil visualizar a colocação se a bolsa for dobrada no centro da sua placa protetora. Aplique a parte inferior da placa protetora da bolsa na pele e no disco moldado. Remova a parte superior do papel protetor da placa protetora e desdobre a metade superior na pele, ao redor da parte restante do estoma.</li> <li>D) Passe o dedo ao redor do adesivo da bolsa e segure por 30 segundos para garantir uma boa aderência.</li> </ul> <p>Utilize enquanto for confortável e seguro. A duração do uso pode variar.</p> <p><b>5.Fechamento da bolsa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Dobre o fecho a partir da tira branca na extremidade até que os fechos de intertravamento fiquem sobrepostos. Pressione os fechos de intertravamento por toda a extensão até sentir que se fecharam. Se desejar, vire o bolso ao contrário para ocultar o fecho.</li> </ul>

	<p><b>6.Esvaziamento da bolsa:</b> Abra o fecho da bolsa puxando ambas as extremidades das tiras com os dedos; drene a bolsa.</p> <p><b>7.Informações sobre o filtro:</b> Cubra o filtro com o adesivo fornecido ao tomar banho, nadar, etc. Remova-o após o término da atividade.</p> <p><b>8.Remoção da bolsa:</b> O sistema de peça única deve ser removido completamente, em uma única etapa.</p>						
<b>Cuidados de Conservação</b>	Conservar em local seco.						
<b>Registro Sanitário</b>	Cadastro ANVISA 80523020036						
<b>NCM</b>	3006.91.10						
Diâmetro da Abertura para Estoma	Transparente			Opaca			Unidades por Caixa
	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	
20-30 mm	413515	BR10364	268998	413521	BR10368	269000	10
30-40 mm	413516	BR10365	268999	413522	BR10369	269001	10