

 DILEPÉ IND. COM. MAT. ORTOPÉDICOS LTDA CNPJ: 73.142.960/0001-60 Rua Amoresco, 25 - Burgo Paulista - São Paulo/SP	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
	COLETE JEWET		
	Produto Correlato de Uso Ortopédico		
DENOMINAÇÃO DE PRODUTO	COLETE JEWET		
NOME TÉCNICO	Artigo Para Fisioterapia Motora		
CADASTRO ANVISA Nº	80018119043	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: I - BAIXO RISCO	
REFERÊNCIA/CÓDIGO	DL200	Contém 1 unidade	
FABRICANTE	Dilepé Ind. Com. Mat. Ortopédicos LTDA	CNPJ: 73.142.960/0001-60	AUTORIZAÇÃO (Anvisa): AFE 800.181-1
MARCA	DILEPÉ		
PROCEDÊNCIA	Nacional (Indústria Brasileira)		
CÓDIGO NCM	90211010		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	JOÃO SEIJI IANAGUI		
MODELO	Confeccionado com hastes em duralumínio (possui níveis de regulagem), almofada de espuma nos apoios laterais e frontais, apoio posterior removível e fixação através de fechos de contato.		
IMAGEM GRÁFICA			
TAMANHOS	P/M/G		
COR PREDOMINANTE	BRANCO		
COMPOSIÇÃO	4% FERRO; 4% ESPUMA PU; 4% NYLON; 57% ALUMÍNIO; 7% PVC; 6% POLIÉSTER; 5% EVA; 13% AÇO; 3% POLIAMIDA; 1% ALGODÃO		
EMBALAGEM PRIMÁRIA	saco plástico 0.8 mm		
EMBALAGEM SECUNDÁRIA	NÃO APLICÁVEL		
MODO DE USO	<p>Solte todos os fechos de contato. Posicione os apoios (costa, lateral, tórax e pelve) conforme imagem ilustrativa da embalagem. Transpasse as tiras de fecho de contato pelas fivelas plásticas dando o aperto necessário para a estabilização do colete.</p> <p>Caso haja divergência no posicionamento, deve-se utilizar uma chave de fenda para efetuar as regulagens necessárias. Existem furações para a regulagem dos 4 apoios do colete. É indicado o auxílio de outra pessoa para a colocação do mesmo.</p>		
MODO DE LIMPEZA	Lavagem normal até 30°C; Lavar somente à mão; Não usar alvejante a base de cloro; Não passar. Partes metálicas apenas pano seco.		

DATA DE FABRICAÇÃO/ VALIDADE

Inseridas estas informações na etiqueta de código de barras (fixada na embalagem externa).