

 DILEPÉ IND. COM. MAT. ORTOPÉDICOS LTDA CNPJ: 73.142.960/0001-60 Rua Amoresco, 25 - Burgo Paulista - São Paulo/SP	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
	COLAR CERVICAL RESGATE		
	Produto Correlato de Uso Ortopédico		
DENOMINAÇÃO DE PRODUTO	COLAR CERVICAL RESGATE		
NOME TÉCNICO	Colar Cervical		
CADASTRO ANVISA Nº	80018119051	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: I - BAIXO RISCO	
REFERÊNCIA/CÓDIGO	DL182	Contém 1 unidade	
FABRICANTE	Dilepé Ind. Com. Mat. Ortopédicos LTDA	CNPJ: 73.142.960/0001-60	AUTORIZAÇÃO (Anvisa): AFE 800.181-1
MARCA	DILEPÉ		
PROCEDÊNCIA	Nacional (Indústria Brasileira)		
CÓDIGO NCM	90211010		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	JOÃO SEIJI IANAGUI		
MODELO	CONFECIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE E FECHAMENTO COM FECHO DE CONTATO. POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA.		
IMAGEM GRÁFICA			
TAMANHOS	P/M/G		
COR PREDOMINANTE	BRANCO		
COMPOSIÇÃO	55% POLIETILENO; 40% EVA; 5% POLIAMIDA		
EMBALAGEM PRIMÁRIA	saco plástico 0.8 mm		
EMBALAGEM SECUNDÁRIA	NÃO APLICÁVEL		
MODO DE USO	Separe as 3 peças: Uma em formato de V (p1), uma em formato de U (p2) e uma com 3 orifícios (p3). Posicione a p1 na p2 através dos botões (o desenho do U deve ficar de cabeça para baixo, pois será o apoio do queixo). Posicione a p3 na p1 através dos fechos de contato (quando encaixada a p3 a mesma deve ter seus dois orifícios para cima e o outro orifício central para baixo). Regule os fechos de contato conforme orientação médica. É recomendado o posicionamento do colar com o auxílio de outra pessoa.		

MODO DE LIMPEZA	Lavagem normal até 30°C; Lavar somente à mão; Não usar alvejante a base de cloro; Não secar em tambor rotativo; Não lavar à seco; Não passar.
DATA DE FABRICAÇÃO/ VALIDADE	Inseridas estas informações na etiqueta de código de barras (fixada na embalagem externa).