
 DILEPÉ IND. COM. MAT. ORTOPÉDICOS LTDA CNPJ: 73.142.960/0001-60 Rua Amoresco, 25 - Burgo Paulista - São Paulo/SP	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
	TIPÓIA SIMPLES - DUPLA		
	Produto Correlato de Uso Ortopédico		
DENOMINAÇÃO DE PRODUTO	TIPÓIA SIMPLES		
NOME TÉCNICO	Tipóia		
CADASTRO ANVISA Nº	80018110032	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: I - BAIXO RISCO	
REFERÊNCIA/CÓDIGO	DL620	Contém 1 unidade	
FABRICANTE	Dilepé Ind. Com. Mat. Ortopédicos LTDA	CNPJ: 73.142.960/0001-60	AUTORIZAÇÃO (Anvisa): AFE 800.181-1
MARCA	DILEPÉ		
PROCEDÊNCIA	Nacional (Indústria Brasileira)		
CÓDIGO NCM	90211010		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	JOÃO SEIJI IANAGUI		
MODELO	Confeccionada em lona simples com fecho plástico para manipulação com uma só mão e fixação com fecho de contato.		
IMAGEM GRÁFICA			
TAMANHOS	P/M/G/GG		
COR PREDOMINANTE	BEGE		
COMPOSIÇÃO	47% algodão; 32% polipropileno; 8% poliamida; 12% nylon; 1% poliéster		
EMBALAGEM PRIMÁRIA	plástico 0.6 mm		
EMBALAGEM SECUNDÁRIA	papel cartão 400 gr		
MODO DE USO	Solte todos os fechos de contato. Encaixe o braço e o antebraço de modo que o cotovelo encoste na parte traseira da tipóia. Fixe os fechos de contato. Passe a tira de sustentação pelas costas, acomodando a parte atoalhada ao ombro e fixe o fecho plástico na região frontal para fechar. Após a colocação ajuste a tira do ombro de maneira que o braço e o antebraço formem um ângulo igual ou menor que 90°.		
MODO DE LIMPEZA	Lavagem normal até 30°C; Lavar somente à mão; Não usar alvejante a base de cloro; Não secar em tambor rotativo; Não lavar à seco; Não passar.		
DATA DE FABRICAÇÃO/ VALIDADE	Inseridas estas informações na etiqueta de código de barras (fixada na embalagem externa).		