

Catálogo de Modelos

Classe: BACTERIOLOGIA

Gerado em 02/07/2020 14:02:29

Modelo

Características

25002 - ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL CX/100

O produto ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL é utilizado para coletar amostras da Cérvix para exames do esfregaço de Papanicolaou. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O produto ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL é formado por uma haste com 180 mm de comprimento e na ponta da haste uma escova com 20 mm de comprimento.

INSTRUÇÕES DE USO

A coleta da amostra deve ser efetuada por profissionais qualificados e adequadamente treinados. Portanto, as instruções que seguem devem ser consideradas como uma memória descritiva endereçada ao profissional já experiente.

- " Abra a vagina com o espelho vaginal.
 - " Abra a embalagem no momento da coleta.
 - " Insira a escova cervical até que entre em contato com a Cérvix.
 - " Gire o cabo para coletar a amostra.
 - " Retire a Escova cervical.
 - " Transfira a amostra da escova para uma lâmina girando o cabo.
 - " Proceder a sua utilização de acordo com o protocolo do laboratório.
 - " Após a utilização da escova cervical, descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- Manusear os materiais destinados aos testes microbiológicos devidamente paramentado e no local especificado para os mesmos.

PRECAUÇÕES

- " Não utilizar o produto caso a embalagem esteja aberta ou violada.
- " Não utilizar o produto caso esteja fora do prazo de validade.
- " Produto de uso único. Destruir após o uso.
- " Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados

TRANSPORTE E ESTOCAGEM

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado. Armazenar o produto em local com temperatura +5°C a +35°C.

DESCARTE

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Esterilizado por óxido de etileno.

Registro(s) MS: 10379860149,10379860185,10379860193,10379860236



RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB N° 1.03798.6

Catálogo de Modelos



Classe: BACTERIOLOGIA

Gerado em 02/07/2020 14:02:29

Pág. 2/2

Modelo

Características