

Catálogo de Modelos

Classe:DESCARTAVEL

Gerado em 02/07/2020 15:35:11

Pág. 1/1

Modelo

Características

FC100 - FIXADOR CELULAR 100ML

Fixador celular é utilizado para fixação de esfregaços celulares em lâminas de vidro a partir da coleta de materiais da parede vaginal, colo do útero, ectocérvice, endocérvice, fundo de saco e/ou outras áreas do organismo.

De aplicação simples, atende as especificações técnicas dos profissionais da área.

Modo de usar:

Aplicar sobre o esfregaço logo após a coleta.

Manter o frasco em posição vertical, aproximadamente 10cm da lâmina, pressionar por três vezes a válvula atomizadora tipo spray, cobrindo a lâmina com uma delicada camada de solução fixadora.

Armazenar a Lâmina no porta lâminas para que possa ser transportada ao laboratório com segurança, antes de serem encaminhadas para um laboratório especializado em citopatologia para análise.

Aplicar sobre o esfregaço logo após a coleta.

Composição: Álcool etílico, Polietileno Glicol, Água Purificada e Propelente Butano.

** Borrifado corretamente sobre o esfregaço e após secagem, mantido ao abrigo da luz o esfregaço mantém as características celulares por um período mínimo de 3 meses.

Volume: 100ml

Precauções:

VIDE FRASCO.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Registro(s) MS: Produto não considerado correlato



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479