



## Coletor Rígido para Resíduos Perfurocortantes Descarpack

### DESCRIÇÃO

O **Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack** é confeccionado em plástico rígido o que lhe confere segurança e alta resistência, isolando os materiais perfurocortantes descartados, evitando a contaminação dos usuários.

Disponível nos modelos de 1L, 7L e 13L, desenvolvido em formato quadrado ou retangular na cor amarela, translúcido para facilitar a visualização do conteúdo interno, possui tampa que evita vazamentos. Sua abertura é feita através de uma tampa, o que possibilita a abertura e o fechamento do coletor apenas no momento de descarte dos materiais perfurocortantes.

Os coletores contam com pegaduras para transporte e os modelos de 7L e 13L contam tampa rosqueável, já o modelo de 1L conta com uma tampa fixa.

O **Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack** possui etiqueta plástica com a simbologia de resíduo infectante para melhor identificação.

### PRODUTO



**Coletores Rígidos para Materiais Perfurocortantes Descarpack 1,0L, 7,0L e 13,0L**

**Cadastro Anvisa:** 10330660197

**Fabricante:** Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.

**Coletor Rígido para Material Perfurocortante Descarpack 7,0L**

**Cadastro Anvisa:** 10330669028

**Fabricante:** Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.

## INDICAÇÃO DE USO

O **Coletor Rígido para Resíduos Perfurocortantes Descarpack** foi desenvolvido para atender as precauções de segurança necessárias em ambientes onde são gerados resíduos perfurocortantes infectados atendendo as recomendações da RDC 306/2004 e CONAMA 358. Proporcionando um descarte adequado a estes resíduos, evitando acidentes e contaminações.

## MODELOS DISPONÍVEIS

O **Coletor Rígido para Resíduos Perfurocortantes Descarpack** é disponível nos modelos: 1,0L, 7,0L e 13L.

## COMPOSIÇÃO

- ❖ **Coletor:** Polietileno;
- ❖ **Tampa:** Polietileno;
- ❖ **Rótulo:** Plástico;

## VALIDADE

Indeterminada.

## CAPACIDADE

Capacidade Total	Capacidade Útil
1,0L	0,65L
7,0L	5,3L
13,0L	10,0L

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Qtde. Caixa Master
Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack 1,0L	0146401	90 unidades
Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack 7,0L	0146201	24 unidades

## INSTRUÇÕES DE USO

### Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack 1,0L

- ❖ Todo material que perfura ou corta deve ser descartado no coletor;
- ❖ Nunca jogue os materiais perfurocortantes no lixo comum;
- ❖ Nunca exceda o limite de enchimento do coletor;
- ❖ Utilize o desconectador para descartar a agulha no coletor, introduzindo a agulha no orifício até que ele fique presa e gire para desconectar;
- ❖ Nos intervalos mais prolongados de uso, feche a tampa sem travar; Para descarte do coletor feche e trave a tampa e transporte pelas pegaduras, afastado do corpo;

### Coletores Rígidos para Materiais Perfurocortantes Descarpack 7,0L e 13,0L

- ❖ Todo material que perfura ou corta deve ser descartado no coletor;
- ❖ Nunca jogue os materiais perfurocortantes no lixo comum;
- ❖ Nunca exceda o limite de enchimento do coletor;
- ❖ Utilize o desconectador para descartar a agulha no coletor, introduzindo a agulha no orifício até que ele fique presa e gire para desconectar;
- ❖ Não desconecte, reencepe ou entorte as agulhas usadas;
- ❖ Para descarte do coletor feche e trave a tampa e transporte pelas pegaduras, afastado do corpo;

## ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES


- ❖ A tampa deve ser fechada de maneira correta para que não haja perigo de o coletor abrir e expor o material contaminado;
- ❖ A ausência de qualquer parte deste produto pode comprometer sua eficácia;
- ❖ Produto não estéril;
- ❖ Não encha o coletor acima do nível indicado;
- ❖ Feche a tampa com segurança quando a linha de preenchimento for alcançada;
- ❖ Produto médico-hospitalar de uso único

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. Para que o produto permaneça íntegro é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

## ANEXO

### Instruções de uso de como fechar o produto Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack 7,0L e 13L

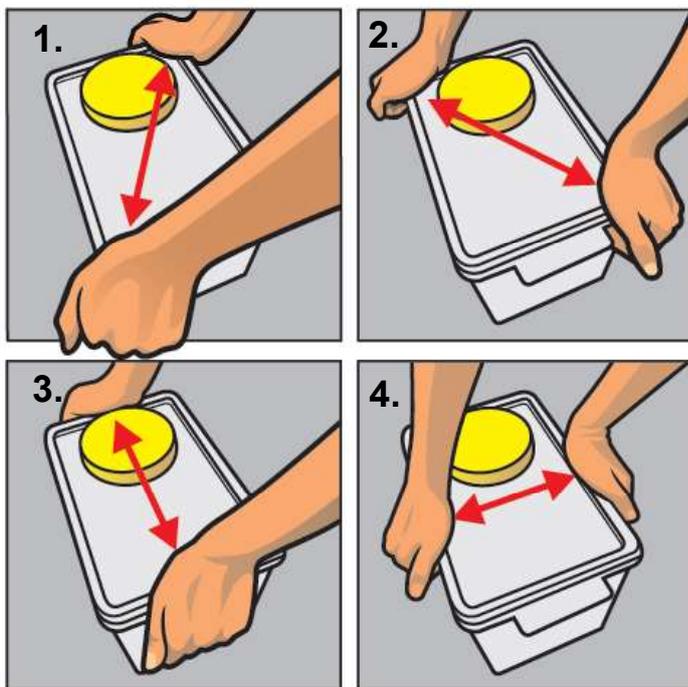

1. Coloque a tampa sobre o coletor;
2. Pressione fortemente com as duas mãos na diagonal da tampa até ouvir um clipe;
3. Repita o procedimento na outra diagonal;
4. Pressione as 4 laterais, para finalização do encaixe;
5. Pronto! Seu coletor está pronto para uso;

