

FICHA TÉCNICA
Active Life® Bolsa de Urostomia de Uma Peça Convexa

Nome Genérico	Bolsa de urostomia de uma peça drenável, convexa e pré-cortada.
Nome Comercial	Active Life® Bolsa de Urostomia de Uma Peça Convexa
Imagem	
Descrição	<p>As bolsas Active Life® são dispositivos de uma peça para urostomia compostas por uma barreira protetora de pele Durahesive® convexa e uma bolsa coletora drenável.</p> <p>As bolsas coletoras armazenam os efluentes dos estomas e a barreira protetora da pele fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege a pele do contato com os efluentes.</p>
Marca	Active Life® ConvaTec® Durahesive®
Fabricante	<p>ConvaTec Limited – Reino Unido</p> <p>ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana</p>
Composição do Produto	<p>Bolsa Coletora: Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores, e acetato de vinilileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos.</p> <p>Barreira Protetora da Pele Durahesive®: As placas adesivas convexas são moldadas utilizando-se a massa Durahesive, composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno, tetrakis metano, éster de pentaeritriol e óleo mineral. A base convexa é moldada em um disco convexo de acetato de vinilileno.</p> <p>Torneira de Drenagem: Acetato vinilileno.</p> <p>Borda microporosa adesiva flexível: é composta por uma tela de poliéster com adesivo acrílico de grau médico.</p>
Características e Ações do Produto	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção da pele: substâncias hidrocolóides absorvem a umidade e têm a capacidade de regenerar a pele irritada. • São compostas de válvula anti-refluxo que permite que a urina flua diretamente dentro da bolsa e não retorne, evitando o contato com o estoma. • Bolsa transparente: Permite a visualização do estoma, efluente e drenagens. • Bolsa elaborada em plástico resistente a vazamentos: segura e confortável para o paciente. Não é necessário retirar a bolsa durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina. • A borda microporosa adesiva flexível elimina a necessidade de utilizar adesivos adicionais. • Esvaziamento da bolsa fácil e rápido através da torneira de drenagem dobrável.
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</p> <p>A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar a pele periestoma com água e sabão e secar completamente, assegurando-se de que ela esteja livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possam prejudicar a aderência da bolsa. • Se a superfície da pele periestoma estiver irregular ou enrugada, preencher as depressões ou pregas da pele com pasta Stomahesive. O uso rotineiro da pasta protetora Stomahesive ao redor da base do estoma aumenta o tempo de uso da bolsa. <p>PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA BOLSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e segura e não houver sinais de irritação. • Escolher uma bolsa cujo orifício pré-cortado seja da mesma medida do diâmetro máximo do estoma. Não aumentar o orifício pré-cortado. • Se for necessária a utilização do cinto, adaptá-lo às presilhas da bolsa e ajustá-lo de maneira confortável. • Antes de remover a bolsa deve ser realizada drenagem total do efluente. 																				
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10° e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.																				
Registro Sanitário	Cadastro ANVISA:80523029009																				
NCM	3006.91.10																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código ICC</th> <th>Brasíndice</th> <th>SIMPRO</th> <th>Diâmetro</th> <th>Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175793</td> <td>1197926</td> <td>265721</td> <td>22 mm</td> <td>5 bolsas</td> </tr> <tr> <td>175794</td> <td>1197927</td> <td>265722</td> <td>25 mm</td> <td>5 bolsas</td> </tr> <tr> <td>175795</td> <td>1197928</td> <td>265723</td> <td>28 mm</td> <td>5 bolsas</td> </tr> </tbody> </table>	Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro	Unidades por Caixa	175793	1197926	265721	22 mm	5 bolsas	175794	1197927	265722	25 mm	5 bolsas	175795	1197928	265723	28 mm	5 bolsas
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Diâmetro	Unidades por Caixa																	
175793	1197926	265721	22 mm	5 bolsas																	
175794	1197927	265722	25 mm	5 bolsas																	
175795	1197928	265723	28 mm	5 bolsas																	