

# DESCRIPTIVO - TOALHAS UMEDECIDAS BIO HIGIENIC

## BIO HIGIENIC

Toalhas Umedecidas para Higiene Pessoal

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**NOME TÉCNICO:** TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENE PESSOAL (BANHO DE LEITO) BIO HIGIENIC

**NOME COMERCIAL:** BIO HIGIENIC - TOALHAS UMEDECIDAS COM DIMETICONA (AZUL)

## TOALHAS UMEDECIDAS BIO HIGIENIC - DIMETICONA

ITEM	PACOTES POR CAIXA	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO DE BARRAS
BIO HIGIENIC TOALHA UMEDECIDA DIMET (AZUL) 8UN - STANDARD	50 Pacotes	10101170220050	7898655870221
BIO HIGIENIC TOALHA UMEDECIDA DIMET (AZUL) 8UN - PREMIUM	30 Pacotes	10101170110030	7898655870115

**Nº do Processo na ANVISA:** 25351.722694/2018-18

**Códigos SIMPRO:** 0319170 (Standard) e 0319169 (Premium)



**CADA PACOTE  
CONTÉM 8 UNIDADES  
(20cm X 19cm)  
Validade: 24 meses**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

**TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENE PESSOAL (Banho de Leito)**, confeccionada em falso tecido com gramatura de 60g/m<sup>2</sup> (Standard) ou 120g/m<sup>2</sup> (Premium), resistente e flexível, com 8 unidades por embalagem, medindo 20cm x 19cm cada toalha. Composta de Aqua, Propylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Lactic Acid, Decyl Glucoside, Phenoxyetanol, PEG-12 Dimethicone. Embalagem com instruções de uso, composição, advertências, dados do fabricante e nº processo ANVISA, testadas ginecologicamente e dermatologicamente, sem fragrância, sem álcool e hipoalergênica.

## INSTRUÇÃO DE USO:

As Toalhas Umedecidas Bio Higienic podem ser usadas em temperatura ambiente ou serem aquecidas em microondas para maior conforto. Caso sejam aquecidas em microondas, aquecer o pacote por 15 a 30 segundos em potência média.

Utilize cada compressa para uma parte do corpo conforme quadro abaixo:

- |                                  |                                   |                                |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1. Face, pescoço e peito</b>  | <b>3. Braço e axila esquerdos</b> | <b>5. Perna e pé direitos</b>  | <b>7. Costas</b>  |
| <b>2. Braço e axila direitos</b> | <b>4. Períneo</b>                 | <b>6. Perna e pé esquerdos</b> | <b>8. Nádegas</b> |

## ADVERTÊNCIAS:

Uso externo. Produto de uso único. Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico. Não ingerir. Não utilize o produto se o lacre estiver violado. Conservar à temperatura ambiente. Armazenar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar. Mantenha a embalagem fechada quando não estiver usando. Manter fora do alcance de crianças.

## COMPOSIÇÃO:

INGREDIENTES	FUNÇÃO
AQUA	VEÍCULO
PROPYLENE GLYCOL	UMECTANTE
PHENOXYETHANOL	CONSERVANTE
DECYL GLUCOSIDE	EMULSIFICANTE
PEG-12 DIMETHICONE	CONDICIONANTE
LACTIC ACID	CONDICIONANTE
TETRASODIUM EDTA	SEQUESTRANTE

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Toalhas com 60 e 120 g/m<sup>2</sup> de gramatura, confeccionadas em falso tecido (poliéster e viscose);
- Embalagem com 08 unidades;
- Uso único para um banho completo. Uma toalha para cada região do corpo;
- Tamanho da toalha 20cm x 19cm;
- As toalhas são dobradas individualmente;
- Embalagem com etiqueta auto-adesiva para abertura e fechamento;
- Não contém álcool etílico na composição;
- Livre de parabenos e fragrância;
- Hipoalergênico;
- Testado Dermatologicamente e Ginecologicamente;
- São produzidos com água desmineralizada;
- Podem ser utilizadas à temperatura ambiente ou aquecidas em microondas por 15 a 30 segundos.
- Regularizado no Ministério da Saúde (Anvisa);
- Realizado rígido Controle de Qualidade de processo e produto acabado em todos os lotes produzidos.