

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

<b>Nome Comercial:</b> PureWick®	
<b>Apresentações/Códigos e Dimensões/ Volumes</b> Código: PWF030E / Caixa com 30 unidades/ Dimensões: 10" x 1.5"	
<b>Acessórios</b> (se aplicável) N/A	
<b>Indicação de Uso/Finalidade</b> O PUREWICK Cateter Externo Feminino para Drenagem de Urina destina-se à gestão não invasiva do débito urinário em pacientes do sexo feminino.	
<b>Descrição do Produto</b> Caterter Externo Feminino, destinado a gestão não invasiva do débito urinário, não estéril, de uso único. Proibido reprocessamento.	
<b>Composição</b> Confeccionado em silicone na sua concha externa, tubo de conexão no vácuo em PVC isento de DHEP, área de absorção e drenagem da urina composta de elastano e fibra de poliéster tipo Denier, hipoalergênico, isento de látex	
<b>Produto Estéril</b> ( ) Sim (X) Não	<b>Método de esterilização</b> (Se não estéril, informar métodos de esterilização aplicáveis) <b>Não esterilizar</b>
<b>Prazo de Validade</b> 2 anos	
<b>Fabricante Recomenda o Uso Único</b> ( X )Sim ( ) Não	<b>Produto de Reprocessamento Proibido</b> (X) Sim ( ) Não
<b>Condições de Armazenamento, Transporte e Manipulação</b> Manter afastado da luz solar. Manter seco. Não utilizar caso a embalagem esteja previamente aberta ou danificada.	
<b>Advertências</b> Não use o cateter externo PUREWICK com comadre ou qualquer material que não permita fluxo de ar suficiente. Para evitar possíveis ferimentos na pele, nunca empurrar ou puxar o Cateter Externo PUREWICK contra a pele durante a colocação ou remoção. Nunca inserir o Cateter Externo PUREWICK na vagina, canal anal ou outras cavidades do corpo. Interromper o uso se ocorrer uma reação alérgica.	
<b>Precauções</b> Não recomendado para pacientes que são: - Agitados, combativos ou não cooperativos e que podem remover o cateter externo PUREWICK. - Tem episódios frequentes de incontinência intestinal sem um sistema de gestão fecal em vigor. - Irritação da pele ou lesão no local. - Menstruação moderada/ pesada e não podem usar um tampão (absorvente interno). Não use creme de barreira no períneo ao usar o cateter externo PUREWICK. Creme de barreira pode impedir a sucção. Prosseguir com cuidado em pacientes submetidos a cirurgia recente do trato urogenital externo. Sempre avalie a pele quanto a comprometimento, e realize cuidados perineais antes de colocar um novo cateter externo PUREWICK. Mantenha a sucção até que o cateter externo PUREWICK seja totalmente removido do paciente, para evitar refluxo de urina. Este produto não é feito com látex de borracha natural.	

Somente para uso externo.

**Contraindicações**

Pacientes com retenção urinária.

**Efeitos Adversos**

N/A

**Dados do Fabricante**

C.R. Bard Inc.

8195 Industrial Blvd. - Covington, GA 30014 - EUA

**Feito na Malásia**

**Dados do Detentor de Registro**

Bard Brasil Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Ltda.

Rua Alexandre Dumas, 2100 – Cj 101 e 102 , CEP: 04717-004– São Paulo / SP - Brasil

Tel. / Fax: (11) 5180-0200

CNPJ: 10.818.693/0001-88

**Número de Registro (ANVISA)**

ANVISA nº: 80689090159

**Vencimento do Registro (ANVISA)**

Vigente