



Coletor Rígido para Resíduos Perfurocortantes Descarpack

DESCRIÇÃO

O **Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack** é confeccionado em plástico rígido o que lhe confere segurança e alta resistência, isolando os materiais perfurocortantes descartados, evitando a contaminação dos usuários.

Disponível nos modelos de 1L, 7L e 13L, desenvolvido em formato quadrado ou retangular na cor amarela, translúcido para facilitar a visualização do conteúdo interno, possui tampa que evita vazamentos. Sua abertura é feita através de uma tampa, o que possibilita a abertura e o fechamento do coletor apenas no momento de descarte dos materiais perfurocortantes.

Os coletores contam com pegaduras para transporte e os modelos de 7L e 13L contam tampa rosqueável, já o modelo de 1L conta com uma tampa fixa.

O **Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack** possui etiqueta plástica com a simbologia de resíduo infectante para melhor identificação.

PRODUTO



Coletores Rígidos para Materiais Perfurocortantes Descarpack 1,0L, 7,0L e 13,0L

Cadastro Anvisa: 10330660197

Fabricante: Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.

Coletor Rígido para Material Perfurocortante Descarpack 7,0L

Cadastro Anvisa: 10330669028

Fabricante: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.

INDICAÇÃO DE USO

O **Coletor Rígido para Resíduos Perfurocortantes Descarpack** foi desenvolvido para atender as precauções de segurança necessárias em ambientes onde são gerados resíduos perfurocortantes infectados atendendo as recomendações da RDC 306/2004 e CONAMA 358. Proporcionando um descarte adequado a estes resíduos, evitando acidentes e contaminações.

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Coletor Rígido para Resíduos Perfurocortantes Descarpack** é disponível nos modelos: 1,0L, 7,0L e 13L.

COMPOSIÇÃO

- ❖ **Coletor:** Polietileno;
- ❖ **Tampa:** Polietileno;
- ❖ **Rótulo:** Plástico;

VALIDADE

Indeterminada.

CAPACIDADE

Capacidade Total	Capacidade Útil	
1,0L	0,65L	
7,0L	5,3L	
13,0L	10,0L	=

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Qtde. Caixa Master
Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack 1,0L	0146401	90 unidades
Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack 7,0L	0146201	24 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack 1,0L

- ❖ Todo material que perfura ou corta deve ser descartado no coletor;
- ❖ Nunca jogue os materiais perfurocortantes no lixo comum;
- ❖ Nunca exceda o limite de enchimento do coletor;
- ❖ Utilize o desconectador para descartar a agulha no coletor, introduzindo a agulha no orifício até que ele fique presa e gire para desconectar;
- ❖ Nos intervalos mais prolongados de uso, feche a tampa sem travar; Para descarte do coletor feche e trave a tampa e transporte pelas pegaduras, afastado do corpo;

Coletores Rígidos para Materiais Perfurocortantes Descarpack 7,0L e 13,0L

- ❖ Todo material que perfura ou corta deve ser descartado no coletor;
- ❖ Nunca jogue os materiais perfurocortantes no lixo comum;
- ❖ Nunca exceda o limite de enchimento do coletor;
- ❖ Utilize o desconectador para descartar a agulha no coletor, introduzindo a agulha no orifício até que ele fique presa e gire para desconectar;
- ❖ Não desconecte, reencepe ou entorte as agulhas usadas;
- ❖ Para descarte do coletor feche e trave a tampa e transporte pelas pegaduras, afastado do corpo;

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES


- ❖ A tampa deve ser fechada de maneira correta para que não haja perigo de o coletor abrir e expor o material contaminado;
- ❖ A ausência de qualquer parte deste produto pode comprometer sua eficácia;
- ❖ Produto não estéril;
- ❖ Não encha o coletor acima do nível indicado;
- ❖ Feche a tampa com segurança quando a linha de preenchimento for alcançada;
- ❖ Produto médico-hospitalar de uso único

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. Para que o produto permaneça íntegro é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

ANEXO

Instruções de uso de como fechar o produto Coletor Rígido para Materiais Perfurocortantes Descarpack 7,0L e 13L

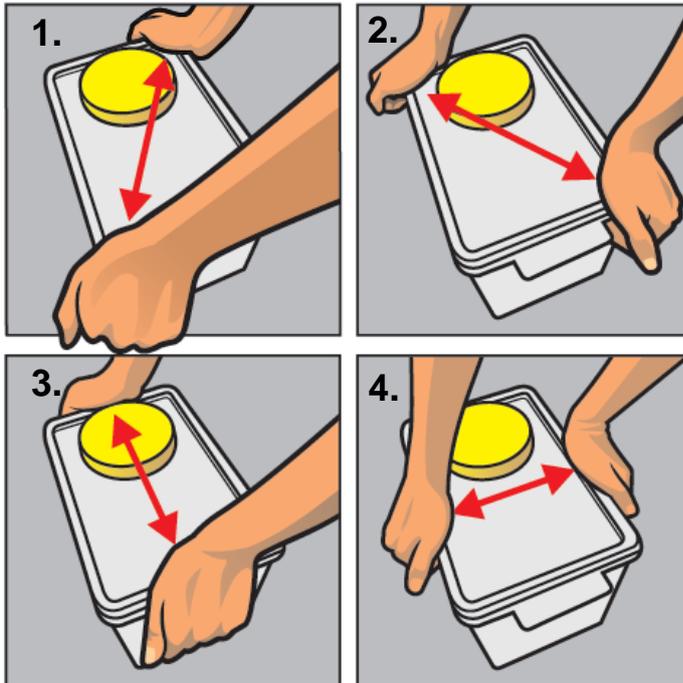

1. Coloque a tampa sobre o coletor;
2. Pressione fortemente com as duas mãos na diagonal da tampa até ouvir um clipe;
3. Repita o procedimento na outra diagonal;
4. Pressione as 4 laterais, para finalização do encaixe;
5. Pronto! Seu coletor está pronto para uso;

