

VIC PERACÉTICO 0,2% - Pronto Uso

Código: FT 049

Revisão: 02

Emissão: Maio/2020

DESCRIÇÃO

O VIC PERACÉTICO 0,2% - Pronto uso é um desinfetante de alto nível, que tem como princípio ativo o ácido peracético. De ação rápida e eficiente, é um produto exclusivamente de uso profissional. Possui eficácia comprovada contra: *Mycobacterium massiliense*, Atividade Tuberculocida contra *Mycobacterium bovis* e *Mycobacterium smegmatis*, Atividade Fungicida contra *Candida albicans* e *Tricophyton mentagrophytes* e Atividade Esporocida: *Bacillus subtilis* e *Clostridium sporogenes*.

INDICAÇÕES

O VIC PERACÉTICO 0,2% - Pronto uso é indicado para desinfecção de artigos semicríticos como: equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex.

RESTRIÇÕES DE USO

Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos.

ADVERTÊNCIAS

Não ingerir. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Não inale vapores/aerossóis. Use proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Evite inalação ou aspiração.

O produto em sua embalagem original não é compatível com álcalis, ácidos, tecidos, papeis, borrachas naturais e sintéticas. Para utilização em metais adicionar o **VIC INIBIDOR** para proteger a superfície.

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COMA PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC PERACÉTICO 0,2% - Pronto Uso

Código: FT 049

Revisão: 02

Emissão: Maio/2020

a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para o local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA, disque-intoxicação 0800 722 6001 pode ser informado. Tratamento específico. Contém Ácido Peracético, causa lesão ocular grave. Caso necessário leve a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

INSTRUÇÕES DE USO

Lavar, enxaguar e secar os artigos semicríticos a serem tratados. Adicionar ao Vic Peracético 0,2% - Pronto uso, o Vic Inibidor – inibidor de corrosão e agitar até completa dissolução. Aguardar de 20 a 30 minutos para proceder o uso.

Para desinfecção de alto nível: Lavar, enxaguar e secar os artigos; imergi-los no produto deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Para desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Trocar a solução a cada 30 dias, ou quando a solução apresentar concentração de ácido peracético abaixo de 0,2% (2000 ppm), utilizando a fita teste – VIC TEST.

APRESENTAÇÕES

5000 ml – Caixa contendo 2 galões.

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

USO INSTITUCIONAL.

“PERIGO! PROVOCA LESÕES OCULARES GRAVES.”

ANTES DE USAR, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC PERACÉTICO 0,2% - Pronto Uso

Código: FT 049

Revisão: 02

Emissão: Maio/2020

“PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. ”

“PROIBIDO A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ”

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-148110.

“CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. ”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA. ”

COMPOSIÇÃO

Componente ativo: Mistura estabilizada de peracético, peróxido de hidrogênio e ácido acético.

Demais componentes: Estabilizante, adjuvante anticorrosivo e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... Incolor.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido homogêneo.

pH:..... 1,95 a 2,25.

Teor:..... 0,18 a 0,22 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC PERACÉTICO 0,2% - Pronto Uso

Código: FT 049

Revisão: 02

Emissão: Maio/2020

DESCARTE

Para descartar o produto, diluir com grande quantidade de água. Em caso de derramamento, diluir com água em abundância ou recolher o material com absorvente inerte, como sílica ou areia.

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

Vic Peracético 0,2% - 1L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8025.001-7.

Vic Peracético 0,2% - 5L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8025.002-5.