

**ENZIMA POWER**

Código: FT 059

Revisão: 00

Emissão: Novembro/2019

**DESCRIÇÃO**

ENZIMA POWER é um detergente enzimático formulado com 4 enzimas (protease, lipase, amilase e carbohidrase) que ligadas a um poderoso tensoativo não-iônico, atuam na limpeza de instrumentais removendo a matéria orgânica e garantindo um processo de esterilização ou desinfecção química mais eficaz. Desenvolvido a base de tensoativo não-iônico biodegradável e de baixa formação de espuma, é indicado para uso em canulados e equipamentos termossensíveis (endoscópios, colonoscópios, broncoscópios, fibroscópios e etc).

**INDICAÇÕES**

ENZIMA POWER é um produto para ser utilizado tanto em limpeza manual quanto em limpeza automatizada. Compatível com artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Produto indicado para uso em ultrassônicas e termodesinfectoras. É um produto altamente concentrado, recomenda-se diluição de 1ml/L, onde 1 litro do produto rende 1.001 litros de solução de detergente enzimático.

**ADVERTÊNCIAS**

Não ingerir.

“Não misturar com outros produtos. ”

“Mantenha o produto em sua embalagem original. ”

Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele.

“Água: pode faltar. Não desperdice. ”

**INSTRUÇÕES DE USO**

Limpeza Manual: Diluir na proporção de 1 ml de ENZIMA POWER para cada 1 litro de água (1:1000). A temperatura da água deve estar entre 40 a 55 °C. Em seguida aplicar o material a ser limpo na solução deixando agir com tempo de contato de 5 minutos. Na sequência enxaguar com água de boa procedência de forma abundante. O processo de limpeza deve ser feito frequentemente conforme a necessidade ou de acordo com protocolos existentes. Para limpeza em temperatura ambiente, faça a mesma diluição, dilua 1 ml de ENZIMA POWER para cada 1 litro de água. O tempo de imersão do

**VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda**

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - [sac@vicpharma.com.br](mailto:sac@vicpharma.com.br)

**ENZIMA POWER**

Código: FT 059

Revisão: 00

Emissão: Novembro/2019

produto com o material deverá ser validado conforme protocolo interno na instituição para garantir maior eficácia do produto.

Limpeza automatizada: No equipamento, diluir o ENZIMA POWER na proporção de 1 mL do produto para cada 1 litro de água. A temperatura da água para ter maior eficácia do produto deve estar de 40 a 55 °C, deixando o produto agir por 5 minutos ou seguindo as instruções do fabricante do equipamento. Na sequência enxaguar com água em abundância.

"UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA".

Recomendações sobre a água utilizada para a diluição:

- ✓ Água potável, desmineralizada ou deionizada;
- ✓ Dureza: 0 a 355 ppm;
- ✓ Condutibilidade: 0,0000050 a 200 µs/cm.

**APRESENTAÇÕES**

5000 ml – Caixa contendo 2 galões.

1000 ml – Caixa contendo 12 frascos.

500 ml – Caixa contendo 12 frascos.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO.

"PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. "

"PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. "

"PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. "

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-148110.

"CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. "

"NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA. "

**VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda**

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - [sac@vicpharma.com.br](mailto:sac@vicpharma.com.br)

**ENZIMA POWER**

Código: FT 059

Revisão: 00

Emissão: Novembro/2019

**PRIMEIROS SOCORROS**

Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX - 0800 722 6001) ou médico levando o rótulo do produto.

**COMPOSIÇÃO**

Álcool Isopropílico, Tensoativo Não-iônico, Protease, Carbohidrase, Lipase, Amilase, Conservante, Estabilizante, Aditivos, Coadjuvantes, Agente de controle de pH e Água.

**PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Cor da solução:..... De amarelo claro a amarelo escuro.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido levemente opaco a límpido.

pH:..... 6,5 a 7,5.

Densidade:..... 1,015 a 1,060 g/ml.

Atividade Amilolítica:..... No mínimo 0,04 UA. ml<sup>-1</sup>.min<sup>-1</sup>.

Atividade Proteolítica:..... No mínimo 0,20 UP. ml<sup>-1</sup>.min<sup>-1</sup>.

**PRAZO DE VALIDADE**

02 anos.

**CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

**VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda**

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - [sac@vicpharma.com.br](mailto:sac@vicpharma.com.br)

**ENZIMA POWER**

Código: FT 059

Revisão: 00

Emissão: Novembro/2019

**DESCARTE**

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

**REGISTRO ANVISA**

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

Enzima Power – 1L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8032.001-5

Enzima Power – 500mL e 5L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8032.002-3