

POWER SEPTIC – PRONTO USO

Código: FT 060

Revisão: 02

Emissão: Maio/2020

DESCRIÇÃO

POWER SEPTIC® PRONTO USO é um desinfetante de nível intermediário, podendo ser utilizado em superfícies fixas e artigos não críticos. Sua fórmula possui quaternário de amônio de 5ª geração, uma mescla de cloreto de didecildimentilamônio com cloreto de octildidecildimetilamônio, combinado com polihexametileno biguanida, o que potencializa a eficácia do produto. Sendo comprovadamente eficaz contra bactérias, fungos e micobactérias. O **POWER SEPTIC® PRONTO USO** é um desinfetante esporicida, eficaz contra *Clostridium difficile* e *Bacillus subtilis*. Possui efeito residual comprovado de 15 dias na superfície contra *Candida albicans* e *Clostridium difficile*. Eficácia comprovada frente à microrganismos resistentes em baixo tempo de contato em presença de matéria orgânica (*Klebsiella pneumoniae* resistente a carbapenemase – KPC). Ainda, possui atividade contra *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, Atividade Fungicida (*Tricophyton mentagrophytes* e *Candida albicans*) e Atividade Tuberculocida (*Mycobacterium smegmatis* e *Mycobacterium bovis BCG*).

INDICAÇÕES

POWER SEPTIC® PRONTO USO é um desinfetante de superfícies fixas e artigos não críticos indicado para uso em hospitais, casas de saúde, consultórios odontológicos, clínicas e estabelecimentos de assistência à saúde. Possui compatibilidade com pisos em geral, mobílias, artigos não críticos, vidros, polietileno, polipropileno, LCD, incubadoras*, bombas de infusão, azulejos, látex e PVC.

*Este produto não é indicado para ser aplicado em presença de neonato na incubadora.

ADVERTÊNCIAS

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

Não misturar com outros produtos.

Manter o produto em sua embalagem original.

Não reutilizar as embalagens.

“Água: pode faltar. Não desperdice.”

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

POWER SEPTIC – PRONTO USO

Código: FT 060

Revisão: 02

Emissão: Maio/2020

INSTRUÇÕES DE USO

Desinfecção de superfícies fixas: Aplique o **POWER SEPTIC® PRONTO USO** primeiramente em um pano ou utilizando um mop e na sequência aplique na superfície a ser limpa e desinfetada. Deixando agir por 1 minuto. Não é necessário enxágue.

Nunca aplique o produto diretamente nos equipamentos eletroeletrônicos, aplique primeiramente com a ajuda de um pano.

Desinfecção de artigos não críticos: Indicado para artigos que entram em contato diretamente com a pele íntegra do paciente. Lave e seque o material e, na sequência, aplique o produto no tempo de contato de 5 minutos. Enxaguar e secar. Os artigos que foram desinfetados devem ser utilizados o mais breve possível.

Desinfecção de nível intermediário (Inaloterapia e Oxigenoterapia): Primeiramente lave e enxágue os artigos e seque-os na sequência. Os artigos deverão ser submergidos no produto na sua forma pura em um tempo de contato mínimo de 25 minutos. Enxágue em abundância os artigos e seque-os. Os artigos que foram desinfetados devem ser utilizados o mais breve possível.

APRESENTAÇÕES

5000 ml – Caixa contendo 2 galões.

1000 ml – Caixa contendo 12 frascos.

750 ml – Caixa contendo 12 frascos gatilho.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.

PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-0148110.

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

POWER SEPTIC – PRONTO USO

Código: FT 060

Revisão: 02

Emissão: Maio/2020

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHJOS E A PELE: Lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, procure orientação médica levando a embalagem ou rótulo do produto. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL: Não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Disque Intoxicação (CEATOX) 0800.722.6001.

COMPOSIÇÃO

Tensoativo não iônico, coadjuvantes, estabilizante, conservante e água.

Princípio ativo: Tensoativo catiônico a 0,65 % e Cloridrato de Polihexametileno biguanida 0,16 %.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... De incolor a levemente amarelado.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido límpido.

pH:..... 6,5 a 7,5.

Densidade:..... 0,980 a 1,050 g/ml.

Teor Quaternário de Amônio:..... 0,53 a 0,72 %.

Teor de Polihexametileno Biguanida:..... 0,14 a 0,19 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

POWER SEPTIC – PRONTO USO

Código: FT 060

Revisão: 02

Emissão: Maio/2020

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

Power Septic Pronto Uso – 750 ml

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8031.002-8.

Power Septic Pronto Uso – 1L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8031.001-1.

Power Septic Pronto Uso – 5L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8031.004-4.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br