

FICHA TÉCNICA
GENTLECATH™ GLIDE CATETER URINÁRIO INTERMITENTE HIDROFÍLICO – FEMININO

Nome Genérico	Cateter Urinário Intermitente Hidrofílico
Nome Comercial	GentleCath™ Glide Cateter Urinário Intermitente Hidrofílico - Feminino
Imagem	 <p>Ponta Retta</p>
Descrição	GentleCath™ Glide é um Cateter Urinário Intermitente Hidrofílico, pronto para o uso, flexível e tubular que é inserido através da uretra para a passagem de fluídos da bexiga.
Marca	GentleCath™ ConvaTec®
Fabricante	Unomedical s.r.o - Eslováquia
Composição do Produto	<p>Cateter: elastômero a base de poliolefina (POBE) Conector: polivinil cloreto (PVC) Manga de proteção: polietileno Sachê: água estéril (esterilização por irradiação beta) Material do sachê: Tereftalato de polietileno (camada externa) / Filme de alumínio / Polietileno (camada interna).</p>
Método de esterilização	Óxido de etileno
Características e Ações do Produto	<p>GentleCath™ é um cateter urológico flexível e tubular que é inserido através da uretra para a passagem de fluídos da bexiga. O material de construção é hidrofílico tornando a superfície escorregadia quando umedecida com água. GentleCath é um cateter de uso transitório e no modelo masculino está disponível com ponta reta ou tiemman.</p>
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações, precauções e observações.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se necessário, antes de utilizar, ligue uma bolsa de urina à extremidade afunilada do cateter. • Não toque na ponta do cateter e use a manga de proteção para minimizar o contato com o resto do cateter. • Aperte o sachê de água no interior do pacote até que se rompa e cubra com água o cateter. Use em um intervalo de 2 minutos. • Durante a inserção e a remoção, deslize o cateter sempre de forma lenta e suave. Nunca force o cateter.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ao remover o cateter, pare se mais urina começar a fluir. Continue novamente quando a urina parar. • O adesivo redondo azul na parte de trás da embalagem pode ser usado para fixá-la à uma superfície durante o uso do cateter. • Se não houver passagem de urina ou se ocorrerem outras complicações (como, por exemplo, dor, dificuldade de inserção ou remoção, sangramento, sinais de infecção do trato urinário ou secreções), consulte um profissional da saúde. • Se o cateter for inserido de forma incorreta, o mesmo deverá ser descartado e não reutilizado. Um novo cateter deve ser selecionado para uso. • Os cateteres usados devem ser sempre descartados. 																										
Cuidados de Conservação	Evitar umidade elevada.																										
Prazo de Validade	3 anos																										
Registro Sanitário	Notificação ANVISA Nº 80523020075																										
Responsável Técnico	Carla Francisca de Araújo CRF-SP nº 31895																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código ICC</th> <th>SIMPRO</th> <th>Ponta / Tamanho</th> <th>Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>421570</td> <td>0313746</td> <td>Cateter Feminino – Ponta Reta - CH8</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>421571</td> <td>0313747</td> <td>Cateter Feminino – Ponta Reta - CH10</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>421572</td> <td>0313748</td> <td>Cateter Feminino – Ponta Reta - CH12</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>421573</td> <td>Indisponível</td> <td>Cateter Feminino – Ponta Reta - CH14</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>421574</td> <td>Indisponível</td> <td>Cateter Feminino – Ponta Reta - CH16</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>				Código ICC	SIMPRO	Ponta / Tamanho	Unidades por Caixa	421570	0313746	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH8	30	421571	0313747	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH10	30	421572	0313748	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH12	30	421573	Indisponível	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH14	30	421574	Indisponível	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH16	30
Código ICC	SIMPRO	Ponta / Tamanho	Unidades por Caixa																								
421570	0313746	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH8	30																								
421571	0313747	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH10	30																								
421572	0313748	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH12	30																								
421573	Indisponível	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH14	30																								
421574	Indisponível	Cateter Feminino – Ponta Reta - CH16	30																								