


**FICHA TÉCNICA**
**GENTLECATH™ GLIDE CATETER URINÁRIO INTERMITENTE HIDROFÍLICO – MASCULINO**

<b>Nome Genérico</b>	Cateter Urinário Intermitente Hidrofílico
<b>Nome Comercial</b>	GentleCath™ Glide Cateter Urinário Intermitente Hidrofílico - Masculino
<b>Imagem</b>	 <p style="text-align: center;">Ponta Tiemann      Ponta Reta</p>
<b>Descrição</b>	GentleCath™ Glide é um Cateter Urinário Intermitente Hidrofílico, pronto para o uso, flexível e tubular que é inserido através da uretra para a passagem de fluídos da bexiga.
<b>Marca</b>	GentleCath™ ConvaTec®
<b>Fabricante</b>	Unomedical s.r.o - Eslováquia
<b>Composição do Produto</b>	<p>Cateter: elastômero a base de poliolefina (POBE)            Conector: polivinil cloreto (PVC)            Manga de proteção: polietileno            Sachê: água estéril (esterilização por irradiação beta)            Material do sachet: Tereftalato de polietileno (camada externa) / Filme de alumínio / Polietileno (camada interna).</p>
<b>Método de esterilização</b>	Óxido de etileno
<b>Características e Ações do Produto</b>	<p>GentleCath™ é um cateter urológico flexível e tubular que é inserido através da uretra para a passagem de fluídos da bexiga.            O material de construção é hidrofílico tornando a superfície escorregadia quando umedecida com água.            GentleCath é um cateter de uso transitório e no modelo masculino está disponível com ponta reta ou tiemman.</p>
<b>Recomendações de Uso</b>	<p><b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações, precauções e observações.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se necessário, antes de utilizar, ligue uma bolsa de urina à extremidade afunilada do cateter.</li> <li>• Não toque na ponta do cateter e use a manga de proteção para minimizar o contato com o resto do cateter.</li> <li>• Aperte o sachê de água no interior do pacote até que se rompa e cubra com água o cateter. Use em um intervalo de 2 minutos.</li> <li>• Durante a inserção e a remoção, deslize o cateter sempre de forma lenta e suave. Nunca force o cateter.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao remover o cateter, pare se mais urina começar a fluir. Continue novamente quando a urina parar.</li> <li>• O adesivo redondo azul na parte de trás da embalagem pode ser usado para fixá-la à uma superfície durante o uso do cateter.</li> <li>• Se não houver passagem de urina ou se ocorrerem outras complicações (como, por exemplo, dor, dificuldade de inserção ou remoção, sangramento, sinais de infecção do trato urinário ou secreções), consulte um profissional da saúde.</li> <li>• Se o cateter for inserido de forma incorreta, o mesmo deverá ser descartado e não reutilizado. Um novo cateter deve ser selecionado para uso.</li> <li>• Os cateteres usados devem ser sempre descartados.</li> </ul>		
<b>Cuidados de Conservação</b>	Evitar umidade elevada.		
<b>Prazo de Validade</b>	3 anos		
<b>Registro Sanitário</b>	Notificação ANVISA Nº 80523020075		
<b>Responsável Técnico</b>	Carla Francisca de Araújo CRF-SP nº 31895		
<b>Código ICC</b>	<b>SIMPRO</b>	<b>Ponta / Tamanho</b>	<b>Unidades por Caixa</b>
421564	Indisponível	Cateter masculino / Ponta reta / CH8	30
421565	0313742	Cateter masculino / Ponta reta / CH10	30
421566	0313743	Cateter masculino / Ponta reta / CH12	30
421567	0313744	Cateter masculino / Ponta reta / CH14	30
421568	0313745	Cateter masculino / Ponta reta / CH16	30
421569	Indisponível	Cateter masculino / Ponta reta / CH18	30
421907	Indisponível	Cateter masculino / Ponta Tiemann / CH8	30
421908	Indisponível	Cateter masculino / Ponta Tiemann / CH10	30
421909	Indisponível	Cateter masculino / Ponta Tiemann / CH12	30
421910	Indisponível	Cateter masculino / Ponta Tiemann / CH14	30
421911	Indisponível	Cateter masculino / Ponta Tiemann / CH16	30
421912	Indisponível	Cateter masculino / Ponta Tiemann / CH18	30