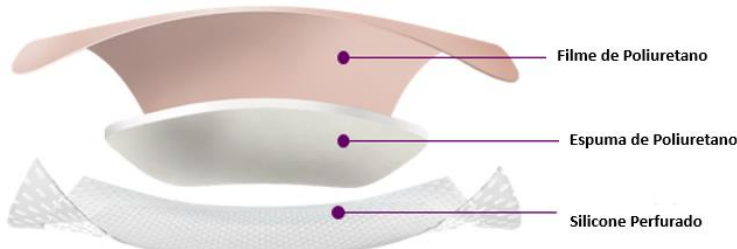


FICHA TÉCNICA
Foam Lite™ Curativo de Espuma com Adesivo de Silicone

Nome Genérico	Curativo de Espuma com Adesivo de Silicone
Nome Comercial	Foam Lite™ Curativo de Espuma com Adesivo de Silicone
Produto/Unidade	
Apresentação Comercial	
Descrição	Foam Lite™ é um curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma camada de silicone perfurada em toda extensão do curativo.
Marca	Foam Lite™ ConvaTec®
Fabricante Legal	ConvaTec Inc.- Estados Unidos
Composição do Produto	Camada externa: Filme de poliuretano e adesivo acrílico Camada de contato com a pele trilaminada: Silicone adesivo, adesivo acrílico, filme de poliuretano e espuma hidrofílica (Poliuretano de baixa densidade).
Método de Esterilização	Óxido de Etileno
Características e Ações do Produto	Leveza e flexibilidade: Foam Lite™ foi projetado especificamente para o tratamento de feridas crônicas e agudas de baixo exsudato. É um curativo de espuma e silicone leve e suave para pele, flexível e adaptável em diversas áreas do corpo. Três camadas sinérgicas: -A camada externa de filme de poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo. -A superfície de contato com a ferida é coberta por uma camada adesiva macia e perfurada de silicone, por toda extensão do curativo até a borda, que promove uma adesividade segura e suave à pele. As perfurações no silicone permitem que o exsudato da ferida seja absorvido na espuma de poliuretano.

	 Recortável: FOAM Lite™ pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e pode ser cortado no tamanho e formato desejados. Caso seja cortado, uma fita adicional deve ser aplicada a fim de garantir a permanência do curativo no local.
Recomendações de Uso	Antes de utilizar o produto, recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções. - Os curativos Foam Lite™ são indicados para o tratamento de uma ampla gama de feridas pouco ou não exsudativas, como as peles fragilizadas. Pode ser incluído num protocolo de cuidados para proteção contra ruptura cutânea. - Além disso, sob supervisão médica, os curativos podem ser usados no tratamento de feridas crônicas e agudas, tais como os exemplos abaixo: ✓ Úlceras de perna, úlceras por pressão e úlceras diabéticas; ✓ Feridas cirúrgicas (ex. feridas pós-operatórias deixadas para cicatrizar por segunda intenção e áreas doadoras); ✓ Queimaduras de espessura parcial superficial (segundo grau); ✓ Feridas traumáticas (ex. abrasões, lacerações, bolhas, pequenos cortes e fissuras). - O tempo máximo de uso recomendado é de até 7 dias.
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada e proteger da luz.
Prazo de Validade	2 anos.
Registro Sanitário	Registro ANVISA Nº 80523020053
Responsável Técnico Registro	Carla Francisca Araújo CRF-SP nº 31895

Código ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Tamanho	Unidades por Caixa
421557	BR10417	768455142262	292317	8 cm X 8 cm	10
421559	BR10418	768455142293	292318	10 cm X 10 cm	10
421561	BR10419	768455142323	292319	15 cm X 15 cm	10
421563	BR10420	768455142354	292320	5,5 cm x 12 cm	10