

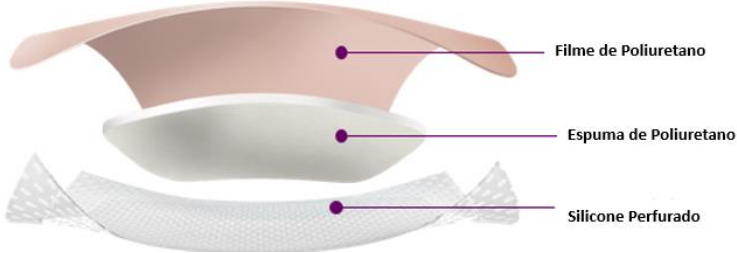


FICHA TÉCNICA
Foam Lite™ Curativo de Espuma com Adesivo de Silicone

Nome Genérico	Curativo de Espuma com Adesivo de Silicone
Nome Comercial	Foam Lite™ Curativo de Espuma com Adesivo de Silicone
Produto/Unidade	
Apresentação Comercial	
Descrição	Foam Lite™ é um curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma camada de silicone perfurada em toda extensão do curativo.
Marca	Foam Lite™ ConvaTec®
Fabricante Legal	ConvaTec Inc.- Estados Unidos
Composição do Produto	Camada externa: Filme de poliuretano e adesivo acrílico Camada de contato com a pele trilaminada: Silicone adesivo, adesivo acrílico, filme de poliuretano e espuma hidrofílica (Poliuretano de baixa densidade).
Método de Esterilização	Óxido de Etileno
Características e Ações do Produto	<p>Leveza e flexibilidade: Foam Lite™ foi projetado especificamente para o tratamento de feridas crônicas e agudas de baixo exsudato. É um curativo de espuma e silicone leve e suave para pele, flexível e adaptável em diversas áreas do corpo.</p> <p>Três camadas sinérgicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -A camada externa de filme de poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo. -A superfície de contato com a ferida é coberta por uma camada adesiva macia e perfurada de silicone, por toda extensão do curativo até a borda, que promove uma adesividade segura e suave à pele. As perfurações no silicone permitem que o exsudato da ferida seja absorvido na espuma de poliuretano.

	 <p>Recortável: FOAM Lite™ pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e pode ser cortado no tamanho e formato desejados. Caso seja cortado, uma fita adicional deve ser aplicada a fim de garantir a permanência do curativo no local.</p>																																		
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto, recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações e precauções.</p> <ul style="list-style-type: none"> Os curativos Foam Lite™ são indicados para o tratamento de uma ampla gama de feridas pouco ou não exsudativas, como as peles fragilizadas. Pode ser incluído num protocolo de cuidados para proteção contra ruptura cutânea. Além disso, sob supervisão médica, os curativos podem ser usados no tratamento de feridas crônicas e agudas, tais como os exemplos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Úlceras de perna, úlceras por pressão e úlceras diabéticas; ✓ Feridas cirúrgicas (ex. feridas pós-operatórias deixadas para cicatrizar por segunda intenção e áreas doadoras); ✓ Queimaduras de espessura parcial superficial (segundo grau); ✓ Feridas traumáticas (ex. abrasões, lacerações, bolhas, pequenos cortes e fissuras). O tempo máximo de uso recomendado é de até 7 dias. 																																		
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada e proteger da luz.																																		
Prazo de Validade	2 anos.																																		
Registro Sanitário	Registro ANVISA Nº 80523020053																																		
Responsável Técnico Registro	Carla Francisca Araújo CRF-SP nº 31895																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código ICC</th> <th>Brasíndice</th> <th>EAN</th> <th>SIMPRO</th> <th>Tamanho</th> <th>Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>421557</td> <td>BR10417</td> <td>768455142262</td> <td>292317</td> <td>8 cm X 8 cm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>421559</td> <td>BR10418</td> <td>768455142293</td> <td>292318</td> <td>10 cm X 10 cm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>421561</td> <td>BR10419</td> <td>768455142323</td> <td>292319</td> <td>15 cm X 15 cm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>421563</td> <td>BR10420</td> <td>768455142354</td> <td>292320</td> <td>5,5 cm x 12 cm</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>						Código ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Tamanho	Unidades por Caixa	421557	BR10417	768455142262	292317	8 cm X 8 cm	10	421559	BR10418	768455142293	292318	10 cm X 10 cm	10	421561	BR10419	768455142323	292319	15 cm X 15 cm	10	421563	BR10420	768455142354	292320	5,5 cm x 12 cm	10
Código ICC	Brasíndice	EAN	SIMPRO	Tamanho	Unidades por Caixa																														
421557	BR10417	768455142262	292317	8 cm X 8 cm	10																														
421559	BR10418	768455142293	292318	10 cm X 10 cm	10																														
421561	BR10419	768455142323	292319	15 cm X 15 cm	10																														
421563	BR10420	768455142354	292320	5,5 cm x 12 cm	10																														