

CANETAS MARCADORAS DE PELE ESTÉREIS – SKIN MARKERS



REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
S-3000 RO	CANETA ESTÉRIL DEMARCADORA DE PELE COM RÉGUA E ETIQUETAS	CAIXA COM 50

DESCRIÇÕES / INTENÇÕES DE USO DO PRODUTO:

Os marcadores de pele ou “CANETAS SKIN MARKERS” são dispositivos médicos em forma de caneta usados por cirurgiões (durante o procedimento cirúrgico) para marcar efetivamente o local de incisão.

As “CANETAS SKIN MARKERS” contêm tinta violeta genciana não tóxica e não tatuadora. Estão disponíveis em modelo estéril para uso na sala de cirurgia.

AVISOS/PRECAUÇÕES:



A tinta do marcador da pele deve ser aplicada somente na pele intacta. A superfície da pele deve estar limpa e seca antes da marcação. A tinta do marcador de pele não irá aderir à pele molhada.



O dispositivo é para uso único do paciente. Não se deve ser submetido à desinfecção e uso subsequente. Isto pode resultar em falha do dispositivo e/ou risco de contaminação.



O dispositivo em si não se destina a fazer quaisquer medições, no entanto, o produto inclui uma régua que se destina a ajudar a orientar o usuário em fazer uma linha reta aproximada, portanto, não fazendo quaisquer medições.



Não utilizar nos olhos!

MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Rua Afonsina, 597, 1º, 2º e 3º andares.

Rudge Ramos - São Bernardo do Campo/SP CEP: 09633-000

Tel: 11 4177-5453



Se a tinta estiver vazando ou secou, descarte o dispositivo e reponha o produto.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Remova a caneta da embalagem individual esterelizada;
- Remova a tampa da caneta;
- Faça a assepsia da área a ser demarcada e espere secar;
- Marque as áreas desejadas com a pele seca de acordo com o protocolo do estabelecimento;
- Deixe as marcações secarem por completo antes do procedimento cirúrgico ;
- Descarte o marcador da pele após o uso em paciente individual.

DESCARTE DO PRODUTO:

Não há instruções especiais para o descarte do dispositivo, descarte em conformidade com as instruções de seu estabelecimento.

APRESENTAÇÃO:

- Corpo da caneta e tampa constituído em PP-polipropileno;
- Ponta fina;
- Comprimento: 15cm;
- Tinta violeta genciana – Fórmula: C25N3H30Cl;
- Esterilização por método de radiação gama;
- Livre de Látex;
- Embalagem: 50 canetas por caixa.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Guardar em local com temperatura e umidade sob condições de temperatura de 15°C a 30°C e com umidade de 40% a 70%.
- Manter o produto longe de calor excessivo.
- Manter em local seco e arejado.

MANIPULAÇÃO:

- Produto deve ser aberto dentro de centro cirúrgico e manipulado em condições estéreis por profissional da saúde devidamente habilitado .

**ADVERTÊNCIA:**

- Material estéril de uso único, descartável.
- Adquirir o produto somente de revendedores autorizados.

PRECAUÇÕES:

- Verifique visualmente se há algum dano no produto antes de usar para assegurar que esteja em perfeitas condições.

FABRICADO POR:

- Batrik Medical – Canadá.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:

- Montserrat Com. Imp. E Exp. LTDA.
Rua Afonsina nº597, 1º, 2º e 3º andares, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo - SP – CEP: 09633-000.