

## FICHA TÉCNICA

**UrgoClean Ag** Curativo com fibras poliabsorventes e matriz TLC-Ag



**Esterilização** Esterilizado por Radiação Ionizante Beta (e-beam)

**Registro Anvisa** 80246910067

**NCM** 30059090

**Descrição** UrgoClean Ag é um curativo estéril, com compressa não tecida de alta absorção e fibras coesivas hidro-desbridantes poliabsorventes (poliacrilato). Esse curativo utiliza termoaglutinantes para ligar as fibras de poliácrlato de amônia que ficam dispostas em paralelo à superfície da ferida em uma estrutura padronizada, que confere ao UrgoClean Ag as propriedades específicas de absorção e aprisionamento de esfacelos residuais da ferida, assim como, a resistência à tração.

A compressa hidro-desbridante é coberta com uma matriz cicatrizante micro-aderente TLC- Ag (Tecnologia Lipido Colóide impregnada com sais de Prata). A TLC-Ag promove uma ação antibacteriana e fácil geleificação, contribuindo assim para a drenagem de esfacelos residuais. Mais do que isso, possibilita uma fácil aplicação e remoção do curativo

**Marca** UrgoClean Ag – Urgo

**Fabricante** Laboratories Urgo - 42 Rue de Longvic, 21300 Chenove – França

**Composição do Produto** UrgoClean Ag é um curativo estéril, com compressa não tecida de alta absorção e fibras coesivas hidro-desbridantes poliabsorventes de poliácrlato de amônia com sais de prata que ficam am dispostas em paralelo à superfície da ferida em uma estrutura padronizada, que confere ao UrgoClean Ag as propriedades específicas de absorção e aprisionamento de esfacelos residuais da ferida, assim como, a resistência à tração.

**Propriedades** Em contato com o exsudato da ferida, a matriz TLC-Ag forma um gel que promove um ambiente úmido favorável à cicatrização de feridas. Ao mesmo tempo, as fibras de poliácrlato poliabsorventes e hidro-desbridantes absorvem o exsudato residual e formam um gel. As fibras hidro-desbridantes ligam-se aos esfacelos residuais, absorvendo-os e drenando-os, auxiliando sua eliminação (desbridamento autolítico).

Essa ligação e drenagem de esfacelos residuais através da estrutura hidrodessbridante do UrgoClean Ag combinada com a Matriz Cicatrizante de prata (TLC- Ag), promove, portanto, a fase de desbridamento em feridas com esfacelos, enquanto ajuda o gerenciamento de sangramentos menores (como o pós desbridamento cirúrgico ou mecânico).

Além disso, os íons de prata (Ag+) conferem atividade antibacteriana ao UrgoClean Ag que pode ajudar a redução da carga bacteriana local. O íon de prata (Ag+) tem um amplo espectro de atividade antimicrobiana contra bactérias Gram negativas, Gram positivas e algumas leveduras. É particularmente efetivo contra Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes e Pseudomonas aeruginosa (pyocyanic bacillus) os quais são os mais frequentemente responsáveis por feridas infectadas. A atividade antibacteriana do curativo possibilita a redução do odor causada pelos microrganismos na ferida. UrgoClean Ag reduz a população bacteriana do biofilme dentro de 24 horas e durante 7 dias (testado in vitro em S. aureus e P. aeruginosa). Praticidade: remoção do produto em peça única devido à resistência à tração das fibras hidro-desbridantes.

O gel formado não adere à ferida, o que permite uma fácil remoção do curativo com pequeno ou nenhum dano ao tecido em cicatrização, levando à nenhuma ou pouca dor.

**Indicações** UrgoClean Ag é indicado para o tratamento local de feridas crônicas (úlceras de perna, lesões por pressão, úlceras de pé diabético) e agudas (queimaduras, feridas traumáticas, feridas cirúrgicas), feridas exsudativas com risco ou com sinais de infecção local, a partir do estágio de desbridamento.

**Modo de uso** Limpar a ferida utilizando solução salina. No caso de uso prévio de antisséptico (com exceção dos antissépticos contraindicados), enxaguar cuidadosamente a ferida com solução salina antes de aplicar o curativo.

- O uso do UrgoClean Ag não dispensa a necessidade de desbridamento mecânico quando necessário.
- Durante o processo de desbridamento a ferida pode parecer estar maior em tamanho. Isso se deve à efetiva remoção do esfacelo.
- Remova as abas protetoras.
- Aplique a face micro-aderente de UrgoClean Ag à ferida e em seu contorno. UrgoClean Ag pode ser cortado utilizando uma tesoura estéril para ajustar o tamanho do curativo à ferida se necessário.
- Se necessário, cobrir UrgoClean Ag com um curativo secundário apropriado para o local da ferida e para o grau de exsudação.

Os curativos UrgoClean Ag devem ser trocados a cada 1 ou 2 dias durante a fase de desbridamento, depois de acordo com a necessidade (até 7 dias) dependendo do volume de exsudato e da condição clínica da ferida.

### Apresentações

Produto	Código	Tamanho	Caixa
UrgoClean Ag	551977	06x06cm	10 unidades
UrgoClean Ag	551978	10x10cm	10 unidades
UrgoClean Ag	551979	15x15cm	10 unidades
UrgoClean Ag	551982	15x20cm	05 unidades