

FICHA TÉCNICA

URGOTUL (CAMADA DE CONTATO FLEXÍVEL LÍPIDO-COLÓIDE)



Esterilização Esterilizado por Radiação Ionizante Beta (e-beam)

Registro Anvisa 80246910046

NCM 30059090

Descrição UrgoTul possui uma tecnologia denominada lipido-colóide (TLC), tendo sido desenvolvida pelos Laboratoires Urgo. UrgoTul é um curativo não oclusivo, flexível e adaptável, sendo constituído por uma rede têxtil 100% poliéster impregnada com partículas de hidrocolóide e partículas lipofílicas, dispersas em uma matriz de vaselina. Essa massa contém carboximetilcelulose (hidrocolóide), óleo de parafina, vaselina e polímeros transportadores.

Marca UrgoTul – Urgo

Fabricante Laboratories Urgo - 42 Rue de Longvic, 21300 Chenove – França

Composição do Produto UrgoTul possui uma tecnologia denominada lipido-colóide (TLC), sendo constituído por uma rede têxtil 100% poliéster impregnada com partículas de hidrocolóide e partículas lipofílicas dispersas em uma matriz de vaselina. Essa massa contém carboximetilcelulose (hidrocolóide), óleo de parafina, vaselina e polímeros transportadores.

Propriedades Ao entrar em contato com o exsudato das feridas, as partículas de hidrocolóide presentes na massa do UrgoTul interagem com a vaselina e formam uma interface lipido-colóide, criando um ambiente úmido ideal para o processo de cicatrização da ferida. Devido à sua composição química, UrgoTul é não oleoso ao toque e possui propriedades anti-deslizantes. Ademais, o curativo não adere ao leito da ferida ou à pele circundante e sua remoção não causa dor e traumas ao paciente. Como resultado, o produto oferece algumas propriedades específicas: - criação e manutenção de um ambiente úmido que promove a cicatrização; - remoção que não traumatiza o tecido recém formado; - trocas de curativo sem dor para o paciente.

Indicações UrgoTul é indicado para o tratamento dos seguintes tipos de lesões: - Feridas agudas (queimaduras, feridas traumáticas, dermoabrasões, feridas pósoperatórias, etc) e feridas crônicas (úlceras de perna, úlceras por pressão e úlceras de pé diabético) em fase de granulação e epitelização. - Epidermólise Bolhosa (EB). - Flexível e adaptável, UrgoTul é adequado para feridas localizadas em áreas de difícil acesso e feridas profundas.

Modo de uso Preparar a ferida de acordo com o protocolo local da instituição. Se um antisséptico for utilizado, limpar bem a ferida com solução fisiológica 0.9% antes de aplicar o Urgotul. - Remover os filmes transparentes de proteção do curativo; - Aplicar o UrgoTul diretamente sobre a ferida em uma única camada. - Se necessário, o curativo pode ser recortado do tamanho desejado com a ajuda de um equipamento estéril com o intuito de atender os diferentes tamanhos de ferida e a pele ao redor. - Cobrir UrgoTul com um curativo secundário adequado para absorver o nível de exsudato da ferida. - Fixar o curativo secundário com uma bandagem, fita adesiva ou bandagem elástica tubular.

Intervalos de Troca UrgoTul deve ser trocado a cada 2 a 4 dias dependendo do tipo de ferida e da sua condição clínica. O produto pode permanecer na ferida por até 7 dias dependendo da condição da ferida e do protocolo (quando prescrito a utilização com um sistema de bandagem compressiva para úlceras venosas de perna. Para pacientes com Epidermólise Bolhosa, o produto deve ser trocado a cada 1 a 3 dias.

Apresentações

Produto	Código	Tamanho	Caixa
UrgoTul	551694	10x10cm	10 unidades
UrgoTul	551972	15x15cm	10 unidades
UrgoTul	551925	20x30cm	05 unidades