

VIC TEST

Código: FT 071

Revisão: 00

Emissão: Março/2021

DESCRIÇÃO

VIC TEST é uma fita indicativa de teor que mede a concentração de ácido peracético, exclusivo para o produto Vic Peracético 0,2% - Pronto Uso. A solução em uso deverá ser trocada a cada 30 dias ou quando apresentar teor de ácido peracético abaixo de 0,2% (2000 ppm), utilizando o VIC TEST.

INDICAÇÕES

VIC TEST é indicado para o acompanhamento do teor de ácido peracético no uso por imersão do produto Vic Peracético 0,2% - Pronto Uso.

ADVERTÊNCIAS

Usar equipamentos de proteção individual adequados como: luvas de borracha, máscaras, óculos de proteção, avental e botas de proteção. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misturar com outros produtos.

Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias.

“Água: pode faltar. Não desperdice.”

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Mergulhe a fita na solução Vic Peracético 0,2% - Pronto Uso por 10 segundos.
- 2) Retire o excesso de solução agitando cuidadosamente, aguardando 10 segundos.
- 3) Compare a cor presente na ponta da fita com as cores padrões para verificar o teor de ácido peracético contido na solução. A escala encontra-se a seguir:

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. O. Sassi - CRF SP 14.815


SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC TEST

Código: FT 071

Revisão: 00

Emissão: Março/2021

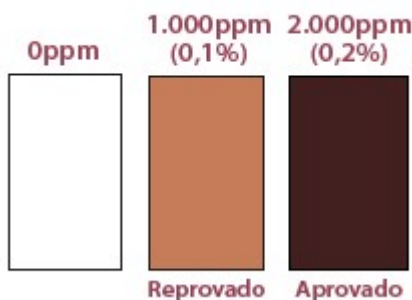

APRESENTAÇÕES

Pote contendo 30 unidades.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. ”

“PROIBIDO A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ”

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-0148110.

“CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. ”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA. ”

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE CONTATO COM OLHOS OU A PELE: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar cuidadosamente com água em abundância durante 15 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL: Lave a boca. Não provoque vômito. Consulte um médico, imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

COMPOSIÇÃO

Fita teste.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC TEST

Código: FT 071

Revisão: 00

Emissão: Março/2021

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Pigmentação da fita através da análise do teor da solução.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, devidamente tampado, em local seco e ventilado, afastado da luz solar direta e fontes de calor. Após aberto usar em no máximo 6 meses.

DESCARTE

O procedimento de descarte deve seguir o protocolo da instituição.
Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANVISA M/S.