

FICHA TÉCNICA

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto: Protetor.

Nome Comercial: Avental Trilaminado de Procedimento Descartável.

Reg. ANVISA: 81855830044.

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques - CRQ IV REGIÃO- 04265845.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

Os Aventais Trilaminados de Procedimento Descartáveis são embalados com 10 unidades em embalagens plásticas primárias.

Os pacotes por sua vez, são acondicionados em caixas de embarque.

INDICAÇÃO DE USO:

Os Aventais Trilaminados de Procedimento Descartáveis são indicados como vestimenta/paramentação na execução de procedimentos hospitalares, laboratoriais ou exames, utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes, acompanhantes e visitantes.

DESCRIÇÃO GERAL E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Os Aventais Trilaminados de Procedimento Descartáveis são confeccionados em 100% polipropileno e filme laminado impermeável, de alta qualidade, foram devidamente projetados para proteger o usuário de possíveis contaminações com fluídos e outras substâncias.

São confeccionadas e comercializadas nas dimensões e modelos:

Código	Descrição	Código de barras EAN-13
79116-55	AVENTAL TRILAMINADO DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL - MANGA LONGA - 30G C/ 10 UN. COMPOSTO POR LAMINADO IMPERMEÁVEL COM GRAMATURA DE 30G/CM ² - 1,40 M X 1,10 M	789817299750-0
79116-58	AVENTAL TRILAMINADO DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL - MANGA LONGA - 50G C/ 10 UN. COMPOSTO POR LAMINADO COM GRAMATURA DE 48G/CM ² - 1,40 M X 1,10 M	789817299758-6

MODO DE USO:

1. Abrir a embalagem.
2. Pegar o avental com as mãos e introduzir o primeiro braço pela manga que esta exposta e a seguir o outro braço.
3. Fechar o avental com as tiras.
4. Após o término do procedimento, esse avental deverá ser descartado conforme procedimento padrão.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O produto deve ser usado somente para os fins a que se destina.
- Abrir a embalagem somente no momento de uso.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único, proibido reprocessar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada, rasgada, aberta, úmida, ou fora do prazo de validade.
- Após o uso, descartar em local apropriado.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:

O produto deve ser transportado e armazenado sob a proteção da luz solar direta, calor e umidade de forma segura a preservar e garantir a integridade física e funcional do produto e da embalagem.

NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES:

ABNT NBR 16064:2016- Produtos têxteis para saúde- Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento- Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 16693:2018- Produtos têxteis para saúde- Aventais e roupas privativas para procedimentos não cirúrgicos utilizados por profissionais de saúde e pacientes- Requisitos e métodos de ensaio.

VALIDADE:



Valido por 02 anos após a data de fabricação.