

## FICHA TÉCNICA

# Máscara Cirúrgica Descartável Infantil Tripla Camada com Elástico

NOME DO PRODUTO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL INFANTIL TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PRODUTO: BAIXO RISCO

NOME TÉCNICO: MÁSCARA INFANTIL

MARCA: NAYR

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICOS NAS LATERAIS E CLIPE NASAL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, POSSUI TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS E SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM, SENDO A CAMADA INTERNA E EXTERNA CONSTITUÍDAS DE NÃO TECIDO SPUNBOND, QUE É MACIO E RESISTENTE, E A CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND), QUE APRESENTA O ELEMENTO FILTRANTE, GARANTINDO A PROTEÇÃO BACTERIANA E EVITANDO O CONTATO COM FLUÍDOS CORPORAIS.

## INFORMAÇÕES

- ATÓXICA
- HIPOALERGÊNICA
- REPELENTE À FLUÍDOS
- NÃO ESTÉRIL
- NÃO INFLAMÁVEL
- ISENTA DE FIBRA DE VIDRO
- USO ÚNICO
- BFE >95%
- EFP = 98%
- COR: BRANCA, AZUL, PRETA E ROSA

## COMPOSIÇÃO

- TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO;
- DUAS CAMADAS TNT SS E UMA CAMADA DE ELEMENTO FILTRANTE;
- CAMADA INTERNA E EXTERNA EM TNT SS ( SPUNBOND) 20 G/M<sup>2</sup>;
- CAMADA INTERMEDIÁRIA EM TNT SMS (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND) 25 G/M<sup>2</sup>;
- CAMADAS UNIDAS POR PROCESSO ELÉTRONICO DE ULTRASSOM;
- CLIPE NASAL;
- ELÁSTICO CONFORTÁVEL.



# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

Soldada por  
máquina ultrassônica



Clipe Nasal  
(moleável, ajuda na fixação)

Elástico tubular  
(toque macio, proporciona  
maior conforto durante o uso)

### INDICAÇÃO

PROTEÇÃO DA BOCA E VIAS NASAIS, MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO USUÁRIO DO PRODUTO. BARREIRA DE USO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO CONTRA INALAÇÃO DE GOTÍCULAS TRANSMITIDAS À CURTA DISTÂNCIA E PELA PROJEÇÃO DE SANGUE E/OU OUTROS FLUÍDOS CORPÓREOS, QUE POSSAM ATINGIR AS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO DO PRODUTO. IDEAL PARA USO EM ÁREA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.

### TAMANHO

- ÚNICO
- LARGURA = 145 MM
- ALTURA = 95 MM
- CLIPE NASAL = 95 MM
- ELÁSTICO = 75 MM

### INSTRUÇÕES DE USO

1. HIGIENIZAR AS MÃOS ANTES DE MANIPULAR A MÁSCARA;
2. RETIRAR A MÁSCARA DA EMBALAGEM ORIGINAL;
3. COLOCAR A MÁSCARA SOBRE O ROSTO, COMPREENDENDO AS ÁREAS DO NARIZ E DA BOCA;
4. COLOCAR OS ELÁSTICOS ATRÁS DAS ORELHAS;
5. AJUSTAR O CLIPE NO NARIZ, PARA MELHOR ADAPTAÇÃO DA MÁSCARA;
6. APÓS O USO, DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO, SECO, FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ, UMIDADE E CALOR EXCESSIVO.

# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- PRODUTO DE USO ÚNICO
- PROIBIDO REPROCESSAR
- MANTER O PRODUTO NA EMBALAGEM ORIGINAL
- APÓS O USO, DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO
- NÃO UTILIZAR CONTRA PATOLOGIAS TRANSMITIDAS POR AEROSSÓIS, POIS INDEPENDENTE DE SUA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, A VEDAÇÃO DO ROSTO É PRECÁRIA NESTE TIPO DE MÁSCARA
- SE A INTEGRIDADE DA MÁSCARA ESTIVER COMPROMETIDA (POR EXEMPLO, POR FUROS OU RASGOS), ELA DEVE SER TROCADA ASSIM QUE POSSÍVEL.

### PRAZO DE VALIDADE

2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. A VALIDADE DO PRODUTO É GARANTIDA ENQUANTO AS EMBALAGENS PERMANECEREM ÍNTEGRAS, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ROTULAGEM DO PRODUTO.

## EMBALAGEM

VOLUME DA CAIXA MASTER:

40 CAIXAS DE 50 UNIDADES

MEDIDAS DA CAIXA MASTER:

52 CM COMPRIMENTO X 39 CM LARGURA X 47 CM ALTURA

PESO DA CAIXA MASTER:

7,4 KG



# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

### FISCAL

NCM: 6307.90.10

CEST.: 28.059.00

IPI %: 0%

ICMS-ST (MVA – Margem de Valor Agregado): ICMS 12%

CST Origem (Código da Situação Tributária): 000

CST PIS: 1

CST COFINS: 1

CÓDIGO INTERNO PRODUTO (como aparece na NF):

CÓDIGO	ITEM	COR
85201	MÁSCARA 50 UNIDADES	BRANCA
85348	MÁSCARA 50 UNIDADES	AZUL
85349	MÁSCARA 50 UNIDADES	ROSA
85350	MÁSCARA 50 UNIDADES	PRETA

### ANVISA

82020320006

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRA ANTUNES DE FREITAS COREN-MS 406.309

### FABRICAÇÃO

NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA

TRAVESSA ANTÔNIO MENDES, 96

PARQUE INDUSTRIAL II

MUNDO NOVO - MS

CNPJ: 02.582.267/0001-60

I.E.: 28.334.894-1

### CONTATO

VENDAS@NAYR.COM.BR

WWW.NAYRSAUDE.COM.BR

