

VIC POLIHEXANIDA

Código: FT 048

Revisão: 02

Emissão: Março/2019

DESCRIÇÃO

Vic Polihexanida – PHMB a 0,2 % é um gel de hidratação e limpeza, promove barreira bacteriológica e boa adesão no leito da ferida. Dermatologicamente testado, com polihexametileno biguanida, de ação mecânica, auxilia no controle de exsudato e desbridamento da ferida. Assim favorecendo na redução do tempo de cicatrização.

BENEFÍCIOS e VANTAGENS:

- ✓ Custo-benefício: reduz o tempo de cicatrização;
- ✓ Previne e elimina o biofilme;
- ✓ Uso em queimaduras e feridas crônicas;
- ✓ Desodorização das feridas;
- ✓ Auxilia na remoção do tecido morto;
- ✓ Hidrata a superfície da lesão, reduzindo o tempo de cicatrização.

INDICAÇÕES

Vic Polihexanida é indicado na limpeza e hidratação da pele, podendo ser aplicado em todos os tipos de feridas, principalmente as cavitárias.

CONTRAINDICAÇÕES

Em pacientes com histórico de hipersensibilidade aos componentes da formulação.

Não deve ser misturado com outros produtos para limpeza durante aplicação, como por exemplo, sabonetes, pomadas, óleos e enzimas.

Advertências: no caso de ocorrer algum tipo de irritação causada pelo gel, procurar orientação médica.

INSTRUÇÕES DE USO

USO TÓPICO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC POLIHEXANIDA

Código: FT 048

Revisão: 02

Emissão: Março/2019

Antes da aplicação do Vic Polihexanida, limpar previamente a ferida com soro fisiológico a 0,9 %, gliconato de clorexidina degermante a 2 ou 4 %. Na sequência enxaguar com soro fisiológico a 0,9 % até total retirada dos resíduos dos produtos utilizados na limpeza. Após a limpeza, aplicar o Vic Polihexanida sobre a ferida, formando uma cobertura total. Repetir a operação a cada troca de curativo e, após, colocar a cobertura adequada (gaze, bandagem, atadura). O Vic Polihexanida deve ser utilizado como curativo primário juntamente com curativo secundário à escolha. Para uma melhor ação recomenda-se no mínimo uma troca diária, em feridas exsudativas. Pode ser utilizado em crianças e adultos.

APRESENTAÇÕES

60 g – Caixa contendo 36 bisnagas.

100 g – Caixa contendo 24 bisnagas.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“Não ingerir.”

Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

COMPOSIÇÃO

Polihexanida (PHMB)..... 0,2 %.

Excipientes: Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Amina óxida e Água purificada.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência:..... Gel límpido e homogêneo.

Cor:..... Levemente amarelado.

Odor:..... Característico.

pH:..... 5,0 a 7,0.

Densidade:..... 0,990 a 1,020 g/ml.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC POLIHEXANIDA

Código: FT 048

Revisão: 02

Emissão: Março/2019

Teor de PHMB:..... 0,16 a 0,24 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em temperatura ambiente (15 a 30 °C), ao abrigo da luz e calor excessivo e em sua embalagem original.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 8.01.427-9.

Produto Registrado na ANVISA/M.S. Nº 80142790008.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br