

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### NeoVolk Cirúrgica

- Confeccionada em Policloroprene
  - LIVRE das proteínas do látex natural
  - Estéril | Sem pó/amido
  - Superfície texturizada
  - Formato anatômico
- Registro ANVISA 80189110009
  - CA: 39.518 - conforme ISO 10282:2005, contra riscos biológicos
- As luvas NeoVolk Cirúrgica atendem as legislações: RDC 56/2001, RDC 05/2008, RDC 24/2009, RDC 55/2011, EDC 16/2013, RDC 40/2015 e Portaria INMETRO 332/2012



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - ISO 10282:2005 - Luvas estéreis de uso único; ISO 13485 - Boas práticas de fabricação de produtos médicos

#### 1. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (50 pares)	DUN 14 (200 pares)
10.45.140.06--6.0	6.0	78982017218662	37898207218663	47898207218660
10.45.140.06--6.5	6.5	78982017218679	37898207218670	47898207218677
10.45.140.06--7.0	7.0	78982017218686	37898207218687	47898207218684
10.45.140.06--7.5	7.5	78982017218693	37898207218694	47898207218691
10.45.140.06--8.0	8.0	78982017218709	37898207218700	47898207218707
10.45.140.06--8.5	8.5	78982017218716	37898207218717	47898207218714
10.45.140.06--9.0	9.0	78982017218723	37898207218724	47898207218721

#### 2. Instruções de uso

##### REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
- Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; ou realize o procedimento operacional padrão pré-cirúrgico para higienização de partes do corpo antes de sua utilização;
- Evite o uso de anéis e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos nas luvas. Em caso de danos e/ou mudanças de atividades, troque imediatamente as luvas, a fim de evitar contaminações cruzadas;
- Abra a embalagem primária da luva estéril, pela aba, descolando totalmente a parte superior e em seguida as laterais, evitando tocar na parte interna;
- Deposite o envelope interno em um campo estéril, e em seguida, posicione-se em frente ao móvel a uma distância segura, para que não haja risco de contaminação;
- Verifique o lado correto de cada luva, então abra o envelope, segurando-o pelas abas centrais, evitando que a parte externa do envelope toque as luvas, para que isso não ocorra, firme os dedos sobre as laterais internas e solte-as quando tiver certeza que ele não voltará a dobrar;
- Calce a mão dominante, segurando-a pela parte externa da dobra, vista-a calmamente, procurando alocar cada dedo no seu espaço correspondente dentro da luva, pare de calça-la quando ela estiver no punho, mantendo a dobra;
- Calce a luva na outra mão, com auxílio da mão já vestida, segure-a pela parte interna da dobra e delize a mão para dentro da luva. Pare quando a dobra estiver desfeita, prestando atenção para evitar o contato da parte estéril da luva no antebraço;
- Corrija o posicionamento dos dedos da mão em ambas luvas. Desfaça a dobra da outra mão com segurança, sem encostar a parte estéril da luva no antebraço;
- Para retirá-las, inicie pela mão dominante, pegue uma luva próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre;
- Pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos dedos. À medida que puxar, você estará colocando a luva ao avesso;
- Continue puxando a dobra até que a luva esteja quase que totalmente removida. A fim de evitar contaminação do ambiente, continue a segurar a luva removida. A seguir, remova sua mão da luva completamente;
- Escoregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece. Continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que quase metade do dedo esteja sob a luva;
- Gire seu dedo a 180° e puxe a luva ao avesso em direção à ponta dos seus dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva será contida dentro da segunda luva. O lado interno da segunda luva também será virada ao avesso;
- Pegue as luvas firmemente por meio da superfície não-contaminada (o lado que estava inicialmente tocando sua mão). Libere totalmente o contato com a primeira luva removida;
- A seguir retire sua segunda mão do contato com as luvas descartando-as adequadamente, conforme instruções de descarte de produtos infectados e/ou normas de saneamento da sua empresa ou hospital.

#### 3. Precauções & Advertências

Produto de uso único;

Destruir após o uso;

Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;

Proibido reprocessar;

Estéril, enquanto a embalagem não for aberta e/ou danificada;

Esterilizada por irradiação;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva;

O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.