

FICHA TÉCNICA
ESENTA Barreira Protetora Spray - 28 ml

Nome Genérico	Barreira protetora ou filme protetor da pele.
Nome Comercial	ESENTA - Barreira Protetora Spray
Produto / Unidade	
Apresentação Comercial	
Descrição	ESENTA Barreira Protetora Spray forma uma resina de silicone que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos, podendo ser usado na troca de bolsas de ostomia e curativos, ao redor dos estomas e feridas.
Marca	ESENTA™ ConvaTec®
Fabricante Legal	ConvaTec Inc – Estados Unidos
Composição do Produto	ESENTA Barreira Protetora Spray é composto por disiloxisano, Trimetilsiloxisilicato e zanthoxylum bungeanum.
Características e Ações do Produto	Formulação: Formulação límpida, fluída, volátil, sem odor e incolor. Barreira Protetora da Pele: forma uma barreira oclusiva que repele a umidade e atua como barreira contra fatores irritantes como fezes e urina.
Recomendações de Uso	Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.

		ESENTA barreira protetora spray é indicado para a proteção da pele contra os danos associados aos resíduos do corpo, como fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos. Este produto deve ser utilizado na pele ao redor dos estomas e na pele ao redor de feridas. Recomendado somente para uso externo, devendo ser evitada a utilização em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz e vagina) ou direta no leito das feridas e a inalação do produto. Modo de utilização: • Limpe e seque a pele completamente; • Segure a aproximadamente 10 cm da área a ser tratada. • Aplique uma camada uniforme num movimento de passagem. • Certifique-se de que a área está completamente seca antes de aplicar produtos adesivos, tais como equipamentos ou curativos. • Substitua em cada mudança de curativo ou de equipamento para manter a proteção completa. A reaplicação é recomendada a cada 12-72 horas, dependendo das condições da superfície da pele. O ESENTA Barreira Protetora Spray não causará um acúmulo de película de barreira na superfície da pele.		
Cuidados de Conservação		Proteja da luz solar. Não exponha a temperaturas superior a 50°C.		
Prazo de Validade		2 anos		
Registro Sanitário		Cadastro 80523029019		
Responsável Técnico Registro		Carla Viotto Belli CRF-SP nº 16.715		
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Característica	Unidades por Caixa
423286			Spray 28 ml	1