

**FICHA TÉCNICA**  
**ESENTA Barreira Protetora Spray - 50 ml**

<b>Nome Genérico</b>	Barreira protetora ou filme protetor da pele.
<b>Nome Comercial</b>	ESENTA - Barreira Protetora Spray
<b>Produto / Unidade</b>	
<b>Apresentação Comercial</b>	
<b>Descrição</b>	ESENTA Barreira Protetora Spray forma uma resina de silicone que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos, podendo ser usado na troca de bolsas de ostomia e curativos, ao redor dos estomas e feridas.
<b>Marca</b>	ESENTA™ ConvaTec®
<b>Fabricante Legal</b>	ConvaTec Inc – Estados Unidos
<b>Composição do Produto</b>	ESENTA Barreira Protetora Spray é composto por disiloxisano, Trimetilsiloxisilicato e zanthoxylum bungeanum.
<b>Características e Ações do Produto</b>	<b>Formulação:</b> Formulação límpida, fluída, volátil, sem odor e incolor. <b>Barreira Protetora da Pele:</b> forma uma barreira oclusiva que repele a umidade e atua como barreira contra fatores irritantes como fezes e urina.

<b>Recomendações de Uso</b>	<p><b>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.</b></p> <p>ESENTA barreira protetora spray é indicado para a proteção da pele contra os danos associados aos resíduos do corpo, como fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos. Este produto deve ser utilizado na pele ao redor dos estomas e na pele ao redor de feridas. Recomendado somente para uso externo, devendo ser evitada a utilização em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz e vagina) ou direta no leito das feridas e a inalação do produto.</p> <p>Modo de utilização:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe e seque a pele completamente;</li> <li>• Segure a aproximadamente 10 cm da área a ser tratada.</li> <li>• Aplique uma camada uniforme num movimento de passagem.</li> <li>• Certifique-se de que a área está completamente seca antes de aplicar produtos adesivos, tais como equipamentos ou curativos.</li> <li>• Substitua em cada mudança de curativo ou de equipamento para manter a proteção completa.</li> </ul> <p>A reaplicação é recomendada a cada 12-72 horas, dependendo das condições da superfície da pele. O ESENTA Barreira Protetora Spray não causará um acúmulo de película de barreira na superfície da pele.</p>													
<b>Cuidados de Conservação</b>	Proteja da luz solar. Não exponha a temperaturas superior a 50°C.													
<b>Prazo de Validade</b>	4 anos													
<b>Registro Sanitário</b>	Cadastro 80523029018													
<b>Responsável Técnico Registro</b>	Carla Viotto Belli CRF-SP nº 16.715													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código ICC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>423288</td> </tr> </tbody> </table>	Código ICC	423288	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Brasíndice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Brasíndice		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SIMPRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SIMPRO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Característica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spray 50 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Característica	Spray 50 ml	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unidades por Caixa	1
Código ICC														
423288														
Brasíndice														
SIMPRO														
Característica														
Spray 50 ml														
Unidades por Caixa														
1														