


**FICHA TÉCNICA**  
**SUR-FIT ADVANTAGE BOLSA COLETORA DRENÁVEL COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO**

<b>Nome Genérico</b>	Bolsa coletora drenável com janela de visualização
<b>Nome Comercial</b>	Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável com Janela de Visualização
<b>Produto</b>	
<b>Descrição</b>	<p>As Placas Protetoras de Pele e as Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização são partes integrantes do sistema de duas peças para estomia.</p> <p>As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização foram projetadas para coletar o efluente proveniente de estomias de eliminação. Elas podem ser transparentes ou opacas e possuir filtro. As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização possuem o sistema de fechamento InvisiClose que garante maior conforto e segurança ao usuário.</p> <p>São utilizadas em conjunto com as Placas Protetoras de Pele com Accordion Flange™, que permitem que os dedos possam ser colocados entre a barreira protetora de pele e o flange enquanto a bolsa é acoplada, sem exercer pressão no abdômen. A placa protetora de pele deve ser utilizada com o mesmo tamanho de Sur-Fit Advantage Bolsa Coletora Drenável com Janela de Visualização.</p> <p>As Placas Protetoras de Pele possuem um adesivo hidrocólóide para proteção da pele e um anel de acoplamento plástico que permite o encaixe das Bolsas Coletoras. Este produto pode permanecer aplicado durante o banho, chuveiro ou natação. Cubra o filtro com o adesivo fornecido quando realizar estas atividades e remova-o após o término. Seque a bolsa coletora sem esfregar após exposição à água.</p> <p>Para o uso das Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização é obrigatório o uso das placas protetoras de pele.</p> <p>Atenção: Os pacientes com uma urostomia plana, quando associada a megaureteres e na ausência de um reservatório urinário, devem ter conhecimento de que foram relatados casos de adesivo encontrado no trato urinário. Inicie o tratamento clínico adequado e avalie o uso continuado do produto adesivo caso de detecte a presença de uma massa.</p>

	<p>Este produto é de uso único (descartável) e não deve ser reutilizado. A sua reutilização pode levar ao aumento do risco de infecção e/ ou contaminação cruzada. As propriedades físicas do dispositivo podem ser afetadas e não ser as mais aconselhadas para o uso pretendido.</p> <p>O adesivo de apoio pode causar irritação da pele em usuários de fraldas. Se ocorrer qualquer irritação, descontinue o uso e consulte um profissional da saúde.</p> <p>A pele periestomia deve estar limpa, seca e livre de qualquer solvente ou substâncias gordurosas. Proteja a estomia contra trauma ou lesão.</p>
<b>Marca</b>	ConvaTec
<b>Fabricante Legal</b>	ConvaTec Limited – Reino Unido
<b>Composição do Produto</b>	<p>As Sur-Fit Advantage Bolsas Coletoras Drenáveis com Janela de Visualização são confeccionadas com filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), totalmente à prova de odores, e acetato de viniletileno (EVA), que conferem maciez e reduzem os ruídos. Apresentam um painel de visualização, confeccionado por etileno-metil acrilato (EMA), acetato de viniletileno (EVA), polietileno.</p> <p>Espuma de poliuretano laminada a uma tela de poliamida, tratada com carvão ativado (contendo KMnO4) e aglutinante de acrilato (preto).</p>
<b>Características e Ações do Produto</b>	<p><b>1. Preparação da Pele</b> Suas mãos e a pele ao redor da estomia devem estar limpas, secas e livres de substâncias oleosas antes da aplicação de qualquer sistema coletor para estomia.</p> <p><b>2. Preparação das Placas Protetoras de Pele</b></p> <p><b>a. Placa Protetora de Pele Recortável</b> Utilizando o guia fornecido, selecione uma placa com uma abertura que seja pelo menos 13mm (1/2 in) maior do que o diâmetro máximo da estomia. Trace o contorno exato da estomia sobre o papel protetor que cobre a placa. Corte a placa protetora de pele ao longo da linha tracejada, deixando pelo menos 7mm (1/4 in) de placa protetora entre o orifício inicial e o flange. Remova o papel da placa.</p> <p><b>b. Placa Protetora de Pele Trilaminada Moldável</b> Não remova o papel protetor da porção adesiva da placa/ barreira de pele. A placa/ barreira deverá ser moldada ao formato e tamanho da estomia sem o uso de tesouras. Para personalizar a abertura da estomia, insira os polegares (ou dedos) na borda do orifício inicial e comece a enrolar a parte adesiva para trás. Use os polegares (ou dedos) para continuar a enrolar o adesivo até que se crie uma abertura do tamanho desejado e no formato da estomia. O adesivo deverá ser enrolado. Não estique, puxe ou corte o adesivo para torná-lo maior. Aplicar imediatamente após a moldagem.</p> <p><b>3. Aplicação da Placa Protetora de Pele</b> Remova o papel protetor da porção adesiva da barreira protetora. Centralize a abertura da barreira protetora sobre a estomia e aplique a barreira sobre a pele, pressionando por 30 segundos. Caso a placa escolhida possua adesivo de apoio, remova o restante do papel protetor da porção adesiva. Alise suavemente a superfície da barreira protetora, certificando-se de remover quaisquer rugas que possam ter surgido durante a aplicação. Pressione o adesivo enrolado próximo à estomia em movimentos circulares; faça esse movimento por 30 segundos. Se estiver usando uma placa protetora de pele</p>

	<p>moldável, além dos passos anteriores, pressionar o adesivo enrolado com movimentos circulares em direção à estomia por 30 segundos. Usar enquanto estiver confortável e seguro. O tempo de uso pode variar.</p> <p><b>4. Aplicação da Bolsa Coletora à Placa Protetora de Pele</b>  Antes de aplicar a bolsa coletora deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre em seu interior, abrindo-a delicadamente.  Para a fixação da bolsa à placa protetora, proceda conforme as figuras a seguir:  Para garantir a vedação, alinhe o flange da bolsa ao flange da placa protetora de pele, pressionando o seu contorno até ouvir os cliques para assegurar-se do completo encaixe.</p> <p><b>5. Aplicação da Bolsa Coletora à Placa Protetora de Pele com Accordion Flange™</b>  Antes de aplicar a bolsa deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre em seu interior, abrindo-a delicadamente.  Para garantir a vedação, segure o flange com três dedos das duas mãos, conforme figura ao lado e alinhe o flange da placa com o flange da bolsa coletora.  Começando pela parte inferior, pressione gentilmente o contorno dos flanges até ouvir os cliques para assegurar-se do completo encaixe. Puxe gentilmente a bolsa coletora para garantir que a placa protetora está bem segura no lugar.</p> <p><b>6. Fechamento da Bolsa Coletora</b>  Dobre a bolsa a partir das tiras brancas na extremidade até que os conectores plásticos fiquem sobrepostos. Pressione os conectores em toda a sua largura e aperte até sentir que estão bem fechados. Para maior segurança, utilize o bolso para ocultar o sistema de fecho, ou dobre a aba para baixo, em volta da zona de saída da bolsa.</p> <p><b>7. Informação sobre Bolsas Coletoras com filtros</b>  Este produto pode permanecer aplicado durante o banho, chuveiro ou natação. Cubra o filtro com o adesivo fornecido quando realizar estas atividades e remova-o após o término. Seque a bolsa coletora sem esfregar após exposição à água.</p> <p><b>8. Esvaziamento das Bolsas Coletoras Drenáveis</b>  Desenrole o sistema de fecho da bolsa e abra a saída apertando lateralmente ambas as tiras brancas que se encontram na extremidade da mesma. Esvazie a bolsa coletora.</p> <p><b>9. Remoção da Bolsa Coletora</b>  Desencaixe o flange da bolsa conectada ao flange da placa, puxando-o delicadamente com uma mão ao mesmo tempo em que segura a placa protetora aderida à pele com a outra mão.</p> <p><b>10. Remoção da Placa Protetora de Pele</b>  Com ambas as mãos, puxe gentilmente a placa protetora da pele, removendo-a cuidadosamente para não ferir a pele.</p>
<b>Recomendações de Uso</b>	Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.
<b>Cuidados de Conservação</b>	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

<b>Prazo de Validade</b>	5 anos
<b>Registro Sanitário</b>	Notificação ANVISA Nº 80523020084
<b>Responsável Técnico</b>	Carla Viotto Belli
<b>Registro</b>	CRF-SP nº 16.715

<b>Código ICC</b>	<b>Brasíndice</b>	<b>Característica</b>	<b>Unidades por Caixa</b>
421747		45mm	10 unidades
421748		57mm	10 unidades
421749		70mm	10 unidades