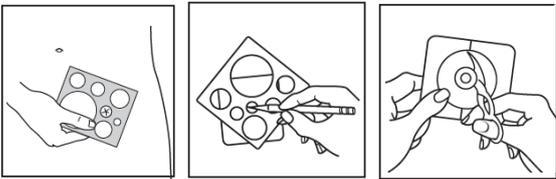
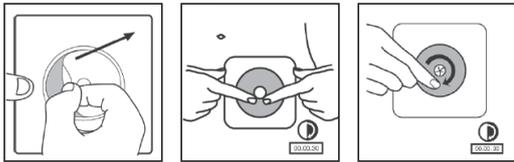
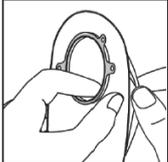
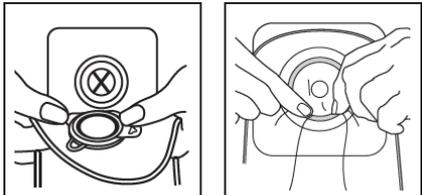
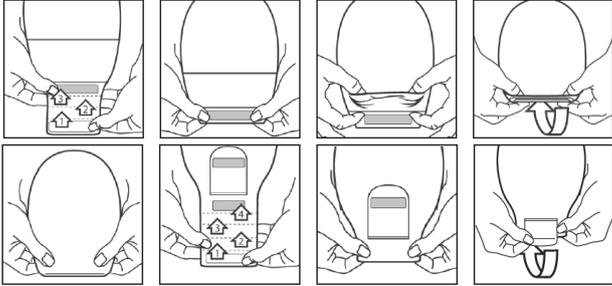
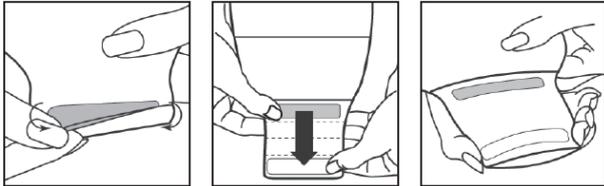
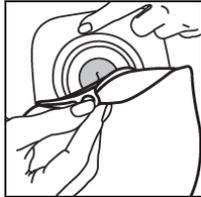


FICHA TÉCNICA
SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE FLEXÍVEL PLACA PROTETORA DE PELE RECORTÁVEL

Nome Genérico	Placa protetora de pele recortável, flexível
Nome Comercial	Sur-Fit Advantage Durahesive Flexível Placa Protetora de Pele Recortável
Produto	
Descrição	<p>As Sur-Fit Advantage Durahesive Flexível Placas Protetoras de Pele Recortáveis e Planas e as Bolsas Coletoras Sur-Fit Advantage são partes integrantes do sistema de duas peças para estomia.</p> <p>Sugestão: As Placas Protetoras de Pele possuem um adesivo hidrocoloide para proteção da pele e um anel de acoplamento plástico que permite o encaixe das Bolsas Coletoras.</p> <p>A placa protetora de pele deve ser utilizada com o mesmo tamanho de bolsa coletora Sur-Fit Advantage.</p> <p>Indicadas para o gerenciamento dos efluentes provenientes das estomias.</p> <p>Este produto pode permanecer aplicado durante o banho, chuveiro ou natação. Cubra o filtro com o adesivo fornecido quando realizar estas atividades e remova-o após o término. Seque a bolsa coletora sem esfregar após exposição à água.</p> <p>Atenção: Os pacientes com uma urostomia plana, quando associada a megaureteres e na ausência de um reservatório urinário, devem ter conhecimento de que foram relatados casos de adesivo encontrado no trato urinário. Inicie o tratamento clínico adequado e avalie o uso continuado do produto adesivo caso de detecte a presença de uma massa.</p> <p>Este produto é de uso único (descartável) e não deve ser reutilizado. A sua reutilização pode levar ao aumento do risco de infecção e/ ou contaminação cruzada. As propriedades físicas do dispositivo podem ser afetadas e não ser as mais aconselhadas para o uso pretendido.</p> <p>O adesivo de apoio pode causar irritação da pele em usuários de fraldas. Se ocorrer qualquer irritação, descontinue o uso e consulte um profissional da saúde.</p> <p>A pele periestomia deve estar limpa, seca e livre de qualquer solvente ou substâncias gordurosas. Proteja a estomia contra trauma ou lesão.</p>
Marca	ConvaTec
Fabricante Legal	ConvaTec Limited – Reino Unido
Composição do Produto	As placas utilizam a massa Durahesive, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocolóides absorventes e protetores da pele) e poliisobutileno, borracha isobutílica, óleo mineral, estireno-isopreno- estireno, tetrakis (metileno[3,5-di-tert-butil-4-hidroxihidrocinaurato]) metano e éster de pentaeritriol. A superfície da placa é laminada com uma camada de filme de

	<p>polietileno fino e transparente. Os flanges são confeccionados em acetato de vinilileno.</p> <p>O adaptador de baixa pressão é confeccionado em acetato de vinilileno (EVA).</p>
<p>Características e Ações do Produto</p>	<p>1. Preparação da Pele Suas mãos e a pele ao redor da estomia devem estar limpas, secas e livres de substâncias oleosas antes da aplicação de qualquer sistema coletor para estomia.</p> <p>2. Preparação das Placas Protetoras de Pele Utilizando o guia fornecido, selecione uma placa com uma abertura que seja pelo menos 13mm (1/2 in) maior do que o diâmetro máximo da estomia. Trace o contorno exato da estomia sobre o papel protetor que cobre a placa. Corte a placa protetora de pele ao longo da linha tracejada, deixando pelo menos 7mm (1/4 in) de placa protetora entre o orifício inicial e o flange. Remova o papel da placa.</p>  <p>3. Aplicação da Placa Protetora de Pele Remova o papel protetor da porção adesiva da barreira protetora. Centralize a abertura da barreira protetora sobre a estomia e aplique a barreira sobre a pele, pressionando por 30 segundos. Caso a placa escolhida possua adesivo de apoio, remova o restante do papel protetor da porção adesiva. Alise suavemente a superfície da barreira protetora, certificando-se de remover quaisquer rugas que possam ter surgido durante a aplicação. Pressione o adesivo enrolado próximo à estomia em movimentos circulares; faça esse movimento por 30 segundos.</p>  <p>4. Aplicação da Bolsa Coletora à Placa Protetora de Pele Antes de aplicar a bolsa coletora deve-se permitir que uma pequena quantidade de ar entre em seu interior, abrindo-a delicadamente. Para a fixação da bolsa à placa protetora, proceda conforme as figuras a seguir:</p>  <p>Para garantir a vedação, alinhe o flange da bolsa ao flange da placa protetora de pele, pressionando o seu contorno até ouvir os cliques para assegurar-se do completo encaixe.</p> 

	<p>5. Fechamento da Bolsa Coletora Dobre a bolsa a partir das tiras brancas na extremidade até que os conectores plásticos fiquem sobrepostos. Pressione os conectores em toda a sua largura e aperte até sentir que estão bem fechados. Para maior segurança, utilize o bolso para ocultar o sistema de fecho, ou dobre a aba para baixo, em volta da zona de saída da bolsa.</p>  <p>6. Informação sobre Bolsas Coletoras com filtros Este produto pode permanecer aplicado durante o banho, chuveiro ou natação. Cubra o filtro com o adesivo fornecido quando realizar estas atividades e remova-o após o término. Seque a bolsa coletora sem esfregar após exposição à água.</p> <p>7. Esvaziamento das Bolsas Coletoras Drenáveis Desenrole o sistema de fecho da bolsa e abra a saída apertando lateralmente ambas as tiras brancas que se encontram na extremidade da mesma. Esvazie a bolsa coletora.</p>  <p>8. Remoção da Bolsa Coletora Desencaixe o flange da bolsa conectada ao flange da placa, puxando-o delicadamente com uma mão ao mesmo tempo em que segura a placa protetora aderida à pele com a outra mão.</p>  <p>9. Remoção da Placa Protetora de Pele Com ambas as mãos, puxe gentilmente a placa protetora da pele, removendo-a cuidadosamente para não ferir a pele.</p> 
Recomendações de Uso	Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem.
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10 e 30°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada.

Prazo de Validade	5 anos
Registro Sanitário	Notificação ANVISA Nº 80523020083
Responsável Técnico	Carla Viotto Belli
Registro	CRF-SP nº 16.715

Código ICC	Brasíndice	Característica	Unidades por Caixa
413161		45mm	10 unidades
413162		57mm	10 unidades
413163		70mm	10 unidades