

NOME DO PRODUTO: Sonda FOLEY EM LÁTEX SILICONIZADO COM VÁLVULA PLÁSTICA - WELL LEAD

Registro MS: 10150470609

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Sonda

Matéria Prima: Látex siliconizado

Método de Esterilização: **Óxido de Etileno**

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

As Sondas Foley em Látex siliconizado possuem ponta distal arredondada e fechada, furos laterais para drenagem, balão em látex. Ponta proximal em duas apresentações com sondas de 2 e com 3 vias, válvula de insuflação em plástico para uso com seringas.

INDICAÇÃO DE USO


As sondas foley em látex siliconizado Well Lead, são indicadas para procedimentos urológicos variados, para longa permanência em pacientes, para drenagem vesical de rotina, para drenagem pós cirúrgicos ou irrigação vesical.

INSTRUÇÃO DE USO

- Antes do procedimento, efetuar o teste como balão preenchendo com água destilada com volume correspondente, após o teste lubrifique a sonda utilizando um gel lubrificante ou gel a base de água (com ou sem anestésico);

- Usando técnica estéril, insira toda a sonda na uretra, certificando-se de que o balão fique além do colo vesical;
- Use seringa para encher o balão;
- Encha o balão com água destilada;
- A capacidade do balão está indicada no funil da sonda e no rótulo da embalagem.
- Não encha o balão com volume diferente do indicado;
- Assegure-se de que está funcionando bem, verificando o fluxo de urina.
- Quando aplicável prender a sonda com fixador;
- Utilizar a tampa para sonda foley por um curto período de tempo para a prevenção de infecção do trato urinário;
- Antes de retirar a sonda, esvazie o balão utilizando uma seringa adequada;
- Com auxílio da seringa, aspirar com suavidade para remover o líquido de enchimento do balão. Não aspire excessivamente durante o esvaziamento, pois pode causar um colapso do lúmen o que pode prejudicar a drenagem normal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

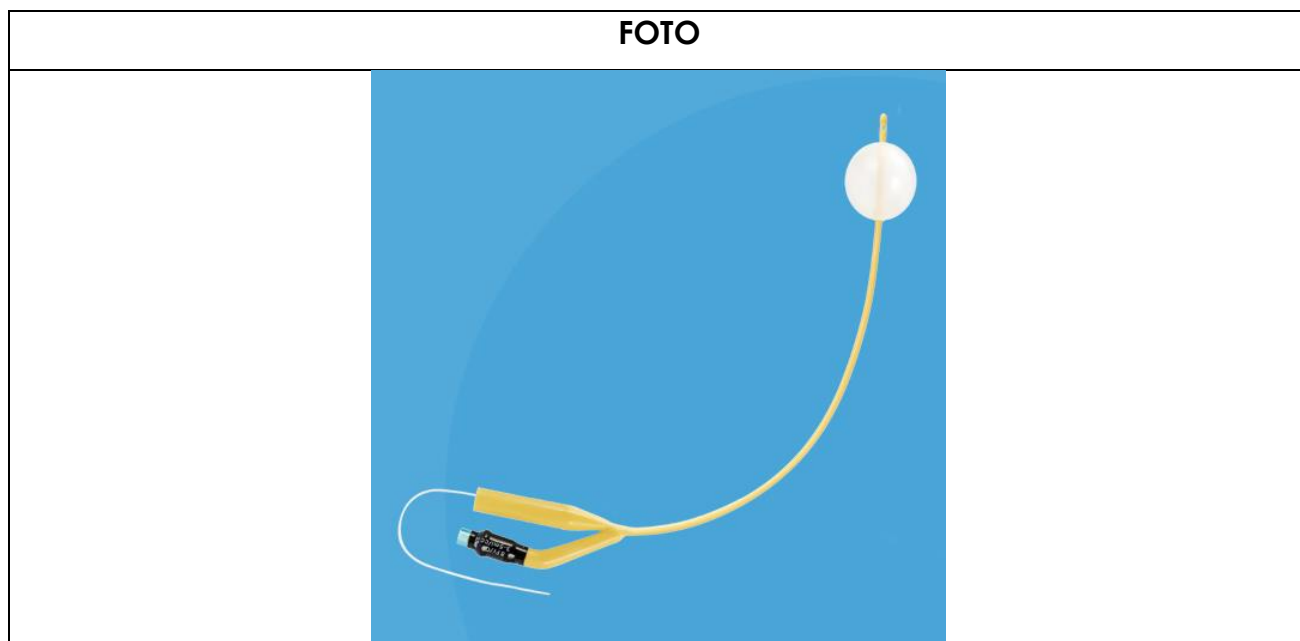

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BALÃO
F01A060602	Sonda Foley 2 Vias – 6 FR	3 ml
F01A060803	Sonda Foley 2 Vias – 8 FR	3 ~ 5 ml
F01A061003	Sonda Foley 2 Vias – 10 FR	3 ~ 5 ml
F01A021204	Sonda Foley 2 Vias – 12 FR	5 ml
F01A021404	Sonda Foley 2 Vias – 14 FR	5 ml
F01A021604	Sonda Foley 2 Vias – 16 FR	5 ml
F01A021804	Sonda Foley 2 Vias – 18 FR	5 ml
F01A022004	Sonda Foley 2 Vias – 20 FR	5 ml
F01A022204	Sonda Foley 2 Vias – 22 FR	5 ml
F01A022404	Sonda Foley 2 Vias – 24 FR	5 ml
F01A021210	Sonda Foley 2 Vias – 12 FR	30 ml
F01A021410	Sonda Foley 2 Vias – 14 FR	30 ml
F01A021610	Sonda Foley 2 Vias – 16 FR	30 ml
F01A021810	Sonda Foley 2 Vias – 18 FR	30 ml
F01A022010	Sonda Foley 2 Vias – 20 FR	30 ml
F01A022210	Sonda Foley 2 Vias – 22 FR	30 ml
F01A022410	Sonda Foley 2 Vias – 24 FR	30 ml
F01A022610	Sonda Foley 2 Vias – 26 FR	30 ml
F01A101610	Sonda Foley 3 Vias – 16 FR	30 ml
F01A101810	Sonda Foley 3 Vias – 18 FR	30 ml
F01A102010	Sonda Foley 3 Vias – 20 FR	30 ml
F01A102210	Sonda Foley 3 Vias – 22 FR	30 ml
F01A102410	Sonda Foley 3 Vias – 24 FR	30 ml
F01A102610	Sonda Foley 3 Vias – 26 FR	30 ml

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem individual em papel grau cirúrgico, Produto estéril, esterilizado em Óxido de Etileno, validade de 05 anos. Caixa com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na embalagem original e num ambiente seco de preferência protegidos da fonte calor direto ou indireto.

Transportar na embalagem original afim de não comprometer a integridade e a esterilidade do produto.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não utilizar se a embalagem estiver danificada;
- A inflação ou deflação do balão deve ser testado antes de ser utilizado;
- O produto é destinado ao uso por médicos treinados e técnica asséptica deve ser utilizada;
- Caso o balão não inflar, consulte a embalagem unitária exterior ou o funil do cateter a capacidade de balão.
- Encher o balão do cateter com água destilada estéril;
- Não use pomada e lubrificantes com base de petróleo. Use óleo de silicone ou lubrificante solúvel em água;
- Não use agulha para inflar o balão, use uma seringa;
- Produto de USO ÚNICO;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme as normas nacionais para resíduos biológicos;
- CONTEM LÁTEX NATURAL, PODE CAUSAR ALERGIA.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259