

<b>Produto:</b>	<b>CURATEC GEL DE LIMPEZA</b>			
<b>Registro ANVISA nº:</b>	80246910059			
<b>Apresentações:</b>				
	<b>CÓDIGO NCM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>
	30059090	K372001	30 ml	12 unidades
	30059090	K372002	100 ml	12 unidades
	30059090	K372003	150 ml	12 unidades

**1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Curatec® Gel de Limpeza é um gel aquoso com 0,1% de PHMB (antimicrobiano), límpido, incolor, inodoro, não gorduroso e hidratante. Indicado para a limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas cutâneas agudas (traumáticas ou pós-operatórias), crônicas (inclusive feridas profundas) e queimaduras (de primeiro e segundo grau). Pode ser utilizado juntamente com outros curativos para preservar a umidade. Auxilia na prevenção e tratamento da camada de biofilme devido à combinação de seus ingredientes.



**2. INDICAÇÕES:** Curatec® Gel de Limpeza é indicado para:

- Limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas cutâneas agudas (traumáticas ou pós-operatórias), crônicas (inclusive feridas profundas) e queimaduras (de primeiro e segundo grau);
- Hidratação de curativos e de coberturas de feridas, tais como compressas, curativos secundários, gazes, esponjas, hidrofibras, alginatos, hidrocolóides, ou outros materiais absorventes para preservar a umidade da ferida;
- Troca de curativos, facilitando o desprendimento de crostas e conseqüentemente diminuindo a dor

durante a remoção dos curativos.

**2.1 CONTRAINDICAÇÕES:** Não utilizar o produto em associação com tensoativos aniônicos, pois estes podem afetar sua conservação. **Curatec® Gel de Limpeza** não deve ser utilizado em conjunto com outros produtos para limpeza de feridas, tais como: sabonetes, pomadas, óleos ou enzimas, entre outros. Não utilizar em cartilagem hialina. Não utilizar em caso de alergia conhecida, ou de suspeita de alergia, a qualquer um dos componentes do produto. Em caso de reação alérgica ou hipersensibilidade, suspender o uso imediato do produto e procurar orientação médica.

### **3. MODO DE USO.**

Para a utilização do **Curatec® Gel de Limpeza** retire o selo lacre e abra a tampa.

Duas situações podem ocorrer:

a) Aplicação Direta: aplique sobre o leito da ferida ou cavidades, mantendo uma camada de 3 a 5mm de espessura de acordo com o intervalo de trocas do curativo.

b) Aplicação Indireta: umidifique as compressas, gazes, ou outras coberturas com **Curatec® Gel de Limpeza** e cubra, ou preencha com eles, a ferida.

**Curatec® Gel de Limpeza** pode permanecer em contato com a ferida até a próxima troca do curativo. Nos

casos de curativos de difícil remoção, aconselha-se umedecer as compressas com **Curatec® Gel de Limpeza**

até que seja possível remover suavemente o curativo, sem traumatizar a superfície da ferida. Para manter uma

hidratação adequada aconselha-se a aplicação de **Curatec® Gel de Limpeza** com maior frequência, até que

todas as camadas de tecido necrosado possam ser removidas com facilidade e a ferida apresente-se limpa.

Aconselha-se uma limpeza cautelosa de toda área periferida.

#### **3.1. INTERVALOS DE TROCA.**

A frequência de aplicação irá depender das condições da ferida e deve ser feita sob orientação de um profissional da saúde.

Curatec Gel de Limpeza possui ação antimicrobiana comprovada por até 72 horas (3 dias), ficando a troca do mesmo a critério do profissional da saúde responsável.

**4. APRESENTAÇÕES:** **Curatec® Gel de Limpeza** é comercializado em bisnagas cilíndricas, compostas por polietileno e tampa de polipropileno.

O produto está disponível nas seguintes apresentações: 30 mL (equivalente a 30g), 100 mL (equivalente a

100g), 150 mL (equivalente a 150g), 200 mL (equivalente a 200g), e 250 mL (equivalente a 250g),

O produto é *não estéril*.

**5. PRECAUÇÕES:** Produto para uso externo, não deve ser ingerido. Mantenha fora do alcance de crianças.  
Não exponha os frascos à luz solar direta. Não utilizar **Curatec® Gel de Limpeza** caso a embalagem esteja aberta ou danificada. A utilização do produto deve sempre ser realizada sob orientação de um profissional de

Espécie: **FICHA TÉCNICA**  
Título: **CURATEC GEL DE LIMPEZA**

Evitar o contato do tubo com a ferida ou com outra fonte de contaminação. Cada tubo destina-se apenas a um paciente. Fechar a embalagem imediatamente após cada aplicação.

**6. COMPOSIÇÃO:** **Curatec® Gel de Limpeza** é composto por PHMB (polihexametilbiguanida) 0,1%, cocoamidopropilbetaína 0,1%, hidroxietilcelulose, propilenoglicol, imidazolidinil ureia, EDTA e água purificada.

**7. PRAZO DE VALIDADE:** o prazo de validade de dois anos após a data de fabricação é válido seguindo as condições de armazenamento e transporte. Após aberto, utilizar o produto por até 8 semanas.

**8. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:** o produto deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente, mantendo-o na embalagem original em ambiente fresco e ao abrigo da luz e umidade. Não expor o frasco à luz solar direta. Fechar a embalagem imediatamente após a aplicação.