

Ficha Técnica - SANRO LIS



Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno com pó bioabsorvível e palma com superfície lisa. Punhos com bordas. Estéril.

Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e lubrificadas com pó bioabsorvível de amido de milho. Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

Aplicações

Indicada como proteção das mãos do usuário e do paciente em área médico-hospitalar, principalmente em cirurgias.

Especificações Gerais

Modelo	SANRO LIS
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Superfície Liso
Acabamento Interno	Com pó
Formato	Anatômico
Cor	Natural
Comprimento	28 cm
Espessura	0,24 mm
Esterilização	Estéril

Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
6.0	387900002	7896243101115	17896243101112
6.5	388900002	7896243101139	17896243101136
7.0	389900002	7896243101153	17896243101150
7.5	390900002	7896243101177	17896243101174
8.0	391900002	7896243101191	17896243101198

Embalagem

embalada individualmente



caixa com 200 pares

Certificação

CA	4343
CAD. ANVISA	10170480014
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
IFBQ	03997-2/2017



Ficha Técnica - SANRO LIS



INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;
Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;
Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola;
Após calçada, remover o excesso de pó bioabsorvível com uma toalha estéril umedecida.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

MATRIZ: Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP
CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.luvassanro.com.br

e-mail: latex@latexsr.com.br

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP



Para maiores informações, consulte o nosso site: www.luvassanro.com.br




SEPARE AS ABAS E PUXE PARA ABRIR

**LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX
DE BORRACHA NATURAL**
ESTÉREIS - LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL
SUPERFÍCIE LISA - FORMATO ANATÔMICO - DEDOS CURVOS

SanroLis
PROIBIDO REPROCESSAR
REUTILIZAR APÓS O USO
PRODUTO DE USO ÚNICO

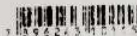

TAM.: **7.0 INT₂**
REFERÊNCIA: **389900002**
FAB. / EST. EM: **05/2020**
LOTE: **123203**
CÓD. BARRAS: 

CONTÉM
1
PAR



C.A. 4343 - CAD. ANVISA Nº 10170480014 • RESP. TÉCNICO: ANGELINA M.C.L. MEDINA - CRQ 04.110.366

ESTERILIZADAS PELO PROCESSO RAYO GAMA COBALTO 60 - A VALIDADE E ESTERILIDADE DESTES PRODUTOS ESTÃO ASSEGURADAS POR 03 ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR ABERTA, DANIFICADA OU MOLHADA. APÓS CALÇADA, REMOVER O EXCESSO DE PÓ BIOABSORVÍVEL COM UMA TOALHA ESTÉRIL UMEDECIDA. **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ.**



ATENÇÃO: ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

MATRIZ
AV. 3 DE MAIO, 307
SÃO ROQUE / SP - CEP 18134-000
CNPJ 70.939.574/0001-05

FILIAL
RUA HORÁCIO MANLEY LANE, 440 - ÁREA 1
B. MARMELEIRO - SÃO ROQUE/SP - CEP 18131-770
CNPJ 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800.7218505
CAIXA POSTAL: 1750 - CEP 18130-971 | SÃO ROQUE/SP | WWW.LATEXSR.COM.BR
E-MAIL: LATEX@LATEXSR.COM.BR | FONE: (11) 4713.5000 / FAX: (11) 4712.5274