

## Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL



### Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno com pó bioabsorvível e palma com superfície texturizada e antiderrapante. Punhos com bordas. Estéril

### Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e lubrificadas com pó bioabsorvível de amido de milho. Superfície Texturizada e antiderrapante. Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

### Aplicações

Indicada como proteção das mãos do usuário e do paciente em área médico-hospitalar, principalmente em cirurgias.

### Especificações Gerais

Modelo	SANRO MEDFEEL
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Texturizada
Acabamento Interno	Com pó
Formato	Anatômico
Cor	Natural
Comprimento	28 cm
Espessura	0,24 mm
Esterilização	Estéril

### Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
6.0	387940002	7896243126385	17896243126382
6.5	388940002	7896243126392	17896243126399
7.0	389940002	7896243126408	17896243126405
7.5	390940002	7896243126415	17896243126412
8.0	391940002	7896243126422	17896243126429

### Embalagem

embalada individualmente



caixa com 200 pares

### Certificação

CA	38848
CAD. ANVISA	10170489006
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
IFBQ	03997-1/2017



## Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL



### INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;  
Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;  
Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;  
Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;  
Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola;  
Após calçada, remover o excesso de pó bioabsorvível com uma toalha estéril umedecida.

### CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

### CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

## Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS  
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

**MATRIZ:** Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

**FILIAL:** Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP  
CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**www.luvassanro.com.br**

**e-mail: latex@latexsr.com.br**

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP



**Para maiores informações, consulte o nosso site: [www.luvassanro.com.br](http://www.luvassanro.com.br)**



SEPARE AS ABAS E PUXE PARA ABRIR

luva cirúrgica

# Medfeel

PRODUTO DE USO ÚNICO | DESTILAR APÓS O USO | PROIBIDO REPROCESSAR

## LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL

ESTÉRIL - LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL  
SUPERFÍCIE TEXTURIZADA - FORMATO ANATÔMICO - DEDOS CURVOS

TAM.:	<b>7.0 INT<sub>2</sub></b>
REFERÊNCIA:	<b>389940002</b>
FAB. / EST. EM:	<b>05/2020</b>
LOTE:	<b>130201</b>
CÓD. BARRAS:	 7 295243 130201 2

CONTÉM

**1**  
LUA

C.A. 38.848 - CAD. ANVISA Nº 10170489006 - RESP. TÉCNICO: ANGELINA M.T. MEDINA - CRO 04.110.366

ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAIOS GAMA COBALTO 60 - A VALIDADE E ESTERILIDADE DESTES PRODUTOS ESTÃO ASSEGURADAS POR 03 ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR ABERTA, DANIFICADA OU MOLHADA. APÓS CALÇADA, REMOVER O EXCESSO DE PÓ BIOABSORVÍVEL COM UMA TOALHA ESTÉRIL UMEDECIDA. **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ.**



Saúde  
Segurança



**ATENÇÃO: ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.**

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

**MATRIZ**  
AV. 3 DE MAIO, 307  
SÃO ROQUE / SP - CEP 18134-000  
CNPJ 70.939.574/0001-05

**FILIAL**  
RUA HORÁCIO MANLEY LANE, 440 - ÁREA 1  
B. MARMELEIRO - SÃO ROQUE/SP - CEP 18131-770  
CNPJ 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800-7218505  
CAIXA POSTAL: 1750 - CEP 18130-971 | SÃO ROQUE/SP | WWW.LATEXSR.COM.BR  
E-MAIL: LATEXSR@LATEXSR.COM.BR | FONE: (11) 4713.5000  
FAX: (11) 4712.5274