

Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL POWDERFREE



Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno isento de pó bioabsorvível e palma com superfície Texturizada e antiderrapante. Punhos com bordas. Estéril

Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e revestidas de polímero sintético, isentas de pó bioabsorvível. Superfície Texturizada e antiderrapante Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

Aplicações

Indicada como proteção das mãos do usuário e do paciente em área médico-hospitalar, principalmente em cirurgias.

Especificações Gerais

Modelo	MEDFEEL PF
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Texturizada
Acabamento Interno	Isenta de pó
Formato	Anatômico
Cor	Natural
Comprimento	28 cm
Espessura	0,18 mm
Esterilização	Estéril

Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
6.0	387950002	7896243126439	17896243126436
6.5	388950002	7896243126446	17896243126443
7.0	389950002	7896243126453	17896243126450
7.5	390950002	7896243126460	17896243126467
8.0	391950002	7896243126477	17896243126474

Embalagem

embalada individualmente



caixa com 200 pares

Certificação

CA	38847
CAD. ANVISA	10170489007
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
IFBQ	03997-6/2017



Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL POWDERFREE



INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;
Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;
Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

MATRIZ: Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP
CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.luvassanro.com.br

e-mail: latex@latexsr.com.br

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP



Para maiores informações, consulte o nosso site: www.luvassanro.com.br



SEPRE AS ABAS E PUKE PARA ABRIR

luva cirúrgica
Medfeel
POWDER FREE
PROIBIDO REPROCESSAR
PRODUTO DE USO ÚNICO | DESTRUIR APÓS O USO



LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL

ESTÉRIL - ISENTA DE PÓ - SUPERFÍCIE TEXTURIZADA
FORMATO ANATÔMICO - DEDOS CURVOS

TAM.: **7.0 INT¹**
REFERÊNCIA: **389950002**
FAB. / EST. EM: **01/2019**
LOTE: **018191**

CÓD. BARRAS: 7 18 9 6 2 4 3 1 2 6 4 3 3 1 >

CONTÉM
1
PAR

C.A. 38.847 - CAD. ANVISA Nº 10170489007 - RESP. TÉCNICO: ANGELINA
M.C.L. MEDINA - CRQ 04.110.366

ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO GAMA COBALTO 60 - A VALIDADE E
ESTERILIDADE DESTE PRODUTO ESTÃO ASSEGURADAS POR 03 ANOS, A PARTIR
DA DATA DE FABRICAÇÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR ABERTA,
DANIFICADA OU MOLHADA. **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:** PROTEJA ESTE
PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ.



**ATENÇÃO: ESTE PRODUTO CONTÉM
LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.
SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES
ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS
AO LÁTEX.**

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

MATRIZ
AV. 3 DE MAIO, 307
SÃO ROQUE / SP - CEP 18134-000
CNPJ 70.939.574/0001-05

FILIAL
RUA HORÁCIO MANLEY LANE, 440 - ÁREA 1
B. MARMELEIRO - SÃO ROQUE/SP - CEP 18131-770
CNPJ 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800-7218505
CAIXA POSTAL: 1750 - CEP 18130-971 | SÃO ROQUE/SP | WWW.LATEXSR.COM.BR
E-MAIL: LATEX@LATEXSR.COM.BR | FONE (11) 4713.5000
FAX (11) 4712.5274