

Classe:DESCARTAVEL

Gerado em 09/08/2022 11:55:27

Modelo

Características

GRL46 - GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA TIRAS COM COMPRIMENTO DE 46 CM CAIXA COM 25 TIRAS DESTACÁVEIS

DESCRIÇÃO

O produto GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA trata-se de uma tira contínua, livre de látex e sem talco, destacável a cada 46 cm.

COMPOSIÇÃO - Poliisopreno sintético

O GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA é válido por prazo indeterminado.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA é acondicionado em caixa contendo 25 tiras destacáveis.

FINALIDADE

O GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA é utilizado para apoio ao procedimento de coleta de sangue.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque o garrote ao redor do braço.
2. Quando atingir a pressão desejada, amarre o garrote formando um nó.
3. Proceda com a coleta de sangue de acordo com as normas do laboratório.
4. Para retirar o garrote, desfaça o nó.
5. Descarte o garrote em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Registro(s) MS: 10379860116, 10379860129



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479