

**PRODUTO:** Cateter Para Canalização Endovenosa Mono Lúmen (PICC)

<b>PRODUTO:</b>	Cateter Para Canalização Endovenosa Mono Lúmen (PICC)
<b>CÓDIGO</b>	5012
<b>CADASTRO/REGISTRO ANVISA</b>	81158510029
<b>CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)</b>	IV
<b>MODELO COMERCIAIS</b>	5012.01.15-1 5012.01.20-1 5012.01.30-1 5012.02.15-1 5012.02.20-1 5012.02.30-1 5012.02.50-1 5012.03.15-1 5012.03.30-1 5012.03.60-1 5012.04.30-1 5012.04.60-1 5012.05.60-1

## 1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

1. Catéter de Poliuretano (Cateter para Inserção Endovenosa – mono lúmen);
2. Garrote de Silicone;
3. Fita Métrica em papel;
4. Pinça metálica em aço inoxidável;
5. Conector Intermitente Luer Lock (corpo em policarbonato e válvula em silicone);
6. Introdutor modelo Standard em aço inoxidável (tamanho variável conforme modelo);
7. Clamp para Fechamento em ABS;
8. Tampa Macho Luer Lock polipropileno;
9. Conector Fêmea Luer Lock em PVC;

## 2. INDICAÇÃO DE USO

**PRODUTO:** Cateter Para Canalização Endovenosa Mono Lúmen (PICC)

O Cateter para Canalização Endovenosa Mono Lúmen (PICC) é indicado para infusão de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes neonatais, lactantes e pediátricos que necessitem de tratamento parenteral prolongado, pacientes com enterocolite necrosante, pacientes internados em unidades de terapia intensiva, pacientes submetidos a cirurgias e que passaram por longos períodos em jejum e pacientes com alterações metabólicas.

### 3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Código	Catéter				Introdutor (FR)
	Calibre (Fr)	Diâmetro externo x diâmetro interno (mm)	Comprimento efetivo (cm)	Lúmen	
5012.01.15-1	1,0	0,40 x 0,20	15	1	1,0
5012.01.20-1	1,0	0,40 x 0,20	20	1	1,0
5012.01.30-1	1,0	0,40 x 0,20	30	1	1,0
5012.02.15-1	2,0	0,62 x 0,30	15	1	2,0
5012.02.20-1	2,0	0,62 x 0,30	20	1	2,0
5012.02.30-1	2,0	0,62 x 0,30	30	1	2,0
5012.02.50-1	2,0	0,62 x 0,30	50	1	2,0
5012.03.15-1	3,0	1,0 x 0,50	15	1	3,0
5012.03.30-1	3,0	1,0 x 0,50	30	1	3,0
5012.03.60-1	3,0	1,0 x 0,50	60	1	3,0
5012.04.30-1	4,0	1,35 x 0,80	30	1	4,0
5012.04.60-1	4,0	1,35 x 0,80	60	1	4,0
5012.05.60-1	5,0	1,65 x 1,05	60	1	5,0

### 4. IMAGEM GRÁFICA

**PRODUTO:** Cateter Para Canalização Endovenosa Mono Lúmen (PICC)



#### Modelo mono lúmen

### 5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em blister PET virgem (politereftalato de etileno) com filme laminado liso PET+PP, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

### 6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno.

### 7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.