

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto: Compressas para Curativo

Nome Comercial: Curativo Cirúrgico Algodonado Estéril Neve.

Nº de Registro ANVISA: 81855830003

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques CRQ IV REGIÃO- 04265845

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO

O Curativo Cirúrgico Algodonado Estéril Neve é embalado individualmente utilizando papel grau cirúrgico e filme plástico termoselável, posteriormente, são acondicionados em caixas de embarque.

INDICAÇÃO DE USO

O Curativo algodonado Estéril Neve é Indicado para uso em procedimentos pós cirúrgicos sendo um coadjuvante do tratamento de feridas em geral.

É indicado ainda, para absorção de líquidos, sangue ou exsudatos, secreções, e anteparo para as vísceras e tecidos. Também pode ser utilizado em curativos extensos, tais como grandes queimaduras.

DESCRIÇÃO GERAL E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

O Curativo Cirúrgico Neve Estéril é confeccionado com uma manta 100% algodão, alvejado, hidrófilo, de uso hospitalar, envolto ainda com tecido de gaze, alvejado, hidrófilo e com grande poder de absorção. Isento de impurezas, substâncias gordurosas, amidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É composto por manta 100% algodão hidrófilo, e tecido de gaze 100% algodão.

São confeccionados e comercializados nas dimensões a seguir:

Código	Descrição	Código de barras EAN-13
79109-00	CURATIVO ALGOD.10CM X 15CM (10CM X 50CM ABERTO)	789817286165-8
79109-01	CURATIVO ALGOD.15CM X 30CM (15CM X 60CM ABERTO)	789817286200-6
79109-02	CURATIVO CIRÚRGICO 10x15CM EST. C/01	789817289002-3
79109-03	CURATIVO CIRÚRGICO 15x30CM EST. C/01	789817289003-0



MODO DE USO:

Retirar os Curativos Cirúrgicos de sua embalagem e aplicar no local afetado. Utilizar conforme os procedimentos padronizados, de acordo com a finalidade proposta. O produto não deve ser utilizado se alguma das características citadas estiverem em desacordo.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O produto deve ser usado somente para o fim a que se destina.
- Abrir a embalagem somente no momento de uso.
- Produto estéril por Óxido de Etileno.
- Produto de uso único, proibido reprocessar.
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada, rasgada, aberta, úmida, ou fora do prazo de validade.
- Após o uso, descartar em local apropriado.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:

O produto deve ser transportado e armazenado sob a proteção da luz solar direta, calor e umidade de forma segura a preservar e garantir a integridade física e funcional do produto e da embalagem.

NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES:

ABNT NBR 15053:2004- Artigo têxtil hospitalar- Curativo Cirúrgico- Requisitos e métodos de ensaio.

VALIDADE:

Válido por 05 anos após a data de fabricação.