



RELATÓRIO TÉCNICO

Relatório contém 3 páginas

COLETOR DE MATERIAIS QUÍMICOS, PERFURANTES E CORTANTES DESCARBOX

Responsável Técnico

Flávia Dalla Pria CRQ/Pr – nº

9201624



1. MODELO COMERCIAL:

Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Laranja - 1,5 L - 0.750 Quilogramas 120x110x145 mm;

Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Laranja - 03 L - 1.500 Quilogramas 140x110x220 mm;

Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Laranja - 07 L - 3.500 Quilogramas 215x170x220 mm;

Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Laranja - 13 L - 6.500 Quilogramas 285x205x240 mm;

Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Laranja - 20 L - 10 Quilogramas 305x245x310 mm;

2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

Embalagem primária: 10 unidades do produto;

Embalagem secundária: 20 unidades do produto, embalados em caixas de papelão.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:

Os coletores sevem para descarte de materiais químicos perfurantes e cortantes: São descartados nestes produtos do tipo E com características de contaminação química, ou seja, escalpes, ampolas de vidro, brocas, lancetas; tubos capilares; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório e outros similares.

4. COMPOSIÇÃO:

Recipiente para descarte de perfurocortantes/químicos na cor laranja;

Coletor de papelão ondulado [onda B] na cor pardo;

Sacola de revestimento de polietileno [PEBD] cor laranja;

Fundo e Cinta interna de papel rígido (reciclado de materiais, papéis e plásticos prensados);

Bandeja interna de papelão ondulado [onda B];

Acondicionado em embalagem primária caixa de papelão ondulado [onda B];

5. INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Utilizado para descarte de materiais químicos, perfurantes ou cortantes.

Fabricante recomenda uso único;

Manusear afastado do corpo;



- Não exceder o limite determinado pela linha pontilhada;
- Destruir após o uso, conforme legislação ambiental vigente;
- Não estéril;
- Validade 5 (cinco) anos;
- Classe de risco I;
- Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo;
- Não armazenar em local com umidade ou temperatura alta;
- Não deixar exposto ao sol por longo tempo.;
- Mantenha o coletor afastado do corpo;
- Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

6. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO / MODO DE USO:

- 1) Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar.
- 2) Abra as abas superiores do coletor;
- 3) Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico. Introduza também a
- 4) Cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro
- 5) Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
- 6) Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
- 7) Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
- 8) A seguir, faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
- 9) Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
- 10) Utilizar descartando os materiais até o limite de enchimento;
- 11) Não manuseie, reencape ou entorte as agulhas usadas;
- 12) Travar o lacre para fechamento para descarte;

7. CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Não armazenar em local com umidade ou temperatura alta. Não deixar exposto ao sol por longo temp.
Manter em temperatura ambiente e livre de poeira.

8. NORMAS E NCM

NBR 13853-1/2018; NBR 7500/2018; NBR 5426/1985;

RDC 16/2013; RDC 222/2018

NCM 48.191.000

9. IMAGENS DO PRODUTO

Descarbox Indústria e Comércio LTDA.
CNPJ:11.671.812/0001-85
Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br



Descarbox Indústria e Comércio LTDA.
CNPJ:11.671.812/0001-85
Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br