

INSTRUÇÃO DE USO

POOLFIX®

Rede tubular elástica

DESCRIÇÃO

Poolfix® é uma rede tubular elástica, que fixa o curativo corretamente em qualquer parte do corpo humano, adapta-se como se fosse uma roupa, para isso basta os cortes adequados à necessidade, proporciona uma pressão uniforme, sem ser incomodo permitindo completa liberdade de movimentos.

Não desfia quando cortado e mantém sua elasticidade, mesmo após uso prolongado, não necessita ser trocada juntamente com o curativo reduzindo gastos com o material e o tempo de execução.

Poolfix® é um produto de fabricação brasileira, composto de Poliamida e Elastodieno recoberto, afastando assim, qualquer reação alérgica. O produto esta disponível em doze medidas diferentes, o que permite um amplo o uso.

MODELOS

O produto é apresentado em 12 calibres (tamanhos) diferentes (0,5;1;2;3;4;5;5,5; 6;7;8;9 e10).

MODELO	CALIBRES	LARGURA
0,5	0,5	11 mm
1	1	14 mm
2	2	17 mm
3	3	21 mm
4	4	23 mm
5	5	29 mm
5,5	5,5	33 mm
5,8	5,8	43 mm
6	6	57 mm
7	7	59 mm
8	8	66 mm
9	9	83 mm
10	10	100 mm

Tabela comparativa entre calibres e larguras

DESCRIÇÃO DE UTILIZAÇÃO

MODELO	INDICAÇÕES DE USO
0,5 e 1	Dedo
2 e 3	Mão, punho, braço, cotovelo, pé, perna e joelho
4, 5, 5,5 e 5,8	Cabeça, pescoço, ombro e coxa
6, 7, 8, 9 e 10	Genitália, anal, abdômen e tórax

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

A rede tubular elástica é o resultado do entrelaçamento de dois tipos de fios (Poliamida e Elastodieno), resultando este para finalidade de fixação de curativo em qualquer parte externa do corpo.


Composição: 24% - Elastodieno
76% - Poliamida

INSTRUÇÕES DE USO

a) Bandagem para fixação de curativos pequenos.

Modelo: 0,5 e 1

- 1 e 2 – Cortar uma medida de 15 cm de Poolfix e colocá-la no aplicador
- 3 – Introduzir o dedo a ligar pela extremidade de maior diâmetro do aplicador.
- 4 – Prendendo o extremo de Poolfix sobre o dedo, retire lentamente o aplicador.
- 5 – Fazer uma rotação completa do aplicador.
- 6 – Introduzir novamente o dedo até a sua base, no aplicador.
- 7 – Retirar o aplicador, e se necessário fazer uma dobra na base do dedo.

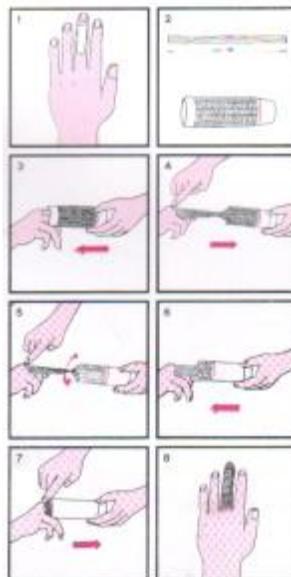

b) Bandagem para fixação de curativos pequenos e médios.

Modelo: 2 e 3

1 e 2 – Corte um pedaço de Poolfix no comprimento de (a + b)
a = comprimento do dedo a ligar
b = comprimento da mão, desde a ponta do dedo até o pulso.


3 – Introduzir o dedo até cobrir o penso.

4 – Fazer uma rotação completa de modo a fechar a abertura na extremidade do dedo.

5 – Cobrir toda a mão até o pulso com o resto de Poolfix, fazendo um punho de alguns centímetros.

6 – Fazer um corte longitudinal na zona da palma da mão, 2 cm abaixo da base do dedo ligado, até o punho.

7 – Passar os outros dedos por cada lado do corte.

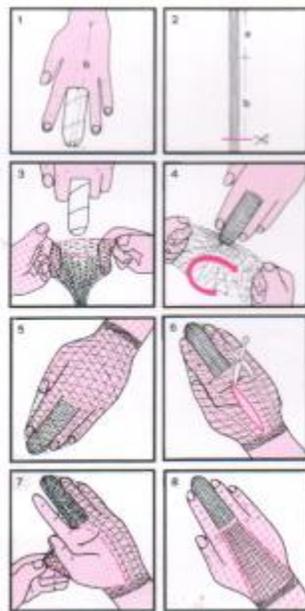


1 e 2 – Cortar o comprimento de (a + b) de Poolfix (do tornozelo até a extremidade do halux)

3 – Colocar o Poolfix sobre o penso, abrangendo somente o dedo.


4 e 5 – Fazer uma rotação completa e colocar o Poolfix sobre o pé, até um pouco acima do tornozelo.

6 – Cortar 4 ou 5 elos para libertar o calcanhar.

7 – Cortar 3 ou 4 elos na base do dedo pequeno, para libertar os outros dedos.

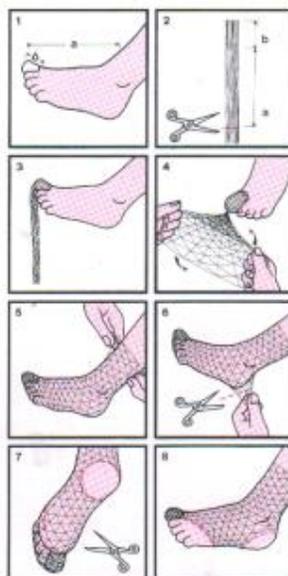


- 1 e 2 - Cortar o comprimento de (a + b) de Poolfix (do tornozelo até a extremidade do halux)
- 3 - Colocar o Poolfix sobre o penso, abrangendo somente o dedo.
- 4 e 5 - Fazer uma rotação completa e colocar o Poolfix sobre o pé, até um pouco acima do tornozelo.
- 6 - Cortar 4 ou 5 elos para libertar o calcanhar.
- 7 - Cortar 3 ou 4 elos na base do dedo pequeno, para libertar os outros dedos.

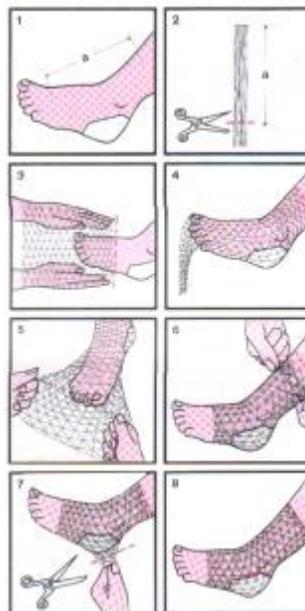

- 1 e 2 - Corte um pedaço de Poolfix com o comprimento necessário (a).
- 3 - Introduza as mãos na Rede tubular elástica e alargue-a suficientemente.
- 4 - Aplique sobre o penso, retirando primeiro uma mão e em seguida a outra.


- 5 – Dobre para dentro alguns centímetros de cada extremidade.
 - 6 – Para mudar o penso, ou inspecionar a ferida, bastará levantar o Poolfix.
- Deste modo é possível aproveitá-lo para muitas outras aplicações.

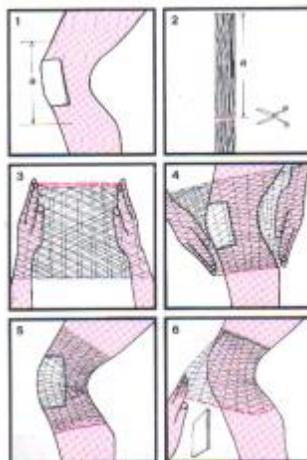


C) Bandagem para fixação de curativos médios.

Modelo: 4, 5 , 5,5 e 5,8


- 1 – Corte um pedaço de Poolfix com o comprimento equivalente à distância que vai do pescoço à extremidade superior do crânio.
- Anexo III B
- 2 – Introduza as mãos na Rede elástica tubular e alargue-a ao máximo. Aplique a rede na cabeça deixando na extremidade superior do crânio, um pedaço de 5 cm.
 - 3 – Corte a Rede na zona do nariz como indicado na figura 3 de maneira a obter um orifício circular com cerca de 6 cm de diâmetro. Este corte permitirá libertar o rosto.
 - 4 – Para libertar o rosto poderá também cortar horizontalmente algumas Redes na base dos olhos e depois rebater sob o queixo o bordo inferior do corte.
 - 5 e 6 – Introduza a extremidade superior excedente entre a Rede e a base do crânio.

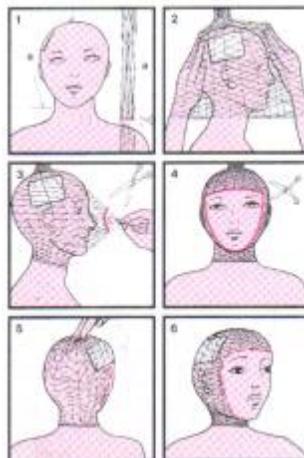

- 1 – Corte um pedaço de Poolfix na medida de a + b
- 2 – Faça um corte em V de 1 cm, na altura da região glútea (meio dos segmentos a e b)
- 3 – Abra Poolfix com as mãos exatamente como mostra a figura, até atingir os locais cortados.
- 4 – Introduza primeiro a perna onde está o curativo, na parte mais longa de Poolfix e a outra na parte mais curta.
- 5 e 6 – Esta aplicação permite liberdade total de movimento e pode ser removida facilmente em caso de necessidade.
- 7 e 8 – Este tipo de aplicação também é indicada em casos de amputação.

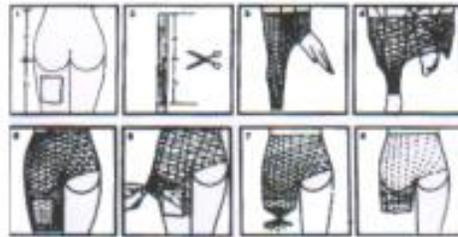


- 1 – Cortar a medida necessária de Poolfix (a + b)
- 2 – Numa das extremidades deixar 6 cm e partindo deste ponto, faça um corte no sentido do comprimento de 15 cm, abrangendo ambas as camadas de Poolfix, formando uma pequena abertura.
- 3 – Introduzir as mãos na parte seguinte ao corte, como mostra a figura, tendo o cuidado de deixar a parte que cortou para cima.
- 4 – Esticar com ambas as mãos e aplicar no braço do paciente.
- 5 e 6 – Passar a cabeça e o braço pela pequena abertura efetuada. Para mudar o penso, bastará levantar a Rede o suficiente.
- 7 – Para obter uma melhor cobertura do ombro, fazer um pequeno corte na axila.
- 8 – Esta aplicação é muito útil quando é necessário ligar o braço por completo (ex: pós-flebite).

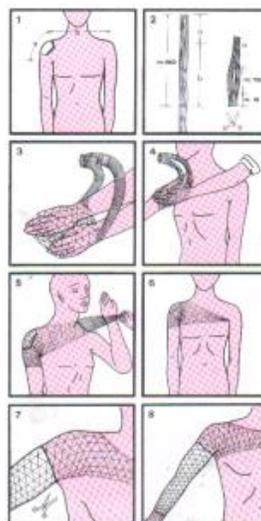


d) Bandagem para fixação de curativos médios.

Modelo: 6, 7, 8, 9 e 10


- 1 e 2 – Cortar a medida necessária de Poolfix (30 a 40 cm)
- 3 – Introduzir as mãos e alargar ao máximo.
- 4 e 5 – Aplicar Poolfix no tronco do paciente, incluindo os braços.
- 6 – A cerca de quatro dedos abaixo do ombro na zona exterior do braço, cortar horizontalmente 4 ou 5 elos.
- 7 – Passar os braços pelos cortes efetuados.
- 8 – Se a abertura não for suficiente e causar desconforto, alargar um pouco em cada axila.

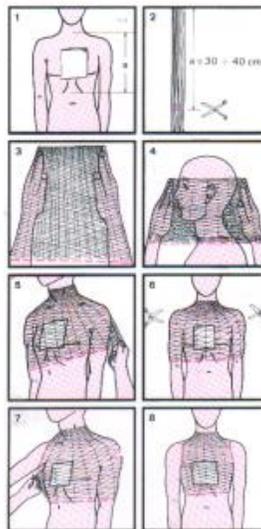

- 1 e 2 – Corte um pedaço de Poolfix com o comprimento necessário (a + b) – cerca de 60 cm tendo em consideração que o comprimento "a" termina no pescoço e que o comprimento "b" vai do pescoço à cintura. Faça um pequeno corte em "V" com cerca de 1 cm entre "a" e "b" a cerca de 20 cm de uma das extremidades.
- 3 – Introduza as mãos na manga tubular elástica começando pela parte que deve cobrir o tronco e mantendo o corte em "V" para cima. Será por este corte que sairá a cabeça.
- 4 – Alargue o Poolfix ao máximo, começando por cobrir primeiramente o braço e manter o corte em "V" por cima do mesmo.
- 5 – Fala sair a cabeça pelo corte.
- 6 – Rebater a outra parte sobre a manga tubular elástica sobre o tórax o braço oposto. A quatro dedos abaixo da ponta do ombro, corte horizontalmente 4 ou 5 Redes.
- 7 – Passe o braço pelo corte praticado e depois estenda a Rede até o tórax.
- 8 – Se os cortes forem insuficientes ou pouco confortáveis poderá alargá-las contando alguns fios logo que a aplicação esteja terminada.

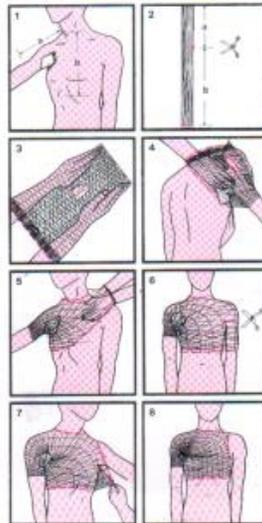

- 1 – Corte um pedaço de Poolfix como demonstrado na figura com cerca de 40 cm de comprimento. Medida para adulto com físico médio.
- 2 – Faça um corte em V com cerca de 1 cm a uma distância de 10 cm de uma das extremidades.
- 3 – Abra a bandagem tubular de Poolfix com as duas mãos e estenda-a. A mão direita deve passar pela outra extremidade de Poolfix e a mão esquerda pelo corte em V.
- 4 – Vista Poolfix no corpo do paciente.

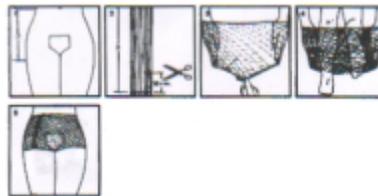

ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS

- Uso exclusivamente externo,
- Não utilizar em contato direto com a ferida ou órgãos genitais sem a compressa absorvente especial e/ou a medicação específica para o caso.
- Utilizar a medida adequada para evitar compressão excessiva. Em caso de dúvida é preferível a utilização de uma medida maior.
- Utilizar seguindo a maneira indicada, não torcer.
- Não ingerir. Manter longe do alcance de crianças.
- Não utilizar para outros fins a não ser os indicados.
- Manter o produto em local seco, longe do calor e da umidade.
- Não utilizar o produto se estiver sem uso por muito tempo. Renovar o estoque periodicamente.
- Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

- O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados por uso incorreto do produto.
- Este produto não é comercializado estéril e nem esterilizado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de umidade. Manter o produto em sua embalagem original até o momento de utilização.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

A Rede Tubular Elástica Pooltex são produtos fornecidos NÃO-ESTÉREIS, em caixas de papelão contendo 25m-esticado equivalente a 10m lineares.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

POOLTEX IND. E COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Rua Taboão, nº93, Vila Santa Clara

Atibaia - SP - CEP: 12951-755

CNPJ nº: 09.107.943/0001-92

Resp. Tec.: Regiane Rebeca B dos Reis - COREN: 439322

Registro ANVISA nº: 804.456.800.01