
 PRODUTOS MÉDICOS LTDA	FICHA TÉCNICA FIXADOR DE TUBO TRAQUEAL NOTIFICAÇÃO ANVISA: Nº10014160038	Nº15/21 Elaboração: 07/2021 Emissão: 11/2023 Entrada em vigor: 11/2023 Revisão: nº05

FINALIDADE

Utilizado para fixação de tubo traqueal em pacientes.

APRESENTAÇÃO

Fixador de tubo Traqueal  Código:40601	Banda inferior Comprimento 62,0 cm Largura 2,0 cm 2 Velcros: Comprimento 5,0 cm Largura 1,3 cm Alça de Sustentação: Comprimento 3,0 cm Largura 2,0 cm Velcro alternativo: Comprimento 2,0 cm Largura 2,0 cm	Banda superior Comprimento 62,0 cm Largura 2,0 cm 2 Velcros: Comprimento 5,0 cm Largura 1,3 cm Orifício: Comprimento 3,0 cm Distância do orifício até a extremidade: 30,0 cm
---	--	---

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

- ✓ Produto não estéril, embalado individualmente em embalagem plástica;
- ✓ Fabricado em espuma de poliuretano com pluma de poliamida atalhada, dobrada, macia, aveludada e costurada em fio de nylon;
- ✓ O Velcro tem a função de fixação, formados por duas camadas de ganchos costurados em lados opostos.

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ Abrir a embalagem assepticamente após a verificação da sua integridade e prazo de validade, antes da utilização do produto;
- ✓ Limpar com álcool a extremidade do tubo endotraqueal próxima ao paciente e colar o adesivo de velcro;
- ✓ Posicionar a banda (que apresenta um orifício central) ao redor do velcro que está fixado o tubo;
- ✓ Traga as extremidades desta banda para a nuca do paciente ajustando o fixador e sobrepondo os velcros;
- ✓ As extremidades da banda superior devem ser posicionadas acima das orelhas, ajustadas e fixadas na parte posterior da cabeça sobrepondo os velcros.
- ✓ Após o uso descarte ou reprocessse.
- ✓ **Tempo de Utilização:** A troca deve ser efetuada de acordo com as necessidades de higienização.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS/CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ Artigo Médico Hospitalar passível de reprocessamento;
- ✓ Isento de látex;
- ✓ Destruir após uso;
- ✓ Descartar em local para materiais potencialmente contaminados;
- ✓ O produto só pode ser instalado por profissional habilitado;
- ✓ Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou o prazo de validade estiver vencido;
- ✓ Não se tem relatos de nenhuma queixa técnica ou reclamação causada pelo uso do produto, quando utilizado de acordo com as instruções de uso e para a finalidade a que se destina;
- ✓ Validade 5 anos a partir da data de fabricação.

ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE

- ✓ Armazenar e transportar em local limpo, livre de umidade ou contaminação e em temperatura ambiente.

Fabricante: CPL Medical's Produtos Médicos Ltda
 CNPJ 43.512.870/0001-52 Indústria Brasileira
 Rua Vieira Portuense, 760 - CEP 04347-080 - Jardim Oriental - São Paulo - SP
 Responsável Técnico: Dr. Fabio Luiz Silva CRBM-SP 3940
 Tel: (11) 5015-1000 SAC (11) 5011-7263 (11) 93235-3355
cplmedicals@cplmedicals.com.br
www.cplmedicals.com.br
Indústria genuinamente nacional sinônimo de entrega garantida.