

FICHA TÉCNICA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

NOTIFICAÇÃO ANVISA AÇO INOX: Nº. 10014160040

NOTIFICAÇÃO ANVISA LATÃO CROMADO: №. 10014160039

Elaboração: 07/2021 Emissão: 01/2024

Nº04/21

Entrada em vigor: 01/2024 Revisão: nº04

FINALIDADE

Para permitir o auxílio na respiração de pacientes com traqueostomia.

APRESENTAÇÃO

Conteúdo: Mandril / Cânula externa/ Cânula Interna



ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

- ✓ Possui embalagem individual plástica acondicionada em caixa com os dados do produto;
- ✓ Produto não estéril;
- ✓ Cânula externa de superfície lisa com gravata para fixação no paciente;
- ✓ Cânula interna e Mandril com ponta redonda que auxilia na inserção da Cânula.

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ Abrir a embalagem após a verificação da sua integridade;
- ✓ Só pode ser instalada por profissional habilitado. A técnica de introdução faz parte de sua área de atuação;
- ✓ Limpeza: coloque o conjunto da Cânula de molho em água e sabão neutro por alguns minutos e esfregue a cânula externa e a interna por fora usando uma escova adequada;
- Enxague em água corrente e esteriliza o conjunto completo da seguinte forma: Ferva a água suficiente e deixe o conjunto completo por 10 minutos na água fervida;
- ✓ Como segurança mantenha sempre limpa a cânula interna pois está poderá ser trocada rapidamente em caso de entupimento. Antes de sua utilização sugerimos a limpeza do produto.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS/CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ Artigo Médico Hospitalar passível de reprocessar:
- ✓ Isento de látex;
- ✓ Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou o prazo de validade estiver vencido;
- ✓ O produto só pode ser instalado por profissional habilitado, a técnica de introdução faz parte de sua área de atuação:
- ✓ Troque o conjunto completo todos os dias ou quantas vezes forem necessárias para limpeza;
- ✓ É ideal que se tenha 2 conjuntos e que estes sejam utilizados em dias alternados;
- Orientamos que no momento de limpeza das peças evitem a mistura dos conjuntos;
- ✓ Descartar em local para materiais potencialmente contaminados;
- √ Não se tem relatos de nenhuma queixa técnica ou reclamação causada pelo uso do produto, quando utilizado de acordo com as instruções de uso e para a finalidade a que se destina;
- ✓ O produto pode ter deformação em caso de quedas e também pode sofrer alteração da cor (amarela) devido à ação química de fluídos corporais presente no próprio organismo do paciente;
- ✓ Validade 5 anos sem utilizar, com utilização de no máximo de 2 a 3 meses para Cânula cromada e 6 meses para Cânula inox.

ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE

✓ Armazenar e transportar em local limpo, livre de umidade ou contaminação e em temperatura ambiente.

Fabricante: CPL Medical's Produtos Médicos Ltda

CNPJ 43.512.870/0001-52 Indústria Brasileira Rua Vieira Portuense,760 - CEP 04347- 080 - Jardim Oriental - São Paulo - SP Responsável Técnico: Dr. Fabio Luiz Silva CRBM-SP 3940 Tel: (11) 5015-1000 SAC (11) 5011-7263 (11) 93235-3355

> <u>cplmedicals@cplmedicals.com.br</u> <u>www.cplmedicals.com.br</u>

Indústria genuinamente nacional sinônimo de entrega garantida.



PRODUTOS MÉDICOS LTDA

FICHA TÉCNICA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

NOTIFICAÇÃO ANVISA AÇO INOX: №. 10014160040

NOTIFICAÇÃO ANVISA LATÃO CROMADO: №. 10014160039

Nº04/21

Elaboração: 07/2021 Emissão: 01/2024 Entrada em vigor: 01/2024

Revisão: nº04

<u>Medidas</u>

Chapinha da cânula externa						
Comprimento: 4,0 cm	Largura: 2,0 cm					
Apresentando dois orifícios laterais que permitem a fixação do cadarço						

Curto Inov							
Curta Inox							
Código	Nº	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Comprimento			
13621	00	4,00	5,0 mm	2,5 cm			
13626	0	5,00	6,0 mm	3,0 cm			
13627	1	6,00	7,0 mm	3,5 cm			
13620	2	7,00	8,0 mm	4,0 cm			
13611	3	8,00	9,0 mm	4,5 cm			
13609	4	9,00	10,0 mm	5,0 cm			
13610	5	10,00	11,0 mm	5,5 cm			
13608	6	11,00	12,0 mm	6,0 cm			
Standard Inox							
13615	00	4,00	5,0 mm	4,5 cm			
13616	0	5,00	6,0 mm	5,0 cm			
13617	1	6,00	7,0 mm	5,5 cm			
13618	2	7,00	8,0 mm	6,0 cm			
13603	3	8,00	9,0 mm	6,5 cm			
13604	4	9,00	10,0 mm	7,0 cm			
13605	5	10,00	11,0 mm	7,5 cm			
13606	6	11,00	12,0 mm	8,0 cm			
Longa Inox							
13623	00	4,00	5,0 mm	6,5 cm			
13622	0	5,00	6,0 mm	7,0 cm			
13624	1	6,00	7,0 mm	7,5 cm			
13625	2	7,00	8,0 mm	8,0 cm			
13612	3	8,00	9,0 mm	8,5 cm			
13613	4	9,00	10,0 mm	9,0 cm			
13607	5	10,00	11,0 mm	9,5 cm			
13614	6	11,00	12,0 mm	10,0 cm			

Curta Latão						
Código	Nº	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Comprimento		
13328	00	4,00	5,0 mm	2,5 cm		
13300	0	5,00	6,0 mm	3,0 cm		
13349	1	6,00	7,0 mm	3,5 cm		
13350	2	7,00	8,0 mm	4,0 cm		
13319	3	8,00	9,0 mm	4,5 cm		
13301	4	9,00	10,0 mm	5,0 cm		
13305	5	10,00	11,0 mm	5,5 cm		
13306	6	11,00	12,0 mm	6,0 cm		
Standard Latão						
13311	00	4,00	5,0 mm	4,5 cm		
13312	0	5,00	6,0 mm	5,0 cm		
13313	1	6,00	7,0 mm	5,5 cm		
13314	3	7,00	8,0 mm	6,0 cm		
13315	3	8,00	9,0 mm	6,5 cm		
13316	4	9,00	10,0 mm	7,0 cm		
13317	5	10,00	11,0 mm	7,5 cm		
13318	6	11,00	12,0 mm	8,0 cm		
Longa Latão						
13345	00	4,00	5,0 mm	6,5 cm		
13346	0	5,00	6,0 mm	7,0 cm		
13347	1	6,00	7,0 mm	7,5 cm		
13348	2	7,00	8,0 mm	8,0 cm		
13307	3	8,00	9,0 mm	8,5 cm		
13308	4	9,00	10,0 mm	9,0 cm		
13309	5	10,00	11,0 mm	9,5 cm		
13310	6	11.00	12.0 mm	10.0 cm		

Fabricante: CPL Medical's Produtos Médicos Ltda

CNPJ 43.512.870/0001-52 Indústria Brasileira Rua Vieira Portuense,760 - CEP 04347- 080 - Jardim Oriental - São Paulo - SP Responsável Técnico: Dr. Fabio Luiz Silva CRBM-SP 3940 Tel: (11) 5015-1000 SAC (11) 5011-7263 (11) 93235-3355

> cplmedicals@cplmedicals.com.br www.cplmedicals.com.br

Indústria genuinamente nacional sinônimo de entrega garantida.