

ESCARRADEIRA – AÇO INOXIDÁVEL

Escarradeira

1 DESCRIÇÃO

É um produto com finalidade específica para coleta de secreção orofaríngea ou pulmonar. Fabricada em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas.

2 INDICAÇÃO

Indicada para coletar secreção orofaríngea ou pulmonar.

3 INSTRUÇÕES DE USO

- Não armazenar outros produtos pesados sobre a escarradeira.
- Fazer a limpeza manual com esponja ou escova não abrasiva e detergente.
- Realizar o enxágue com água corrente potável em abundância.
- Secar com tecido limpo e seco, que não solte partículas ou por meio de secadora com ar quente.
- Desinfecção da superfície com álcool a 70%.
- Limpeza automatizada em equipamentos – lavadora termodesinfetadora e vapor fluente (a escarradeira deve estar livre de sujidade visível) – utilizando somente produtos recomendados (detergentes: enzimático, alcalino ou neutro), com diluição, temperatura e tempo de exposição de acordo com as recomendações do fabricante do produto.

Nota: Não utilize produtos químicos corrosivos, soluções salinas e cloradas, essas substâncias podem favorecer o aparecimento de manchas, pitting e corrosão.

Água potável tratada, ou seja, livre de resíduos orgânicos e inorgânicos.

Desinfecção térmica em lavadora automatizada – tempo e temperatura de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos.

O fabricante da escarradeira não se responsabiliza pelo uso de produtos não recomendados.

	INSTRUÇÕES DE USO	IDU_01	Data: 01/11/2017
	EMBALAGENS E RECIPIENTES	REV:00	

4 ESTERILIZAÇÃO

Nota: por se tratar de um produto não crítico, não é necessária a esterilização. Esterilizar de acordo com a necessidade ou protocolo do serviço de saúde.

- Esterilização a vapor por altas temperaturas - 121 °C por 15 minutos ou 134 °C por 4 minutos.
- Esterilização a baixas temperaturas – Formaldeído, Peróxido de Hidrogênio e Óxido de Etileno – observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

5 ACONDICIONAMENTO

No almoxarifado: Acondicionar em embalagem plástica transparente, identificar o produto com etiqueta contendo: código do produto, nome do produto, data de fabricação, data de validade, número do lote e nome do fabricante. Armazenar em local limpo e seco em armários fechados protegidos de poeira.

No CME do Serviço de Saúde: Após o processo de desinfecção a escarradeira pode ser embalada em embalagem plástica transparente, lacrada e identificada com a data do processamento, o método, data limite de uso e identificação do profissional. Preparo para esterilização, a escarradeira pode ser embalada em sistema de barreira estéril flexível de acordo com o método de esterilização em: Tyvec®, Papel Crepado, Papel Grau Cirúrgico, SMS, Algodão. A identificação e o armazenamento devem atender as recomendações da ANVISA na RDC N° 15, de 15 de março de 2012 nos artigos n.º 85 e 58 a 61.

6 PRECAUÇÃO

A escarradeira deve ser utilizada somente para a função que foi projetada, pois, o uso inadequado pode danificá-lo.

Nota: o fabricante não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Ver garantia.

7 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	CÓDIGOS		
			Econox	Nova Luminos	Matt Series
Escarradeira, com tampa	Ø 9 x 5 cm	1 unidade	-	140.030	-

ANVISA: A escarradeira não se enquadra na definição de produto médico da RDC nº 185/01, não sendo passível de cadastro na ANVISA.

CNPJ: 59.293.662/0001-40 | **T.Resp.:** W.Pesinato **CREA:** 140949 | regulatorio@fami.com.br